

新しく
なりました



水溶性潤滑剤 カテゼリー®

ガンマ線滅菌済み パラベンフリー 日本製

カテゼリーは、尿道留置カテーテルをはじめ
各種医療機器への補助用潤滑ゼリーです。

RENEWAL

単包、使い切り

5g 入りの使い切りパッケージで
衛生的に管理できます

適度な粘性

適度な粘性があり医療機器への塗布
が容易です

局所麻酔成分不使用

麻酔成分を含有していませんので、
麻酔成分によるショック症状の
心配がありません



リニューアルの Point

1 パッケージと箱の表記は日本語で解りやすく

外箱（100 入り）に「使用用途」、「使用上の注意」、「使用方法」、「保管上の注意」を、パッケージには「使用用途」を日本語で記載し、ご使用の際に確認しやすくなりました。




表面に西暦 4 桁・月 2 桁で刻印

2 パッケージにも使用期限を表記

100 個入りの箱だけではなく、個包装のパッケージに使用期限を記載していますので使用期限の確認が容易になりました。

※末尾のアルファベットは製造固有記号です

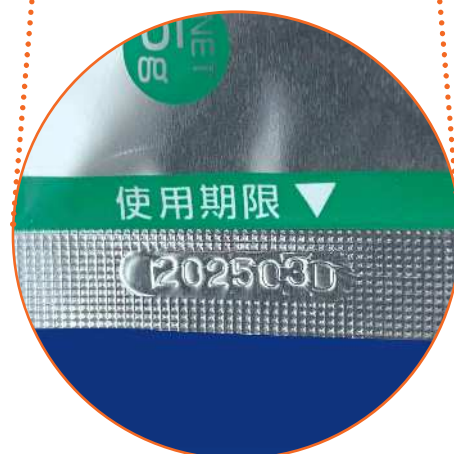

3 パッケージに「切り口」を表記

パッケージの切込みが入ってる箇所に、「切り口」の表記があります。
開封するときに切り口の場所の確認が容易になりました。


ココから



4 医療機器になじみやすい粘度

リニューアルしたカテゼリーはべたつき感が少なく、適度な粘度を有しており、機器の表面に塗布した際にムラになりにくいです。

ムラになりにくい

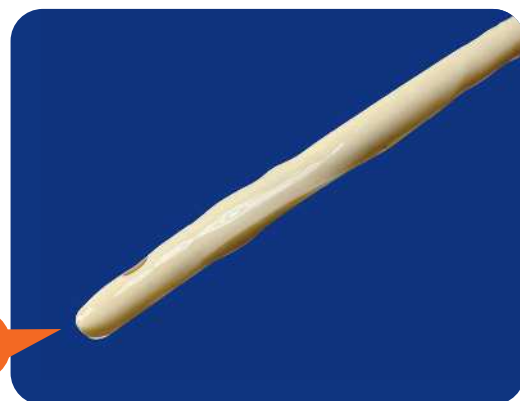

5 安全性について（パラベンフリー）

主成分は下記のとおりです。安全性評価試験を実施済みです。
また、「パラベン」は含まれていません。

主成分

水、ポリオール、
親水性増粘剤、
安定化剤

※安全性評価試験（膣粘膜刺激性試験、口腔粘膜刺激性試験、
皮膚感作性試験、細胞毒性試験、急性毒性試験）を実施済み



使用上の注意

- ・ 医師、検査技師等の医療従事者以外は使用しないでください。
- ・ 各種医療機器への潤滑補助目的以外には使用しないでください。
- ・ 本品により、発疹・発赤・かゆみ等の症状があらわれた場合は、直ちに使用を中止してください。
- ・ 本品の滅菌の有効性は、開封されるまでです。再使用しないでください。
- ・ 万一、包装に破損・汚損等が生じている場合は、無菌状態が損なわれている可能性があるため使用しないでください。

使用方法

- ① 中身のゼリーが飛び出さないように注意して、パッケージの切り口から開封します。
- ② そのまま適所に使用（塗布）します。
尿道留置カテーテルの場合は、絞り出したゼリーをカテーテルに塗布します。
- ③ 使用・検査後はタオルまたはティッシュペーパー等できれいに拭き取ります

保管上の注意

本品は保管環境により、変質するおそれがあります。
必ず高温、多湿、直射日光及び水濡れを避け、
保管してください。



ORDERING INFORMATION

販売名：カテゼリー

カタログ番号	JAN コード	規格	包装	製造国
CJ001	4987664112262	5g	100 入 / 小箱 800 入 / 大箱	日本

承認番号：非該当

- ・ 使用にあたり、箱記載の取扱説明を必ず読んでからご使用ください。
- ・ 製品の仕様・形状等は、改良等の理由により予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

販売元：

株式会社メディコン

本社 大阪市中央区平野町 2 丁目 5-8 平野町センチュリービル 9F ☎ 0120-036-541

crbard.jp

