

## 穿刺部被覆保護材

# ニプロパッド®


医療機器届出番号：43B2X00005000017

シリーズ品番：  
ニプロパッドS  
ニプロパッドM



特 長

テープ基材は通気性の良い  
レーヨン不織布を、  
粘着剤は肌に優しい  
アクリル系を使用しています。

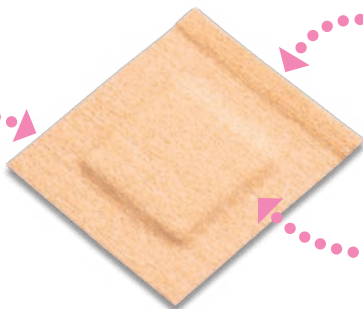


片手で簡単に貼り付けられるよう


- ①裏面に固定テープをつけました。
- ②テープ上部を折り返し、つまみ部分をつけました。

パッドは吸収性の良い  
コットン不織布を採用しました。


使用方法

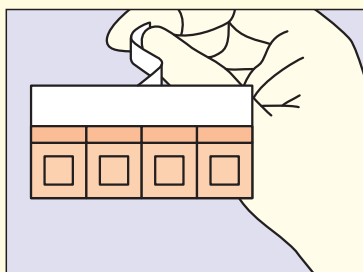


- ◀1  
シート裏面の固定用  
テープの剥離紙を剥  
がします。

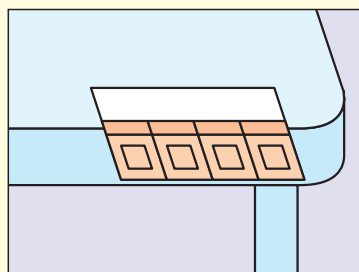

- ◀2  
治療台の端に固定し  
ます。

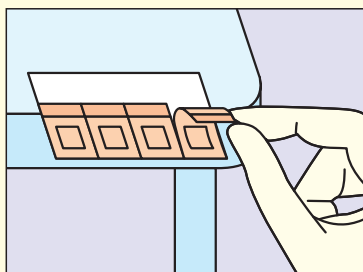

- ◀3  
折り返しされている  
部分を下に向けて台  
紙から剥がしてくだ  
さい。

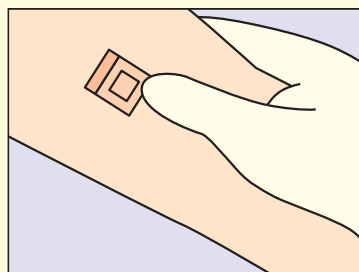

- ◀4  
そのまま粘着部を  
押さえてしっかり  
固定してください。

規 格

医療機器届出番号 43B2X00005000017

商品コード	規格	粘着部サイズ (mm)	パッドサイズ (mm)	1シート枚数	入数	梱包	JANコード
21-135	ニプロパッドS	20×23	8×8	5枚	1000枚(5シート×40袋)/箱	1000枚×20箱	4987458211355
21-136	ニプロパッドM	27×30	15×15	4枚	500枚(5シート×25袋)/箱	500枚×20箱	4987458211362

一般医療機器 救急絆創膏

エチレンオキサイドガス滅菌済み



販売 ニプロ株式会社  
大阪市北区本庄西3丁目9番3号

製造販売者 リバテープ製薬株式会社  
熊本市北区植木町岩野45  
お客様相談室  
TEL 0120-199-189