

インジェクションパッド

INJECTION PAD



■インジェクションパッド(白タイプ)



■インジェクションパッド(ベージュタイプ)

特 長

■パッドに触れず衛生的

パッド・粘着面に触れずに衛生的に貼ることができます。

■血液吸収性に優れたセルロース系不織布のパッドを採用

適度な圧迫効果があります。

■白とベージュの2色

■個包装滅菌

医療機器届出番号 13B2X00218131100
医療用品(4)整形用品 一般医療機器 救急絆創膏
JMDNコード 34864000



No. 36

No. 30A

規 格

インジェクションパッド (白タイプ)

品番	サイズ		1箱
	テープ部	パッド部	
No. 30	30mm φ	10mm φ	120枚
No. 36	36mm φ	16mm φ	100枚

インジェクションパッド (ベージュタイプ)

品番	サイズ		1箱
	テープ部	パッド部	
No. 30A	30mm φ	10mm φ	120枚
No. 36A	36mm φ	16mm φ	100枚

用 途

- 静脈注射・採血・予防注射後の被覆保護
- 関節穿刺後の被覆保護

* 動脈留置針抜去後の止血には使用しないでください。

〈使用上の注意〉

- 本品の使用中に、貼付部位に感染又は皮膚障害(発疹・発赤、水泡、皮膚はく離、かゆみ等)と思われる症状が現れた場合は、使用を中止し、適切な治療を行ってください。
- 本品の使用中に、濡れたり汚れたりした場合、もしくは血液や滲出液などの漏れがみられた場合は、直ちに新しいものに貼りかえてください。
- 開封後は、直ちに使用してください。
- 使用後は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがしてください。

〈保管上の注意〉

- 水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温保存してください。