

ニチバン

# インジェクションパッド マイルド

INJECTION PAD MILD


ベージュ色



一般医療機器 救急絆創膏 医療機器届出番号 13B2X00218131270 JMDNコード 34864000

## 適度な圧迫、マイルドな貼り心地 しかも貼りやすく、はがしやすい 止血用パッド付創面保護材です。

マイルドで通気性に富んだポリプロピレン不織布基材に、肌にやさしいアクリル系粘着剤を塗布した取口付テープと吸収性に優れたセルロース系不織布のパッドを用いた止血用パッド付絆創膏（創面保護材）です。

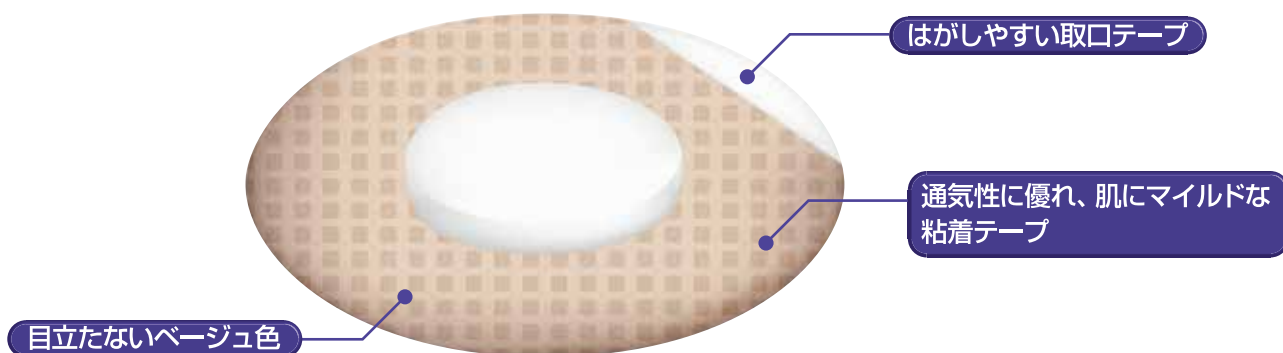

# ニチバン インジェクションパッド マイルド

INJECTION PAD MILD

ベージュ色



## 低刺激性

透湿性、柔軟性に優れた粘着テープの採用により、低刺激性を実現。皮膚の角質を保護し、はがす時の痛みも軽減しました。



## 衛生的に貼れて、はがしやすい

1枚ずつの滅菌包装で、パッド・粘着面に触れずに簡単に貼付できます。また、取口テープ付で、皮膚からも容易にはがすことができます。



## 適度な圧迫効果

パッドは、血液吸収性に優れたセルロース系積層不織布を採用。適度な圧迫効果を生み、穿刺部をやさしく保護します。


### 用途

- 静脈注射・採血・予防注射後の被覆保護
- 関節穿刺後の被覆保護


### 禁忌

- 再使用禁止


### 使用法

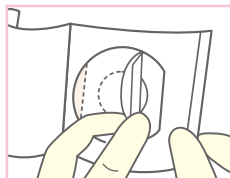


① 個包装を開け口より開封し、テープの端にあるはく離紙とテープを持ち、台紙からはがします。

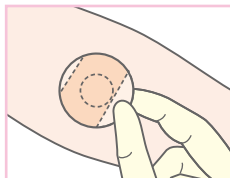

② 穿刺部にパッドをあて、テープ裏面にあるはく離紙をもったまま貼付してください。

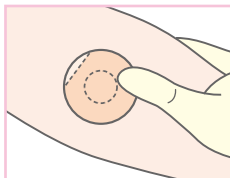


③ はく離紙をはがし、テープ全体をよく押さえ、貼付してください。

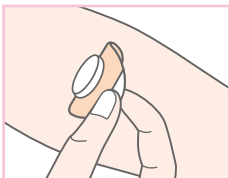

④ はがす際は取口テープをつまみ、皮膚からはがしてください。

### 構成

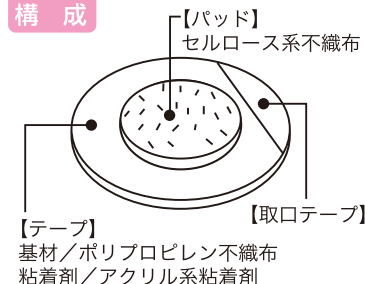

### 使用上の注意

- 本品の使用中に、創部に臨床的感染が起きた場合には、使用を中止し、適切な治療を行ってください。
- 本品の使用中に、皮膚障害(発疹・発赤、かゆみ等)と思われる症状が現れた場合には、使用を中止し、適切な治療を行ってください。
- 本品の使用中に、濡れたり汚れたりした場合、血液や滲出液などのにじみがみられた場合には、直ちに新しいものと貼りかえてください。
- 本品を使用時、包装に汚損、破損、水濡れなどがみられた場合には、使用しないでください。
- 本品は開封後、直ちに使用してください。
- 本品をはがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりとはがしてください。

### 保管上の注意

- 水濡れに注意し高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温で保存してください。

販売名 インジェクションパッドマイルド

### 規格

品番	サイズ		1箱	標準価格(税別)
	粘着部	パッド部		
No.30-N	30mmφ (取口部含む)	10mmφ	100枚	700円
No.36-N	36mmφ (取口部含む)	16mmφ	80枚	700円

# ニチバン インジェクションパッド

適度な圧迫、被覆保護  
ワンタッチで処置できる特殊パック  
1枚ずつの滅菌済み包装



医療機器届出番号 13B2X00218131100 一般医療機器 救急絆創膏

### 規格

	品番	サイズ		1箱	標準価格(税別)
		粘着部	パッド部		
白タイプ	No.30	30mmφ	10mmφ	120枚	700円
	No.36	36mmφ	16mmφ	100枚	700円
タペイブジュ	No.30-A	30mmφ	10mmφ	120枚	700円
	No.36-A	36mmφ	16mmφ	100枚	700円

お問い合わせ先  
ニチバン株式会社 お客様相談室 TEL03-5978-5622  
受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く)  
A4判の添付文書をご要望の際は、お客様相談室にご連絡ください。  
®は登録商標です。日本製