

カテリーパッドTMマイルド

CATHERIPADTM MILD

医家向品




医療機器届出番号 13B2X00218131260 医療用品(4)整形用品 一般医療機器 救急絆創膏 JMDNコード 34864000

**マイルドな貼り心地で縫合部や
創傷面をやさしく保護します。**

柔軟性・透湿性に優れたポリプロピレン不織布に、肌にやさしいアクリル粘着剤を塗布したドレッシング材です。パッドにはポリエチレンネット付のレーヨン・ポリエステル不織布を採用、縫合部や創傷面に固着しにくくなっています。

■規格

品番	サイズ		1箱
	粘着部	パッド部	
No.0508	50mm×80mm	25mm×50mm	50枚
No.0610	60mm×100mm	30mm×65mm	50枚
No.0812	80mm×120mm	40mm×80mm	25枚
No.1212	120mm×120mm	80mm×80mm	15枚
No.0915	90mm×150mm	50mm×100mm	20枚
No.0921	90mm×210mm	50mm×160mm	15枚
No.0927	90mm×270mm	50mm×210mm	10枚
No.0933	90mm×330mm	50mm×280mm	10枚

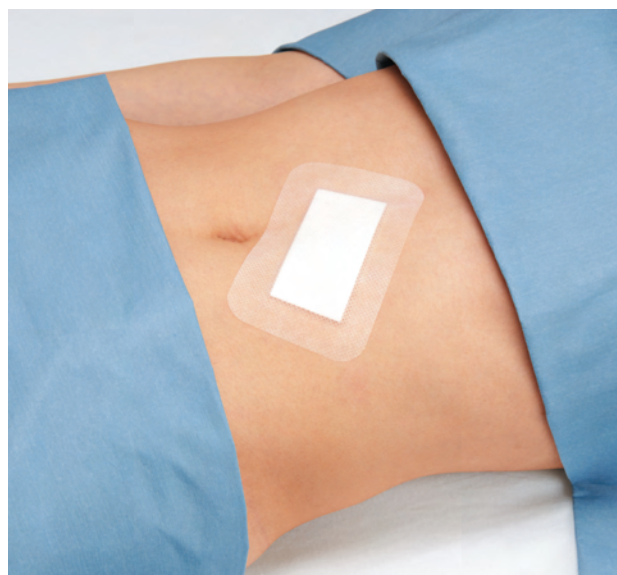

カテリーパッド マイルド

CATHERIPAD™ MILD

■ 特長

【低刺激性・高固定性テープ】


- しなやかで通気性に富むメッシュ基材とマイルドで高い透湿性を有するアクリル粘着剤を採用。低刺激性と高固定性を高い次元で両立、皮ふに良くなじみ、はがすときの痛みも軽減しました。

【高吸収性・非固着性パッド】

- パッドはガーゼ10枚分以上の優れた吸収力(同面積比)を持っています。表面をポリエチレンネットで覆った非固着性パッドで、患部をやさしく保護します。



(実寸大)

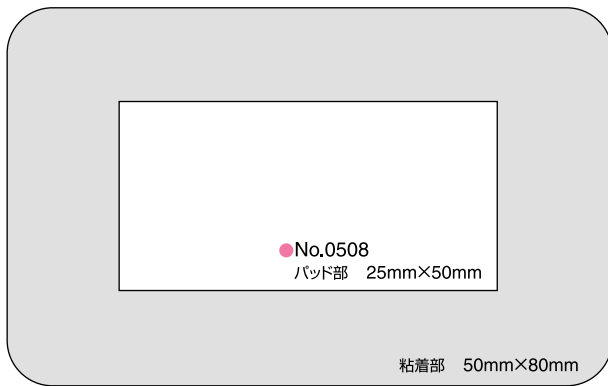


■ 用途

- 手術後縫合創の被覆保護
- 創傷面の被覆保護

構成

テープ: 基材 ポリプロピレン不織布
粘着剤 アクリル系粘着剤

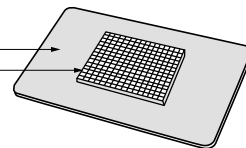

パッド: レーヨン・ポリエステル不織布
パッド表面は創傷面の固着防止性のある多孔ポリエチレンネット

■ 禁忌・禁止

- 再使用禁止

■ 使用上の注意

- 本品の使用中に、貼付部位に感染又は皮膚障害(発疹・発赤、水疱、皮膚剥離、かゆみ等)と思われる症状が現れた場合には、使用を中止し、適切な治療を行ってください。
- 本品の使用中に、濡れたり汚れたりした場合、血液や滲出液などのにじみがみられた場合は、直ちに新しいものと貼りかえてください。

- 本品は開封後、直ちに使用してください。

- 本品をはがす時は、皮ふを傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがしてください。

■ 保管上の注意

- 水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温保存してください。

TM: trademark

日本製
MADE IN JAPAN

ニチバン株式会社

〒112-8663 東京都文京区関口 2-3-3

ホームページ <https://www.nichiban.co.jp/>

SEN2163BGP