

オプサイト[◇] クイックガード

水蒸気透過性トランスペアレント ドレッシング

肌の弱い患者様にも優しくしっかり貼れる
フィルムドレッシング

NEW

オプサイト[◇] クイックガード NEW ボーダータイプ



不織布による高い固定力

衣服とのズレなどによるフィルム周囲からの剥がれを低減します。



肌になじむ薄さ

フィルムの厚さは15 μ mで肌になじみ違和感を感じることなく快適です。



部位を選ばない適度なサイズ

日本人の体格にフィットするサイズで、鎖骨下・頸部・鼠径部・前腕どの部位でも簡単に貼付可能です。



オプサイト[◇] クイックガード 標準タイプ

透明性があり、貼付する位置を見ながら貼れる上、操作性にも優れているため、簡単に貼付ができます。外部からの細菌の侵入を防ぎます。



貼り方 (ボーダータイプ)



「REMOVE FIRST」と書かれた裏紙をはがします。



ドレッシングの中心をカテーテル刺入部に合わせて貼付します。



残りの小さな裏紙をはがします。



緑の▶のついた保護フィルムをはがします。



カテーテルラインに沿ってドレッシングを密着させます。

はがし方

不織布部分は180°反転させてゆっくりとはがし、フィルム部分は貼付面とできるだけ平行に引っ張りながらはがします。



貼り方 (標準タイプ)



「REMOVE FIRST」と書かれた裏紙をはがします。



ドレッシングの中心をカテーテル刺入部に合わせて貼付します。



残りの小さな裏紙をはがします。



緑の▶のついたテープをはがすと保護フィルムも同時にはがれます。
※緑のテープは左右どちらからでもはがせます。



緑の▶のついた保護フィルムをはがします。



カテーテルラインに沿ってドレッシングを密着させます。

はがし方

フィルムの端を持ち、貼付面とできるだけ平行に引っ張りながらはがします。



オプサイト® クイックガード ボーダータイプ

製品番号	サイズ(cm)	枚/箱
66800783	8 X 10	50

オプサイト® クイックガード 標準タイプ

製品番号	サイズ(cm)	枚/箱
66800781	4 X 5	100
66800363	5 X 7.2	100
66800782	8 X 10	100
66800364	10 X 12.5	50

【使用目的又は効果】

裂傷・擦過傷等の軽微な創傷、縫合創等の被覆・保護、注射針・カテーテル等の穿刺部の固定及び被覆・保護、外科切開部位の隔離及び手術野の確保。

E O G滅菌済

一般医療機器 救急絆創膏 JMDNコード:34864000

(一般医療機器) カテーテル被覆・保護材 JMDNコード:70444000)

(一般医療機器) 単回使用汎用サージカルドレープ JMDNコード:35531000)

届出番号:13B1X10222WC0015

「使用方法」及び「使用上の注意」の詳細は添付文書をご参照ください。

製造販売元

スミス・アンド・ネフュー株式会社 ウンドマネジメント事業部

〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目4番1号 TEL.03-5403-8830

<http://www.smith-nephew.com/japan/>

®Trademark of Smith & Nephew.

© 2017 Smith & Nephew KK