


 smith&nephew

IV3000^o

Moisture Responsive
Catheter Dressing

IV3000 ドレッシング

高水蒸気透過性トランスペアレントドレッシング

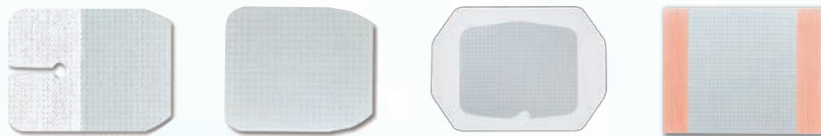


蒸れにくく、肌にやさしく、 しっかり固定

IV3000°を貼った部分の肌はさらさらの状態が保たれます。
これは、約14,000g/m²/day/37°Cという高い水蒸気透過性で、
発汗による水分を素早く外へ逃がすためです。
また、カテーテル等の固定から創傷保護まで幅広い用途に対応する、
製品バリエーションの広さも特長です。




高い水蒸気透過性を実現

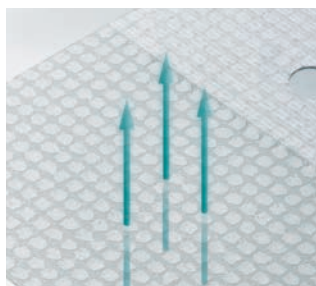

IV3000° ドレッシングは親水性に優れたポリウレタンフィルム (REACTIC テクノロジー) を採用。
REACTIC テクノロジーは、汗などの水分に触れると透過性が高まる特長があります。親水性が高いため、水分となじみやすく、フィルム面に接触する水分子量が多くなり、一度に多くの水蒸気を蒸散します。
これにより、ドレッシング下に水分が貯留しにくいいため浮きやズレが減り、安定した長期間固定が可能です。

REACTICテクノロジーは、通常のフィルム材の約20倍
約14,000g/m²/day/37°C*の高い水蒸気透過性を実現します。

*スミス・アンド・ニュー株式会社 社内データ

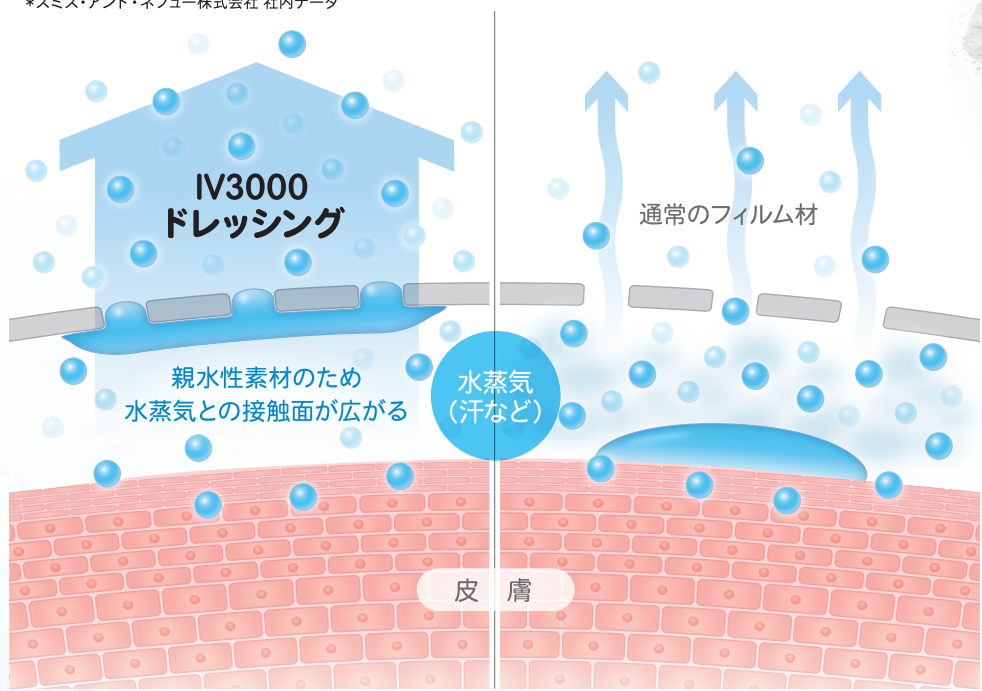



01

Point of product

蒸れにくい



使用する部位の形状や大きさなど用途に応じて豊富なラインアップの中からお選びいただけます。

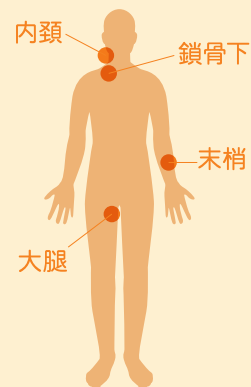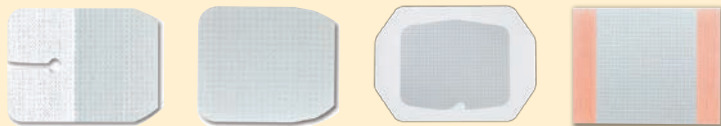

02

Point of product

高い固定力

優れた伸縮性により、しっかり固定

フィルムの優れた伸縮性により、はがれにくく、体の動きを妨げないので快適です。また、滅菌された固定テープと記録ラベルが付いています。確実に固定できるため安全です。




03

Point of product

肌にやさしい

皮膚への負担を軽減

粘着剤を格子状に塗布することにより、粘着剤を全体で25%カット。肌への負担を軽減しつつ、カテーテル等を確実に固定できます。この技術も高い水蒸気透過性の実現に寄与しています。

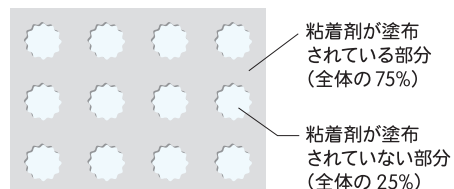

04


Point of product
経済性



安定した長期間固定が可能のため、ドレッシング交換回数が減り、看護負担の軽減と優れた経済性に貢献します。

05

Point of product
感染対策

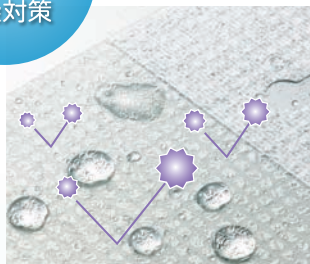

外部からのMRSA等の細菌や水の浸入を防止*するため、感染対策上も有効です。

*スミス・アンド・ネフュー株式会社
社内データ

06

Point of product
貼りやすい



片手でも操作できるので、カテーテル等を保持しながら貼付することができます。

不織布と切り込みでしっかり固定

ポータッド・タイプ

IV3000ドレッシング ポータッド・タイプ

不織布と切り込みの入った形状で、簡単にしっかりとカテーテルを固定できます。



01 不織布で補強


しっかりと固定できるように、ドレッシングに切れ込みを入れ、不織布で補強しました。

02 便利な固定テープ

固定力を高める固定テープを2本添付。滅菌済みなので、刺入部付近にも使用可能です。

03 ひと目でわかる記録ラベル

記録ラベルには貼付日時などが書き込み、ひと目で情報を把握することができます。

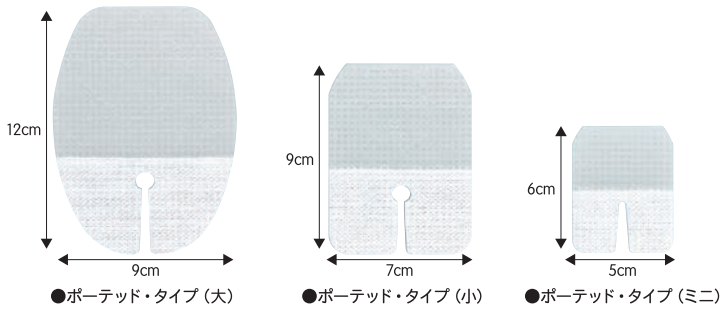


推奨される貼付部位一覧表

サイズ(cm)	内頸	大腿	鎖骨下	末梢	小児
ポータッド・タイプ(大)	●	●	●		
ポータッド・タイプ(小)	●	●	●	●	
ポータッド・タイプ(ミニ)				●	●




ポータッド・タイプ(ミニ)
小児や手背部位等には、ミニサイズで操作性に優れたポータッド・タイプ(ミニ)をご使用ください。



しっかりとカテーテルをはさみ込んで 確実な固定を実現します。

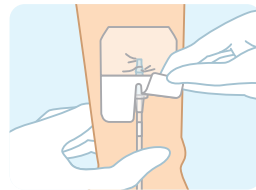

カテーテルルーメンの分岐部を中央の穴に合わせ、カテーテル刺入部がドレッシングの中心になるように貼付します。


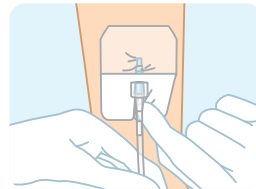


切り込みの入った不織布がしっかりとカテーテルをはさみ込み、確実に安定した長期固定を実現します。重ね合わせて貼付した不織布部分がクッションになり接続部の圧迫を軽減し患者様への負担を低減します。

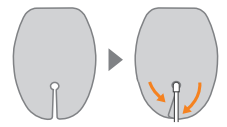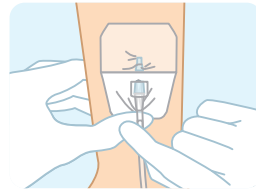

付属の固定テープを活用してより確実に 固定することが可能です。

下のようにテープを輸液ルートに巻きつけるように一周させると、テープの接触面積が広くなり、固定力が高まります。

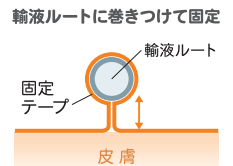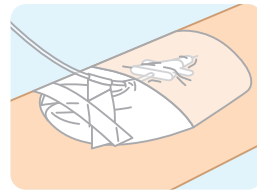

One point

トリプルルーメンなどのカテーテルもしっかりと固定できます。



片手でも簡単に貼れる

IV3000ドレッシング ワンハンド・タイプ

片手でも貼れるタイプなので、
ずれやすいカテーテルを支えながら固定できます。



01 片手で簡単に貼れる

片手での操作性に優れているので、空いた手で器具を支えながら簡単に貼ることができます。


02 便利な固定テープ

固定力を高める固定テープを2本添付。
滅菌済みなので、刺入部付近にも使用可能です。

03 ひと目でわかる記録ラベル

記録ラベルには貼付日時などが書き込み、ひと目で情報を把握することができます。

※ワンハンド・タイプ(ミニ)には、固定テープ、記録ラベルはありません。

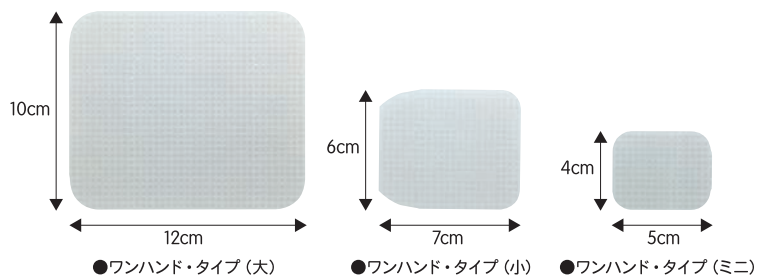


推奨される貼付部位一覧表

サイズ(cm)	内頸	大腿	鎖骨下	末梢	小児
ワンハンド・タイプ(大)	●	●	●		
ワンハンド・タイプ(小)	●	●	●	●	●
ワンハンド・タイプ(ミニ)				●	●




ワンハンド・タイプ(ミニ)
小児や手背部位等には、ミニサイズで操作性に優れたワンハンド・タイプ(ミニ)をご使用ください。


あらゆる主要なカテーテルタイプに
すばやく簡単に対応できます。

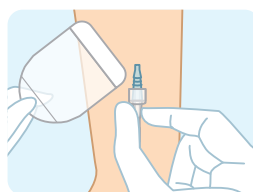


片手で簡単に操作できるので、空いた手でカテーテルを支えながら容易に貼付できます。

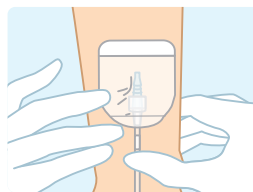

裏紙をはがし、カテーテル刺入部がドレッシングの中央部にくるように貼付します。

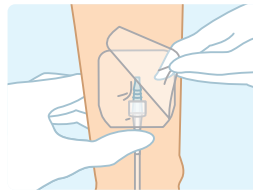

粘着性のないタブ部分を持ち上げ、背面に付いているキャリアーをはがします。

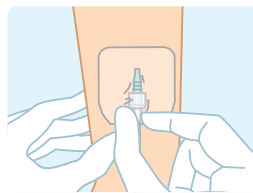

さらに、ドレッシングをカテーテルに沿って密着させます。必要に応じて固定テープでカテーテルを固定します。

One point

IV3000°ドレッシングは、滅菌処理が施されているので、縫合創・軽度の創傷等の被覆・保護にもお使いいただけます。



※写真提供: 獨協医科大学 形成外科


ウィンドウ付きだから貼りやすい

IV3000ドレッシング フレームデリバリー・タイプ

ウィンドウ部分から貼付位置が見えるのでカテーテルを正確に固定できます。


01 フレーム構造
持ちやすい紙枠部分と貼付位置が見える中央のウィンドウにより、正確に貼付可能です。

02 密着させやすい
キャリアがないので、カテーテル等にフィルムを容易に密着させることができます。

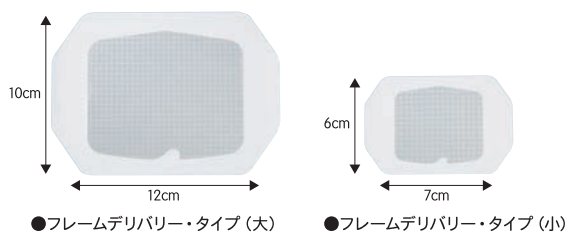

推奨される貼付部位一覧表

サイズ(cm)	内頸	大腿	鎖骨下	末梢	小児
フレームデリバリー・タイプ(大)	●	●	●		
フレームデリバリー・タイプ(小)	●	●	●	●	●

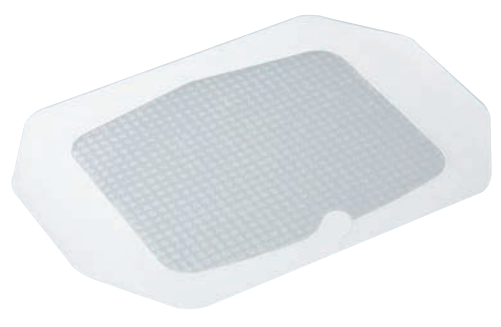

持ちやすい紙のフレームと、中央のウィンドウで、正確に貼付できます。




切り取って使用可能なテープ付

IV3000ドレッシング リジッドハンドル・タイプ

両端のオレンジ部分は必要に応じて、固定用のテープとして使えます。


01 切り取り可能なテープ付
ドレッシング両端のオレンジ部分は切り取り可能で、固定用テープとして使用できます。

02 密着させやすい
キャリアがないので、カテーテル等にフィルムを容易に密着させることができます。

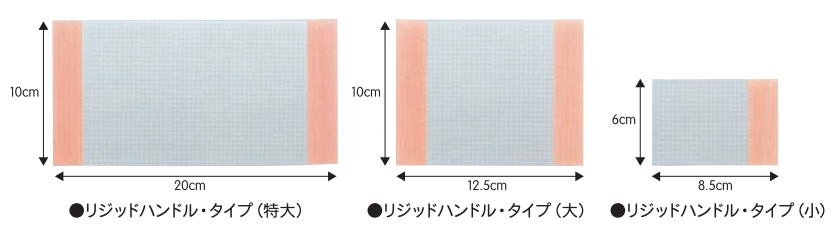


推奨される貼付部位一覧表

サイズ(cm)	内頸	大腿	鎖骨下	末梢	小児
リジッドハンドル・タイプ(特大)	●	●	●		
リジッドハンドル・タイプ(大)	●	●	●		
リジッドハンドル・タイプ(小)				●	●

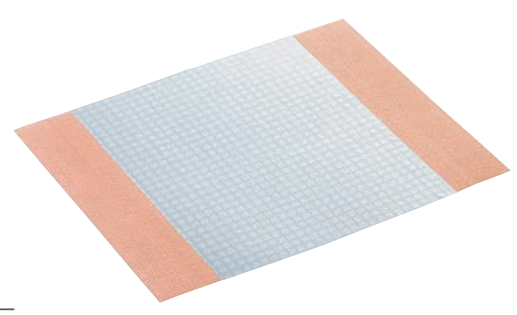


両端の伸びにくいオレンジのテープが、ドレッシングをしっかり固定します。

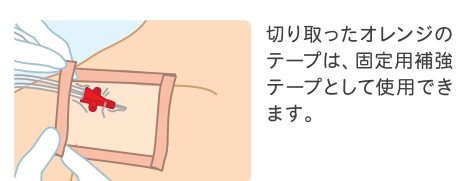

IV3000ドレッシング 使い方ガイド


— 応用編 —

皮下埋込み型ポートの固定方法例 脆弱な皮膚の方へおすすめします。

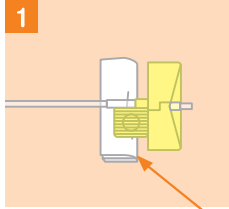


1 必要に応じて、皮膚との段差を埋めます（枕を作ります）。


メロリン®（非固着性吸収ドレッシング 5×5cm）を2つ折にして使用しています。

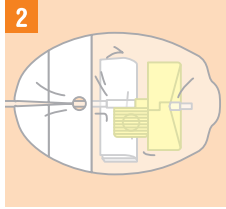


2 IV3000ドレッシングを貼付します。

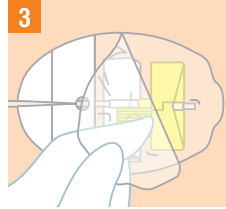

3 表面のキャリアーをはがします。

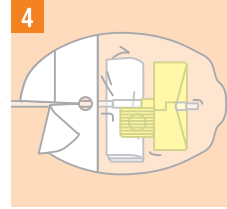


4 不織布部分の裏紙をはがし貼付します。

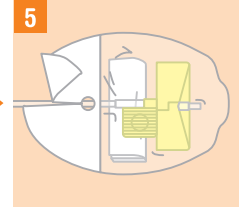


5 もう一方の不織布部分の裏紙をはがし貼付します。


片手での操作方法 片手が自由になることで、貼り方の幅が広がります。

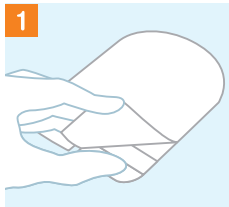


1 トレイなどにドレッシングを置き、順に裏紙をはがします。

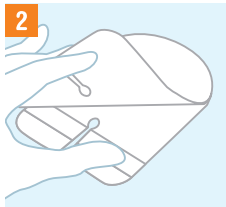

2 親指でドレッシングを固定すると、簡単に裏紙をはがせます。

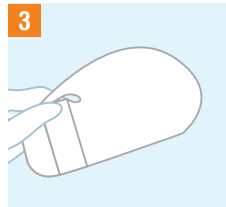


3 接着面を上にしたまま不織布の部分を山折するように持ちます。

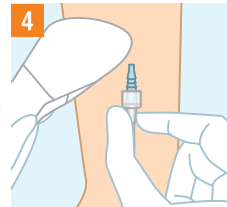


4 カテーテルを固定しながらドレッシングを持った手の平を返し、接着面を下にします。

狭い場所でも確実に固定できます

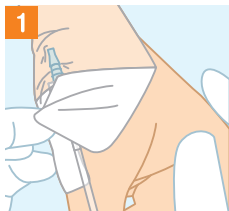


1 不織布部分の片方でルートを覆うように固定します。

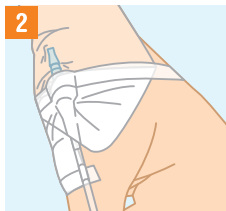


2 狭い場所でも確実に固定できます。

はがし方 コツを抑えると、スムーズにはがすことができます。

ポータッド・タイプ

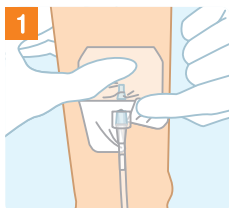


1 最初に不織布を反対側に折り返すようにゆっくりはがします。

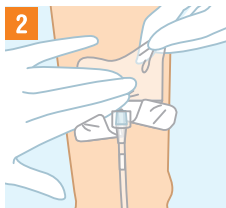


2 次にカテーテルを軽く押さえ、フィルム端をもって横へ引っ張りながらはがします。

ワンハンド・タイプ

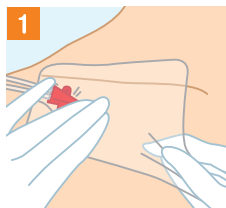

1 フィルムの端を少しはがして持ち、上に浮かせないように貼付面と平行に引っ張ります。

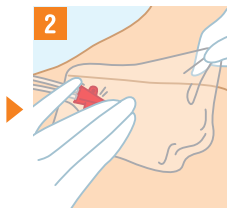

2 反対側からも同様に引っ張りながらはがします。

IV3000 ドレッシング 製品ラインアップ

不織布と切り込みでしっかり固定

IV3000ドレッシング ポーテッド・タイプ



製品名	製品番号	サイズ(cm)	枚/箱
IV3000ドレッシング ポーテッド・タイプ(大)	66004009	9×12	50
IV3000ドレッシング ポーテッド・タイプ(小)	4006	7×9	100
IV3000ドレッシング ポーテッド・タイプ(ミニ)	66004011	5×6	100

片手でも簡単に貼れる

IV3000ドレッシング ワンハンド・タイプ



製品名	製品番号	サイズ(cm)	枚/箱
IV3000ドレッシング ワンハンド・タイプ(大)	4008	10×12	50
IV3000ドレッシング ワンハンド・タイプ(小)	4007	6×7	100
IV3000ドレッシング ワンハンド・タイプ(ミニ)	4654	4×5	100

ウィンドウ付だから貼りやすい


IV3000ドレッシング フレームデリバリー・タイプ



製品名	製品番号	サイズ(cm)	枚/箱
IV3000ドレッシング フレームデリバリー・タイプ(大)	59410882	10×12	50
IV3000ドレッシング フレームデリバリー・タイプ(小)	59410082	6×7	100

切り取って使用可能なテープ付

IV3000ドレッシング リジッドハンドル・タイプ

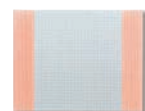

製品名	製品番号	サイズ(cm)	枚/箱
IV3000ドレッシング リジッドハンドル・タイプ(特大)	4649	10×20	50
IV3000ドレッシング リジッドハンドル・タイプ(大)	4973	10×14 ※	50
IV3000ドレッシング リジッドハンドル・タイプ(大)	4925	10×14 ※	10
IV3000ドレッシング リジッドハンドル・タイプ(小)	4924	6×8.5	100

※離れ紙部分を含む(製品サイズ10×12.5(cm))

〈使用目的又は効果〉

裂傷・擦過傷等の軽微な創傷、縫合創等の被覆・保護及び、
注射針、カテーテル等の穿刺部の固定及び被覆・保護。

一般医療機器 救急絆創膏 JMDNコード:34864000
一般医療機器 カテーテル被覆・保護材 JMDNコード:70444000
届出番号:13B1X10222WC0001
EOG滅菌済

「使用方法」及び「使用上の注意」の詳細は添付文書をご参照ください。



製造販売元

スミス・アンド・ネフュー株式会社 ウンドマネジメント事業部

〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目4番1号 TEL.03-5403-8830

札幌営業所 TEL.011-736-9596 FAX.011-736-9755
仙台営業所 TEL.022-276-6726 FAX.022-276-6652
東京営業所 TEL.03-5403-8915 FAX.03-5403-8916
名古屋営業所 TEL.052-221-1407 FAX.052-221-1420
大阪営業所 TEL.06-6399-3303 FAX.06-6399-3993
広島営業所 TEL.082-502-7322 FAX.082-502-7325
福岡営業所 TEL.092-452-0142 FAX.092-452-0146

<http://www.smith-nephew.com/japan/>

◇Trademark of Smith & Nephew.

© 2017 Smith & Nephew KK

販売店

