

# デュオアクティブ® *ET*

DuoACTIVE®  
Extra Thin

ハイドロコロイド創傷被覆材

## 浅い創傷の治癒を促進


湿潤環境を保つモイスト・ウンド・ヒーリングによって創傷治癒を優しくサポートします。

ハイドロコロイド創傷被覆材デュオアクティブ®ETは、創部の湿潤環境を維持するモイスト・ウンド・ヒーリングによって真皮に至る創傷の疼痛の緩和と治癒をすみやかに実現します<sup>1)2)</sup>。また、半透明なので貼付したまま創部を観察することが可能です。擦過創、Ⅱ度褥瘡、Ⅱ度熱傷など、浅い創傷への保険適用を受けさらに利用範囲が広がります。




### ■ モイスト・ウンド・ヒーリングによって、治癒を促進します。

防水性外層と皮膚粘着層をもつデュオアクティブ®ETは、創部に固着することなく湿潤環境を維持。創部の乾燥によって生じる痂皮の形成を防ぎます。このモイスト・ウンド・ヒーリングによって表皮細胞の遊走を促進し、治癒を促します<sup>1)</sup>。

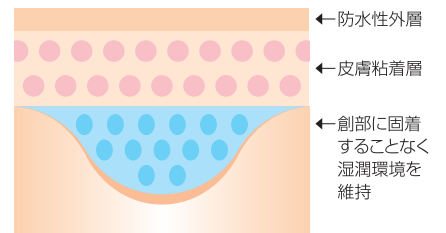

### ■ 浅い創傷に特有な、ヒリヒリとした疼痛を軽減します。

デュオアクティブ®ETは、優れた水分保持力をもつドレッシングで創部を閉鎖し、露出した神経末端が空気に曝されることを防ぎます。これによって、擦過創など、浅い創傷に特有なヒリヒリする疼痛を軽減します<sup>2)</sup>。

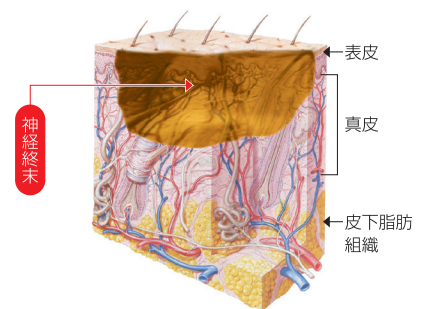

### ■ 半透明なので、貼付したまま創部が観察できます。

デュオアクティブ®ETは、半透明なので創部の状況などを貼付した上から容易に確認することができます。したがって、感染兆候など創部の異常をいち早く判断することができ、安心して使用できます。



慈泉会相澤病院外傷治療センター提供

## 使用目的、効能または効果

真皮までの創傷に対する「創の保護」「湿潤環境の維持」「治癒の促進」「疼痛の軽減」を目的とする。

## 使用方法

### 前処理

- ①創周囲の健常皮膚を清拭後、必要に応じて創部を消毒し、生理食塩液等で洗浄する(交換の場合も同様)。
- ②創部・患部周囲の健常皮膚を十分被覆できる大きさの本品を選ぶ(デュオアクティブ®ETスポットを除く)。

### 貼付方法

- ③本品の皮膚接触面に指が触れないように注意しながら剥離紙を取り除き、創部に直接貼付し密着させる。
- ④本品が剥がれるおそれのある場合は、補強のためにテープを本品の周りに貼って固定すること。

### 交換方法

- ⑤本品を皮膚から剥がす際には、本品の隅を注意深く持ち上げ、四隅が皮膚表面から完全に離れるまで、ゆっくりと剥がす。
- ⑥滲出液の漏れが起こる前、もしくは連続して7日間使用したとき、新しい本品と交換すること。ディスプレイ製品なので、本品が創部より剥がれた場合は、再貼付しないこと。

### 熱傷

慈泉会相澤病院  
外傷治療センター提供



受傷翌日



デュオアクティブ®ET貼付直後



21日目ほぼ上皮化

### 仙骨褥瘡Ⅱ度

佐々木研究所付属  
杏雲堂病院提供



貼付前



デュオアクティブ®ET貼付直後



貼付7日後

### 【警告】

明らかな臨床的創感染を有する患者には慎重に使用すること。  
[感染が悪化するおそれがある。臨床的創感染を有する患者であっても感染に対する薬剤治療や全身・局所管理をしながら創傷被覆材を併用することが有益と医師が判断する場合には、局所の観察を十分に行ない、慎重に使用すること。]

### 【禁忌・禁止】

再使用禁止  
本品の成分に対してアレルギーを有する患者には使用しないこと。

### 保険適用

皮膚欠損用創傷被覆材 真皮に至る創傷用  
適用期間:2週間を標準として特に必要と認められた場合については3週間を限度とする。  
保険請求:償還価格による。

医療機器承認番号 20700BZY00181000

医療用品(4) 整形用品

管理医療機器 局所管理ハイドロゲル創傷被覆保護材 JMDNコード:34082002

### 参考文献

- 1) Hinman CD, Maibach H. Effect of Air Exposure and Occlusion on Experimental Human Skin Wounds. *Nature*. 1963(4904):200:377-378.
- 2) Friedman SJ. Management of leg ulcer with hydrocolloid occlusive dressing. *Arch Dermatol*. 1984; 120(10):1329-1336.

### デュオアクティブ® **ET**

商品名	規格	包装	注文番号	保険償還単位/枚
デュオアクティブ®ET	7.5x7.5cm	20枚/箱	ET57520	56cm <sup>2</sup>
	10x10cm	10枚/箱	ET10101	100cm <sup>2</sup>
	15x15cm	10枚/箱	ET15151	225cm <sup>2</sup>
	5x10cm	20枚/箱	ET51020	50cm <sup>2</sup>
デュオアクティブ®ET スポット	5x20cm	10枚/箱	ET52010	100cm <sup>2</sup>
	3.8x4.4cm	20枚/箱	ETS20	16cm <sup>2</sup>

※ご使用前には添付文書を必ずお読みください。

©はConvaTec Inc.の登録商標です。© 2014 ConvaTec Inc.