


気管切開カニューレホルダー(万能タイプ)

柔らかいバンドでやさしく気管切開カニューレを固定します。

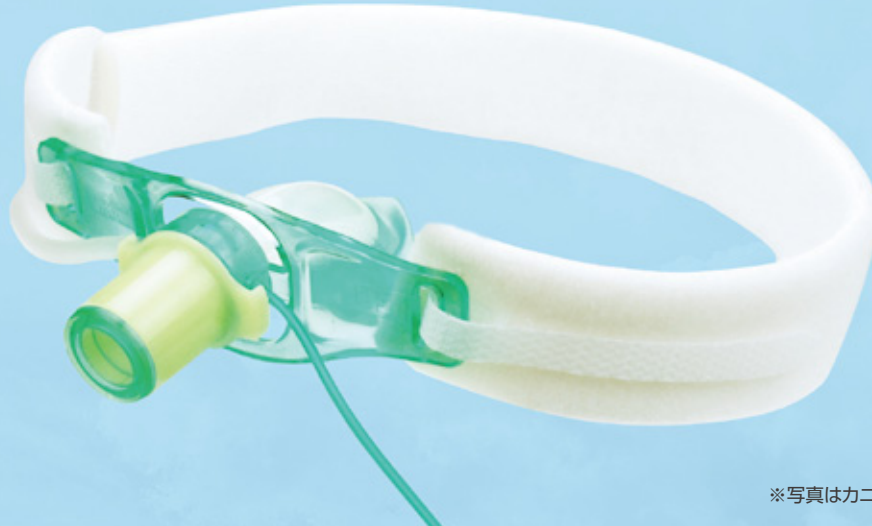

※写真はカニューレを装着した例です。

簡単調整

首の太さに応じて長さを簡単に調整できます。

しっかり固定

面ファスナーで簡単に固定ができ、引っ張っても簡単には外れません。

伸縮性バンド

一部伸縮性バンドを使用しているため、患者さんの状態に合わせて適度な固定ができます。

幅広く対応


ワンサイズでほぼすべての患者さんに対応します。

- 材 質：コットン
- 重 量：約5g(1個あたり)


注文コード	品 番	入 数	標準価格
N16-000-01	20.01.00	1箱(10個入)	¥8,000
N16-000-02	20.01.00	1個入	¥800




装着方法

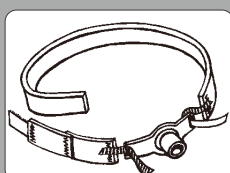


①ホルダー両端の細い面ファスナーをカニューレフランジ固定穴へ通します。

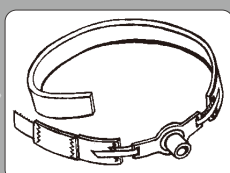

②通した面ファスナーを折り返し、ホルダーのバンド部へ固定します。

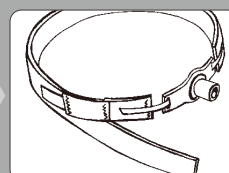

③伸縮性バンドの付いた面ファスナーの位置を変えて、長さを調整します。

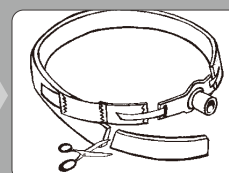

④余分なバンド部は、はさみで切ります。

気管内チューブホルダー(万能タイプ)

経口挿管用気管内チューブの固定に適しています。

粘着テープ 不使用

粘着テープで固定しないので、顔面に怪我をしている患者さんにも使用できます。

抜管の 心配なし

独特のネックバンドなので抜管の心配がありません。

幅広い サイズに対応

ワンサイズでほぼすべての患者さんに対応します。




※写真はチューブを装着した例です。


- 材 質：コットン ● 重 量：約15g
- サイズ：約690×25mm

注文コード	品 番	標準価格
N16-000-03	23.01.03	¥850

装着方法

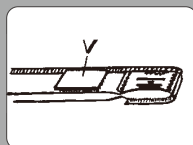


①面ファスナー(V字部分)をバンドから外します。

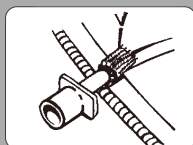

②V字部分の紙を剥がし、チューブに固定します。



③ホルダーを面ファスナー(V字部分)に固定します。

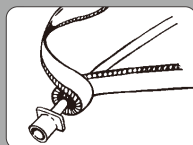

④ホルダーをチューブに巻き付けます。



⑤ホルダーを首に巻きます。ホルダー両端が交差するように巻き、面ファスナーで固定します。

※本カタログの表示価格は、メーカー希望小売価格で消費税は含んでおりません。
※印刷の都合上、質感や色が実際の商品と異なる場合があります。
※本カタログに掲載の仕様・形状・価格などは、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。

Muranaka
MEDICAL INSTRUMENTS Co., Ltd.

村中医療器 株式会社

<http://www.muranaka.co.jp/>

本 社 〒540-0036 大阪府大阪市中央区船越町 2-3-6 ☎ 06-6943-1221 (大代) FAX06-6947-5360
総合センター 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野 2-8-2 ☎ 0725-53-5541 (代) FAX0725-53-5641
東京支店 ☎ 03-3813-9211 (代) FAX03-3813-9217 札幌営業所 ☎ 011-737-9121 (代) FAX011-737-9122
仙台営業所 ☎ 022-274-7780 (代) FAX022-271-8448 埼玉営業所 ☎ 048-844-3500 (代) FAX048-844-3501
金沢営業所 ☎ 076-286-4531 (代) FAX076-286-0490 名古屋営業所 ☎ 052-709-7111 (代) FAX052-709-7116
村中船越ビル ☎ 06-6943-1431 (代) FAX06-6941-7121 米子営業所 ☎ 0859-33-6231 (代) FAX0859-33-7930
広島営業所 ☎ 082-532-1800 (代) FAX082-233-8818 福岡営業所 ☎ 092-473-0123 (代) FAX092-474-1363