


# イムノエース<sup>®</sup> RSV Neo

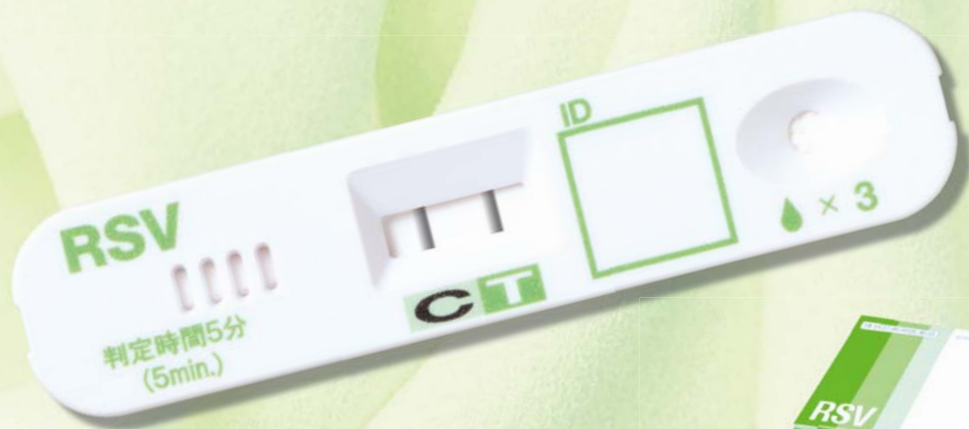

最終判定  
**5分**

●テストプレートの写真はRSウイルス抗原陽性例です。


**最終判定は5分**

陽性は3分から判定が可能

**判定ラインはブラックライン**

ナノテクノロジー「白金-金コロイド」採用

**ナイロン軸で植毛タイプの鼻腔用スワブを採用**

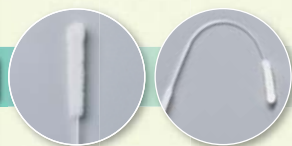


**2種類の検体が使用可能**

検体種：鼻腔ぬぐい液・鼻腔吸引液

**検体抽出液はイムノエース<sup>®</sup> Flu・アデノ・hMPVと共通使用が可能**

●検体抽出液の共通使用につきましては、各製品の添付文書に記載された使用方法に従ってください。

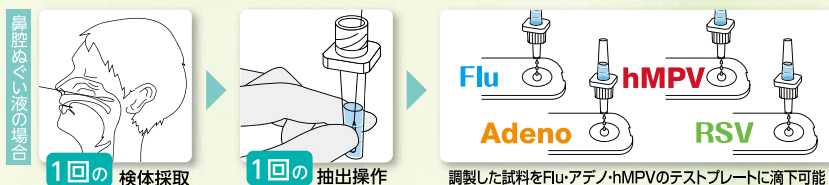



## 操作方法


### ●検体採取

鼻腔ぬぐい液で検査をする場合




キット付属のスワブで検体を採取します。

鼻腔吸引液で検査をする場合

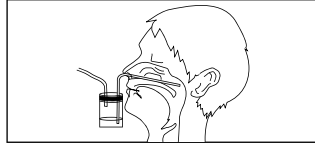


キット付属のスワブを浸します。  
(マイクロピペット等で採取する場合は、生理食塩水で2倍希釈し、200μLを採取します。)


### ●試料調製

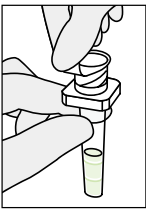

検体抽出液の容器のアルミシールを液が飛び散らないように剥がします。

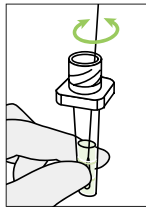


検体採取後のスワブを検体抽出液に浸し、容器の外側からスワブの頭部を軽くつまみ5回以上左右に回転させ、上下に動かし攪拌します。抽出後、容器の外側からスワブの頭部をつまみ、試料を絞り出すようにスワブを引き抜き、試料とします。  
(生理食塩水で2倍希釈した鼻腔吸引液を使用する場合は、200μLを検体抽出液に加えてよく混和し、試料とします。)

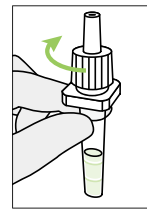

検体抽出液の容器の上端に付属のノズルを被せてしっかりと閉めます。

### ●試料滴下

検体抽出液の容器の中ほどをつまみ、テストプレートの試料滴下部に試料3滴を滴下します。

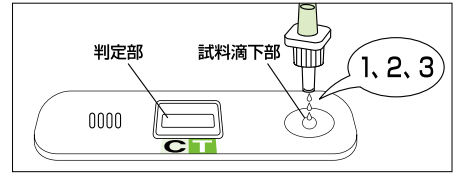

3~5分

5分

### ●判定



陽性



陰性

※吸引器は、キットに含まれておりません。

## 参考データ

### ●相関性試験成績 ※本製品添付文書から抜粋

鼻腔ぬぐい液	RT-PCR			
	陽性	陰性	合計	
	本品	68	0	68
	陽性	11	103	114
	陰性	79	103	182
	合計			

陽性一致率: 86.1%  
陰性一致率: 100.0%  
全体一致率: 94.0%

鼻腔ぬぐい液	対照品			
	陽性	陰性	合計	
	本品	62	6 <sup>注1)</sup>	68
	陽性	0	114	114
	陰性	62	120	182
	合計			

注1) RT-PCR法 6例全て陽性  
陽性一致率: 100.0%  
陰性一致率: 95.0%  
全体一致率: 96.7%

鼻腔吸引液	RT-PCR			
	陽性	陰性	合計	
	本品	69	0	69
	陽性	15	87	102
	陰性	84	87	171
	合計			

陽性一致率: 82.1%  
陰性一致率: 100.0%  
全体一致率: 91.2%

鼻腔吸引液	対照品			
	陽性	陰性	合計	
	本品	58	11 <sup>注2)</sup>	69
	陽性	1 <sup>注3)</sup>	101	102
	陰性	59	112	171
	合計			

注2) RT-PCR法 11例全て陽性  
注3) RT-PCR法 1例陽性  
陽性一致率: 98.3%  
陰性一致率: 90.2%  
全体一致率: 93.0%

## 製品概要

測定原理: 免疫クロマトグラフ法

使用目的: 鼻腔ぬぐい液又は鼻腔吸引液中のRSウイルス抗原の検出 (RSウイルス感染の診断の補助)

有効期間: 27ヶ月 (製造後)

貯蔵方法: 2℃~30℃で保存

保険点数: RSウイルス抗原定性138点、区分D012 21  
(入院中の患者・1歳未満の乳児・パリビズマブ製剤の適用となる患者のいずれかに該当する場合に適用する。)  
(令和2年4月1日より適用)

判定時間: 3分~5分

品名	イムノエース®RSV Neo 10テスト
カタログ番号	IARS0910
JANコード	4987815009106
包装単位	10テスト
希望小売価格 (税別)	12,000円

### テストプレート製品

イムノエース® Flu・イムノエース® アデノ・イムノエース® hMPVとの同時測定に有効

品名	イムノエース®RSV Neo テストプレート 10テスト
カタログ番号	IARS0930
JANコード	4987815009304
包装単位	10テスト
希望小売価格 (税別)	8,000円

- 本品はテストプレートのみで、検体抽出液、スワブ、ノズルは含まれておりません。
- 同時測定を実施する場合は、イムノエース® Flu、イムノエース® アデノ、イムノエース® hMPVの検体抽出液を使用します。



製造販売元

株式会社 **タウンズ**

〒410-2325 静岡県伊豆の国市神島761番1

[HP] <http://www.tauns.co.jp/>

お問い合わせ先

お客様専用フリーダイヤル

0120-048-489

受付時間/9:00~17:30 (月~金 祝日を除く)

販売店