

替刃ができる半錠カッター できる半錠カッター はんろうんこ II 錠剤を 2





ついに 分割錠に対応!! 精度UP





HC-002 (V) パイオレッ



バージョンUP 1 Ⅰ 分割錠にも対応



分割錠用 ブレードケース



分割錠用ブレードケースに交換することにより 分割錠を割線で分割します。



分割錠に対応 対応しておりません。



分割錠 PTPに対応



分割錠 バラに対応





∨溝に弾力を 持たせ精度UP



PTP包装のまま



錠剤を手で触れずにカット



替刃ができる





ブレードケース替刃 錠剤が砕けたり、くずが出る場合替刃をしてください。

プチはかぶかこI

応用編



バラ錠カット

PTP包装の中で錠剤が左右に動く場合は 錠剤を下に寄せた状態でカットしてください。



錠剤が下にある状態でカット



包装の中で動きやすい錠剤は 上部すき間をつぶしてカット



山折取り出し 錠剤に手を触れず スムーズに取り出せます。





替刃をしないと徐々に錠剤が上手く切れなくなったり、 砕ける場合があります。

替刃は、プチはんぶんこIIを購入された販売店で お買い求めください。

製品名	プチはんぶんこ Ⅱ
型番	HC-002 (O) (P) (V)
サイズ	W:108mm×D:34mm×H:33mm
材質	ベース・カバー(ABS樹脂)スライダー(POM樹脂) ブレードケース(PP樹脂)
付属品	分割錠用ブレードケース
定価	3,800円(税抜)

対応錠剤 約4mm~13mm

*錠剤の形状・材質により対応できないものもございます。