


レッグバッグの使用についてQ&A

Q1 コンビーン レッグバッグシリーズと採尿袋（ウロストミー用器具）やカテーテルなどは接続できますか？

一般的な膀胱留置用カテーテルや採尿袋と接続できます。

● **採尿袋**（ウロストミー用器具）

各社の採尿袋に付属している接続用コネクターを必ず使用して採尿袋と接続します。

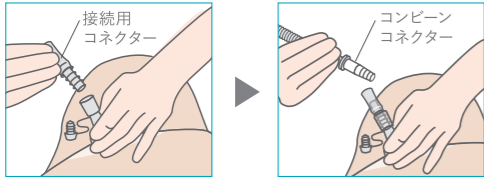


● **カテーテル**（医師の指示の下、行ってください）

カテーテルの排出口部分に、コンビーンコネクターをしっかり接続します。

● **コンドーム型収尿器**

収尿器の先端部分に、コンビーンコネクターをしっかり接続します。

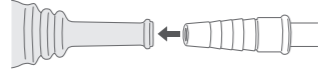

Q2 外部蓄尿袋の使用期間の目安はどの程度ですか？

使用期間の目安は**1週間程度**です。長期間の使用は製品の劣化による漏れや臭いなどの原因となります。

コンビーン 蓄尿袋シリーズ

製品名	容量 (ml)	チューブ長 (cm)	製品番号	包装単位	本体価格(税込)	付属品
コンビーン アクティブ レッグバッグ ※コンドーム型収尿器との接続専用です（日中単回使用となります）	250	7	25501	10枚/箱	¥7,370（¥737/枚）	
コンビーン セキュアー レッグバッグ350	350	50	51654	5枚/箱	¥3,575（¥715/枚）	コンビーン コネクター付 レッグバッグベルト1セット付
			5165	10枚/箱	¥6,600（¥660/枚）	
コンビーン セキュアー レッグバッグ750	750	50	51674	5枚/箱	¥3,575（¥715/枚）	コンビーン コネクター付 レッグバッグベルト1セット付
			5167	10枚/箱	¥6,600（¥660/枚）	
コンビーン レッグバッグ	600	45	5170	10枚/箱	¥7,700（¥770/枚）	コンビーン コネクター付 レッグバッグベルト1セット付
コンビーン ドレイナーズ バッグ	1,500	90	5062	10枚/箱	¥5,830（¥583/枚）	コンビーン コネクター付
コンビーン レッグバッグ ベルト	—	—	5050	1セット	¥715	
コンビーン コネクター	—	—	9803	10個/袋	¥1,100（¥110/個）	
アシュラ ウロコネクター	—	—	9804	3個/袋	¥198（¥66/個）	

コロプラスト ウロナイトバッグ


製品名	容量 (ml)	チューブ長 (cm)	製品番号	包装単位	本体価格(税込)	付属品
コロプラスト ウロナイトバッグ	2,000	120	21365	10枚/箱	¥6,820（¥682/枚）	専用ハンガー1個付

使用上の注意

- 尿の流れを確保するため、採尿袋やカテーテルとの高低差をつけてご使用ください。
- 本品はディスポーザブル製品です。洗浄、再使用はしないでください。
- 衛生上、1週間に1回程度、交換してください。
- トイレがつまる原因となりますので、使用後の製品は決してトイレには流さず、プラスチック製品に準じて廃棄してください。

Q3 排出口はどのように使用するのですか？

排出口はワンタッチ操作です。

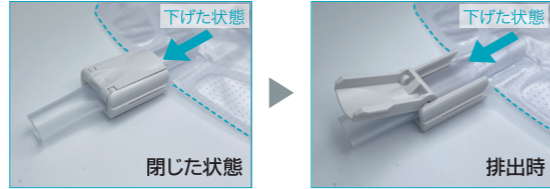

- レバーを開けるとき、爪でバッグに傷をつけないよう注意してください。
- バッグとレバーの間の摩擦を軽減させたい場合は、レバーを開いた状態でチューブに沿って下向きに移動させてください。バッグにこすれにくくなります。

大容量蓄尿袋 1,500ml

コンビーン ドレイナーズバッグ

コンビーン シリーズの中で最も大容量の蓄尿袋です。

材質：ポリ塩化ビニル (PVC)



コロプラストの採尿袋（センシュラミオ、センシュラ、アシュラ）との接続専用の大容量蓄尿袋

コロプラスト ウロナイトバッグ

- 容量：2,000ml
- ※排出口はコンビーン蓄尿袋シリーズと異なります。



※上記2製品は、レッグバッグとしての使用は推奨しておりません。

コンビーン レッグバッグシリーズ

毎日の生活をより活動的に、快適に過ごすために




コロプラスト株式会社 〒102-0074 東京都千代田区九段南2-1-30 イタリア文化会館ビル11F

www.coloplast.co.jp ☎0120-664-469

©2024-2 無断複写・転載を禁じます。

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. All rights reserved Coloplast A/S

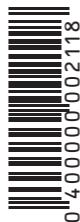

制作年月: 2024年2月 99211N

Conveen®

コンビーン レッグバッグシリーズで、 より活動的で快適なライフスタイルを。

脚用蓄尿袋

コンビーン セキュアー レッグバッグ

用途に合わせて選べる容量350mlと750ml

350ml: もっとも軽量、コンパクトなデザインで目立ちにくい

750ml: 大容量ながら、軽量かつスリムな形状

材質: ポリエチレン

目立ちにくい平面的な
デザイン、しかも軽量
かつコンパクト

装着時にも目立ちにくく、
軽量の材質で装着が快適です。

350mlは
内部に仕切りをつけ、
目立たないデザイン


袋内部に仕切りがあるので
尿が入った時にも膨らみを抑え
服の下で目立ちません。



※750mlには仕切りはありません。

ねじれに強く折れ曲がらないチューブ

尿の流れを妨げず、確実に排尿します。
また必要な長さにカットすることが可能なため、
チューブが邪魔になりません。
(じゃばらのない箇所でもカットしてください。)

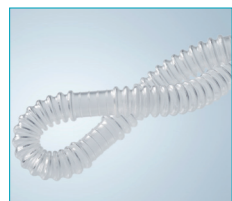

逆流防止弁内蔵

一度レッグバッグへ入った尿はチューブへ
逆流せず、大きく動いても安心です。

ワンタッチ操作の排出口

排出操作はレバーを上下するだけ。
簡単な操作で排出ができます。



コンビーンコネクター

各種製品との接続が可能です。
(接続例)
● 採尿袋 (ウロストミー用装具)
● 膀胱留置カテーテル*
● コンドーム型収尿器
※接続は医師の指示の下、行ってください

■その他のコンビーン セキュアー レッグバッグ、コンビーン レッグバッグ共通の特長

白や薄い色の服の下
でも目立ちにくい

小さな水玉デザインと半透明の素材で
白や薄い色の服を着た時でも目立ちません。

裏側に不織布を使用

装着時の肌触りがよく、カバーなどは必要
ありません。



脚用蓄尿袋

コンビーン レッグバッグ

膨らんでも脚にフィットし、レッグバッグ内の音も軽減
容量: 600ml

三層構造でぼちゃぼちゃ音を軽減

三層構造で尿がたまって均一に袋が膨らみ、脚への装着も快適です。
レッグバッグ内の音 (ぼちゃぼちゃ音) も軽減します。

材質: ポリ塩化ビニル(PVC)

三層構造

バッグ内が三層に仕切られているため、均一に膨らみ、
脚にフィットします。急な動きでも尿が片側に寄らず、
蓄尿袋内の音 (ぼちゃぼちゃ音) も軽減します。



カットできるチューブ

使用者の方に合わせ、最適な位置でカットすることが可能なため、
チューブが邪魔になりません。
※コンビーンレッグバッグのチューブはじゃばらではありません。



レッグバッグは、
脚に固定して使用するため、
快適、安心な日常生活を
実現します。

チューブなどによる
転倒を防止します

レッグバッグ装着時には
チューブが体に沿うため
妨げにらず転倒
などの危険を防止
します。



体動を妨げません

大腿や下腿に装着するため、
リハビリ時や日常生活に
おいて体の動きを
妨げません。



ウロストミーの方
採尿袋との併用

採尿袋の目立ちにくさを実現します
レッグバッグに尿をためるため、
お腹まわりが目立たず快適です。

長時間の使用時にも安心です
レッグバッグに尿をためることで
外出時や旅行、会議などで
長時間尿を排出できない場合にも
安心です。