



Disposable
Plastic Apron

クリーンエプロン



Disposable Plastic Apron



血液、体液などから医療従事者を守る
防水性タイプのP・P・E (Personal Protective Equipment) です。



外科製品

メディスポナーザブル
ディスポーザブル
プロダクト

商品特長

優れたバリア性

- ポリエチレン製で水分を通さないため、バリア性・耐薬品性に優れています。
- 袖付きタイプのため、湿性生体物質が飛び散る可能性のある処置や、疥癬患者との接触感染予防策に使用できます。
- 中央材料室での洗浄業務にも使用できます。

バリエーション

- 袖口の形状がゴム袖タイプと、フィンガーフックタイプ(FF)から選択できます。
- 身長に合わせて2サイズから選択が可能です。(FF除く)
- 規格ごとにパッケージを色分けしてあるため、一目でサイズが分かるようになっています。

使いやすいパッケージ

- 取り出し口が広く、取り出しやすいパッケージになっています。
- P・P・Eホルダーにぴったりと収まる10枚入です。

ゴミの少量化

- エプロンが入っていた個袋に使用済みエプロンを入れると、広がりを抑えられ、ゴミの少量化が図れます。

業務の省力化

- 少量包装のため、払い出しに最適で小分けする手間が省けます。
- ディスポーザブルのため、洗濯等の業務の省力化に役立ちます。



フィンガーフックタイプ




取り出しやすい!




※一部のP・P・Eホルダーには入らない場合があります。

商品情報

■ 着衣方法

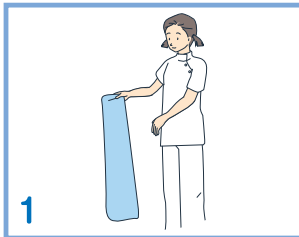


1 エプロンを箱から取り出し、広げます。エプロンの端を持つと簡単に広げることができます。

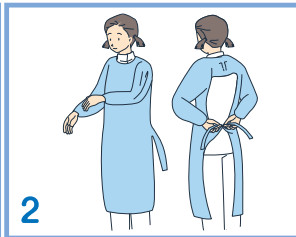


2 エプロンを装着し、腰紐を後ろで結びます。

■ 脱衣方法

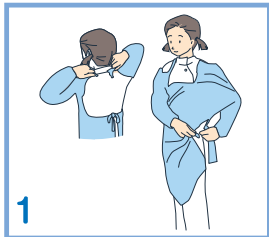

1 手袋を外し、首の後ろの切り込みを切ります。腰紐を解くか、腰紐の付け根を切ります。

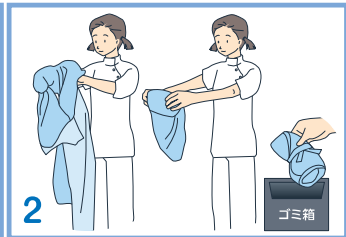

2 汚染面に触れないように、片腕ずつ引き抜きます。汚染面が内側になるように折りたたんだ後、中表になるように小さく丸めて廃棄します。

商品規格

■ クリーンエプロン袖付

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
73732	クリーンエプロン袖付 ふつうサイズ ブルー 10枚入 丈115cm×幅98cm×袖丈86cm	販売単位 238 × 90 × 115	631.2g	16箱	4971032737324
		外装 475 × 415 × 260	10.8kg		14971032737321
73731	クリーンエプロン袖付 大きめサイズ ブルー 10枚入 丈125cm×幅100cm×袖丈90cm	販売単位 238 × 90 × 115	688.4g	16箱	4971032737317
		外装 475 × 425 × 260	11.7kg		14971032737314
73739	クリーンエプロン袖付 FF フリーサイズ 1枚入(10袋) 丈115cm×幅98cm×袖丈86cm	販売単位 238 × 90 × 115	504.9g	16箱	4971032737393
		外装 475 × 415 × 260	8.7kg		14971032737390

◇ 商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市中区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

取扱店