

ニチバン  
**カテリープラス™ ロール**  
CATHEREEPLUS™ ROLL



## 肌にやさしいウレタンジェル粘着剤を採用した フィルムドレッシング ロールタイプ

### 特長

**プレリフト加工(キャリアフィルム)**

手袋をしたままでも取扱いが簡単です。

**防水性・バクテリアバリア性**

外部からの水や細菌の侵入を防ぎます。

**伸びのよいフィルム**


自然な貼り心地で、皮膚へのストレスを軽減します。

**優れたすべり性**


衣類・シーツとの摩擦が低減されます。

**はく離紙に1cm間隔の目盛り付き**

### 形状

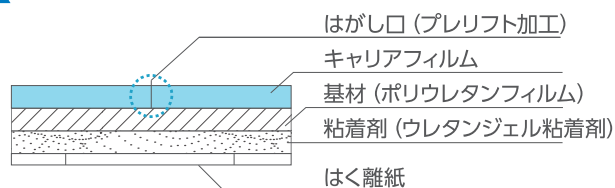

キャリアフィルムのはがし口にプレリフト加工を施しているため、キャリアフィルムを簡単にはがすことができます。

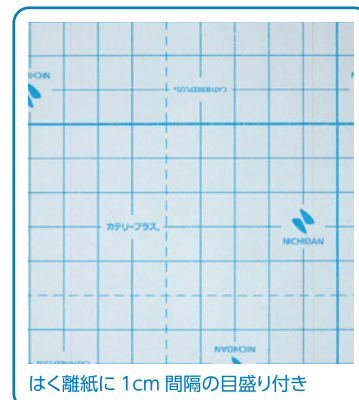

はく離紙に1cm間隔の目盛り付き

# カテリープラス™は「新しい固定」で 3つの思いやりをさらにプラス

カテリープラス™はウレタンジェル粘着剤がこれまでにない高い「透湿性」(当社比)を実現し、「皮膚へのやさしさ」と「はがれにくさ」を高いレベルで両立しました。

高透湿

高固定


低刺激

さらさら  
高透湿

ウレタンジェル粘着剤は、一般的なアクリル系粘着剤の約7倍の高い透湿性があります(当社比)。発汗等によるムレを抑え、長時間の貼付でも快適です。

透湿度とは、1㎡のフィルムを24時間で透過できる水蒸気の量です。透湿度が高いほど、皮膚はムレにくくなります。


## ■透湿度の比較 (社内データ・保証値ではありません)

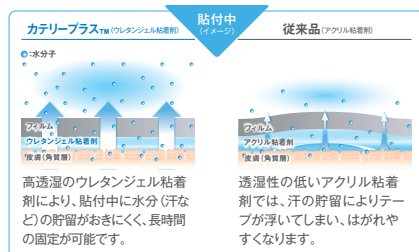

ぴったり  
高固定

ウレタンジェル粘着剤をフィルム全面にムラなくコーティングしているため、ジェル状粘着剤が皮膚の凹凸にしっかりと密着します。しなやかなフィルムが皮膚の動きに追従し長期間安定した固定力を実現します。


## ■密着イメージ図

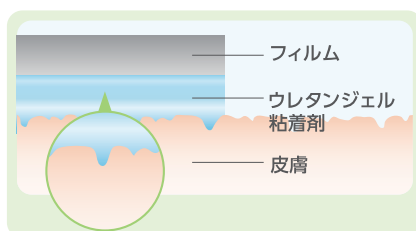

やさしい  
低刺激

しなやかに変形するウレタンジェル粘着剤が、はがす際の角質剥離・損傷を軽減します。伸びのよいフィルムにより、貼付中の皮膚へのストレスも緩和します。

## ■はく離角質細胞比較写真 藍に染まった細胞が角質細胞です。

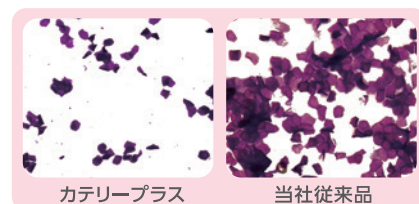

## 用途

- ガーゼ・ドレッシング材の被覆固定
- 皮膚被覆保護
- シャワー入浴時の装具保護

## 規格

品番	サイズ	1箱	JANコード
CPSR0510	50mm×10m	1巻	4987167060985
CPSR1010	100mm×10m	1巻	4987167060992
CPSR1510	150mm×10m	1巻	4987167061005

## 使用上の注意

- 未滅菌品ですので創傷部位や穿刺部に直接使用しないでください。
- 感染のある部位、出血している部位、滲出液のある部位、皮膚障害、皮膚代謝異常がみられる部位には使用しないでください。
- 本品は固定縫合の代わりとしては使用できません。
- 貼付前に皮膚をよく清拭し、清潔で乾いた状態にしてください。
- 皮膚かぶれやはがれの原因となりますので、引っ張って伸ばした状態で貼らないでください。
- 使用中、皮膚障害その他異常がみられた時は、使用を中止してください。
- 臨床的に感染を起こしたと判断される場合は使用を中止し、適切な治療を行い感染の問題が解決してから使用を再開してください。
- シャワー、入浴の際は必ず前もって、水が入らないよう全面に密着していることを確認してください。
- 使用後は皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがしてください。

## 貯蔵・保管方法

- 水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温で遮光保管してください。



## 規格 <ショートタイプ>

品番	サイズ	1箱	JANコード
CPSR1005	100mm×5m	1巻	4987167099473

カテリープラス™ロールの使いやすいショートタイプです

TMtrademark

ニチバン株式会社

〒112-8663 東京都文京区関口 2-3-3  
ホームページ <https://www.nichiban.co.jp/>

日本製  
MADE IN JAPAN