

管理医療機器 吸引用子宮カテーテル
医療機器認証番号：224ADBZX00080000

エンドサクション



適応

子宮内膜スクリーニング

特長

- 子宮内膜スクリーニングとして、簡便に使用でき、確実な組織採取ができます。
- 柔軟で挿入が容易です。屈曲した状態でも適度にフィットします。
また、安全性と正確性を考えたメモリ付です。
- 先端は『オープンエンド/クローズドエンド』の2タイプを用意。
お好みによりタイプをお選びください。

オープンエンドタイプ（サイドホール2ヶ）
クローズドエンドタイプ（サイドホール1ヶ）

参考文書


国立病院機構 長崎医療センター 産婦人科 安日 一郎先生
“エンドサクションによる子宮内膜組織サンプリング”
※資料については、最寄りの支店・営業所へお問い合わせください。



オープンエンドタイプ
(先端オープン、サイドホール：2ヶ)

クローズドエンドタイプ
(サイドホール：1ヶ)

材質
シース：ポリプロピレン
ピストンロッド：ABS樹脂

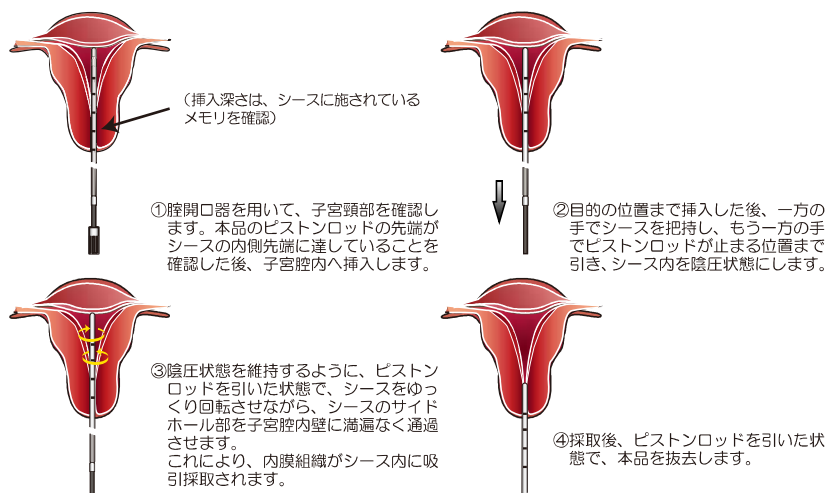

【組織の取り出し】

- 1) オープンエンドタイプ
ピストンロッドを押し、シース内の組織を押し出します。
- 2) クローズドエンドタイプ
シースの先端を滅菌されたハサミで切断した後、ピストンロッドを押し、シース内の組織を押し出します。

仕様

製品コード (JANコード)	規格
22611010 (4526737224053)	オープンエンドタイプ 2.5×3.0×250mm
22611020 (4526737224060)	クローズドエンドタイプ 2.5×3.0×250mm
包装形態 1箱10本入、1本毎ピールオープン包装、EOG滅菌済	

・本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容を必ずご確認ください。

販売窓口

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目42-6 南江堂ビル TEL (03)5804-8500
ホームページ <https://www.hakko-medical.co.jp/>

札幌 (011)215-1530 横浜 (045)954-2111 名古屋 (052)914-8500 福岡 (092)411-4100
仙台 (022)257-8502 長野 (026)276-3083 大阪 (06)6453-9102 熊本 (096)288-4690
柏 (04)7131-8580 金沢 (076)225-8560 岡山 (086)243-3985 本郷商品管理センター
本郷 (03)5804-8500 静岡 (054)282-4185 松山 (089)935-8517 (03)5840-8502

製造販売

株式会社 八光
メディカル事業部

hakko

〒389-0806 長野県千曲市大字磯部1490番地

2

画像診断 I 「生検・造影」

2202(A)