



医療現場で、さらに使いやすく! ハリクイ® オプション



台座

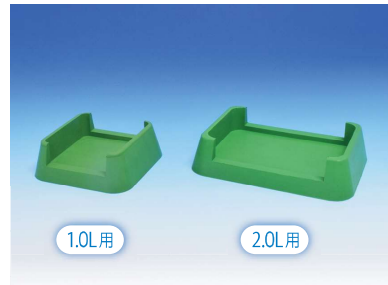


ハリクイを安定させ、より安全に針を廃棄できます。持ち運びの際も、倒れる心配がありません。

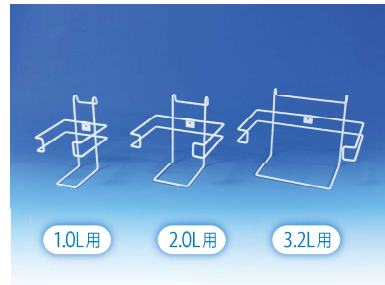

ワイヤーフックホルダー



ベッドサイドにスペースがない場合でも掛けて使用でき、持ち運びを楽にします。フック部分を手に持って持ち運ぶことも可能です。

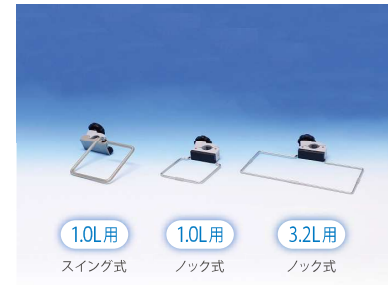

ブラケットホルダー



ハリクイを置くスペースがない場合でもカートや点滴の支柱に固定して使用できます。道具がなくても簡単に付け外しが可能です。

ハリクイ® 規格



品番	品名・規格	ケース入数	JANコード
004-49158	ハリクイ® 1.0L (針捨てボックス)	50コ	4971089491583
004-42267	ハリクイ® 2.0L (針捨てボックス) N	40コ	4971089422679
004-49159	ハリクイ® 3.2L (針捨てボックス)	30コ	4971089491590
004-41505	ハリクイ® 1.0L 台座	—	4971089415053
004-42245	ハリクイ® 2.0L 台座	—	4971089422457
004-49144	ハリクイ® 1.0L ワイヤーフックホルダー	—	4971089491446
004-49176	ハリクイ® 2.0L ワイヤーフックホルダー	—	4971089491767
004-49147	ハリクイ® 3.2L ワイヤーフックホルダー	—	4971089491477
136-HB25100A	ハリクイ® 1.0L ブラケットホルダー 25mm円柱用 スイング式	—	—
136-HB25-5	ハリクイ® 1.0L ブラケットホルダー2 25mm円柱用 ノック式	—	—
136-3	ハリクイ® 3.2L ブラケットホルダー2 25mm円柱用 ノック式	—	—

- 製品仕様及びデザインは、改良などのため予告なく変更することがあります。
- 変更により、本カタログ掲載の写真と実際の商品が異なる場合がありますので、予めご了承ください。
- 本カタログデザインの内容は2020年6月現在のものです。

製造販売元:

イワツキ株式会社

本社: 東京都板橋区志村 1-32-18

TEL 03-3966-8371 (代表)

営業所: 仙台・新潟・日本橋・相模原・金沢

<https://www.iwatsuki.co.jp>

製品及びご注文に関するお問い合わせは、弊社担当営業もしくは上記までお願いいたします。

イワツキSHOP
(オンラインショップ)

<https://www.iwatsukishop.jp>




21.05.1A

針捨てボックス

ハリクイ®

Sharps Quick

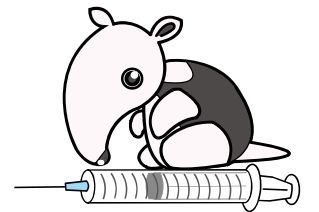

針捨てを簡単・安全に。ペン型注入器用注射針にも対応。



医療現場では鋭利器材廃棄容器や安全装置付器材の導入が進み、リキャップ禁止が浸透してきています。しかし院内清掃業者を含む医療施設で働く全ての方による針刺し切創は、いまだに重要な課題です。ハリクイ®は、コンパクトで使いやすい針捨てボックスです。さまざまな針が廃棄でき、ペン型注入器用注射針にも対応。業務効率化を図るとともに、針刺し切創の防止に貢献します。




やさしい目で健康を見つめる…
イワツキ®

針刺し予防、感染防止、作業効率化… 針捨てのお悩みは、ハリクイ®で解決。

特長
01

さまざまな針が廃棄できる

- 1つの容器でルアースリップタイプ、ルアーロックタイプ、ペン型注入器用注射針などの廃棄が可能。
- 2.0Lと3.2Lはシリンジごと廃棄できる横長形状。注射器の向きを一定に廃棄できるため、容器内の無駄なスペースがなくなります。

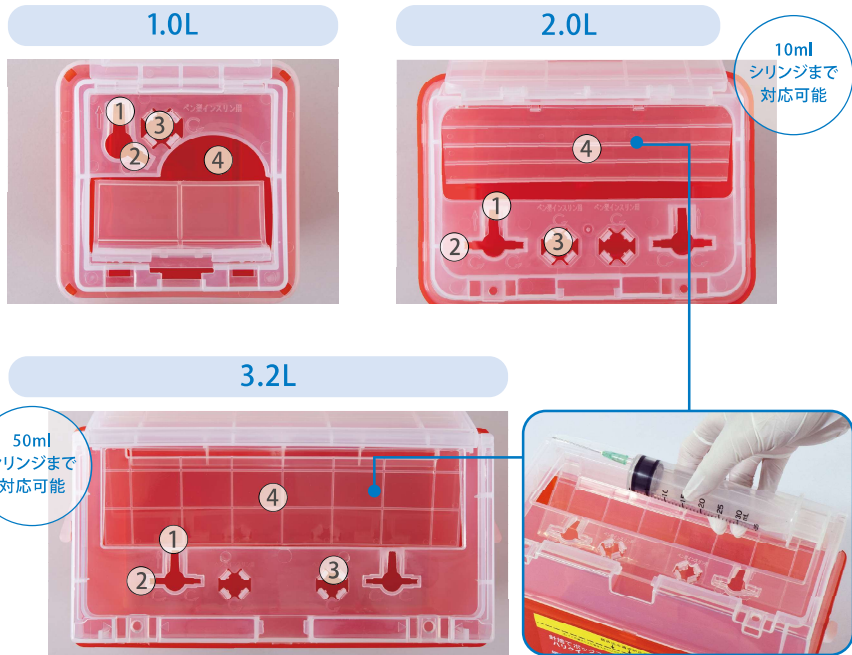

- ① ルアースリップタイプ注射針
- ② ルアーロックタイプ注射針
- ③ ペン型注入器用注射針（インスリン等注入器）
- ④ その他注入器（翼状針、留置針、採血針etc.）

シリンジごと廃棄できます

ペン型注入器用
注射針に
触れる事なく
廃棄可能

片手で簡単に
閉められます

スロープ付で
転倒しても
中身が飛散
しにくい

半透明


使い方動画
はコチラ



特長
02

保管・容器廃棄時の安全対策

- フタは片手で簡単に閉められます。
- 最終封は一度差し込んだら外れない構造になっているため、容器廃棄時に針が飛び出す心配がありません。

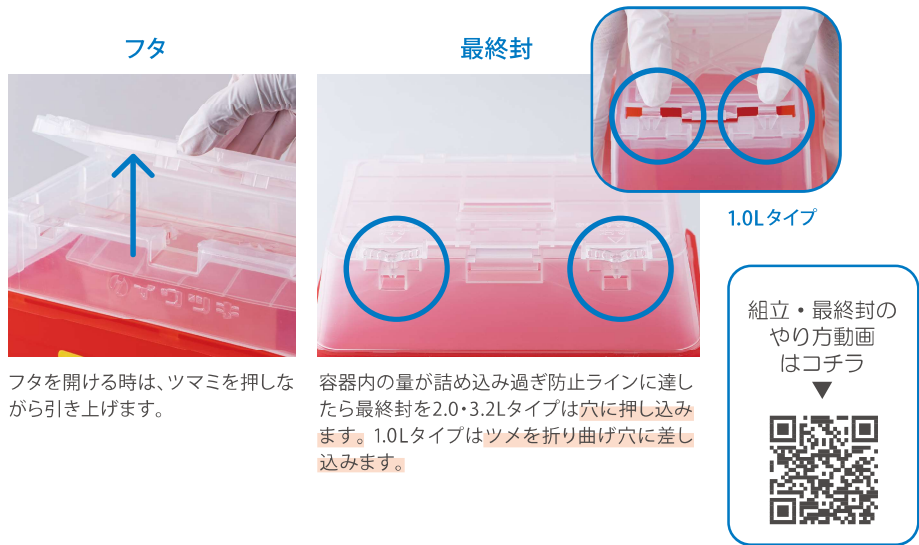

フタを開ける時は、ツマミを押しながら引き上げます。

容器内の量が詰め込み過ぎ防止ラインに達したら最終封を2.0・3.2Lタイプは穴に押し込みます。1.0Lタイプはツメを折り曲げ穴に差し込みます。

特長
03

血液曝露防止対策


その他の針を捨てる大きな廃棄口には、スロープが付いており、針廃棄時の血液の跳ね返りや、転倒時の針の落下による血液曝露を防止します。



特長
04

詰め込み防止対策

- 容器が半透明のため、廃棄量を目視確認することができます。（1.0L、3.2L）
- 詰め込み過ぎ防止ライン付きのラベルで、外側からも廃棄容量が確認できます。

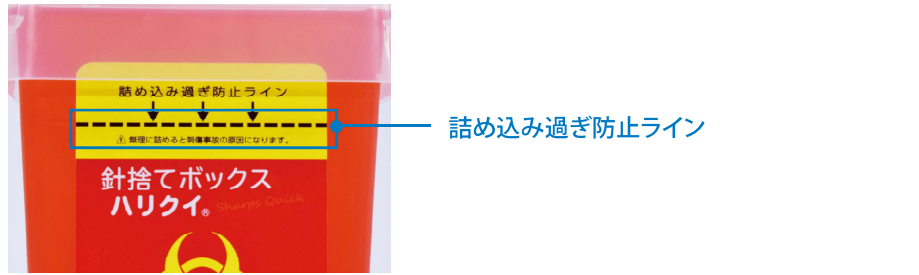

廃棄の仕方

ルアースリップタイプ



シリンジ先端部を根元まで挿入し、手前から奥へスライドさせると針が外れて容器内に収納されます。

ルアーロックタイプ



ハブを挿入し、シリンジを左に回します。針が外れたら中央の廃棄口に落とし、容器内に収納します。

ペン型注入器用注射針

① 注入器を針が固定されるまで挿し込み左に回して注入器を外します。



② 注入器を外すと注射針が残った状態となります。



③ フタを閉めると凸部が針を容器内に落とします。
※針が落ちない場合は、フタの上から強く押してください。

