

ニチバン

カテリープラスTMパッド

CATHEREEPLUSTM PAD




高透湿性フィルムドレッシングの
カテリープラスTMに
高吸収性パッドをつけてやさしく保護。



形状

創傷面に固着しにくい
高吸収性パッド

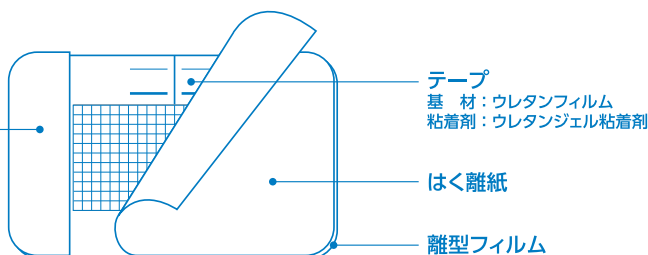

パッド付防水性ドレッシング

カテリープラスTMパッド

3つの思いやりに パッドをプラス



新開発ウレタンジェル粘着剤採用

新開発のウレタンジェル粘着剤がこれまでにない「透湿性」を実現し、「皮膚へのやさしさ」と「はがれにくさ」を高いレベルで実現します。

パッド・粘着面に触れず衛生的に貼付


はく離紙の一部を持って、パッドや粘着部に触れることなく皮膚に貼付でき、衛生的です。また、離型フィルムも簡単にはがせます。

高吸収性のパッド


パッドはガーゼ10枚分以上のすぐれた吸収力(同面積比)をもちます。

創傷面に固着しにくいパッド


表面を多孔ポリエチレンフィルムで覆った非固着性パッドで、患部をやさしく保護します。

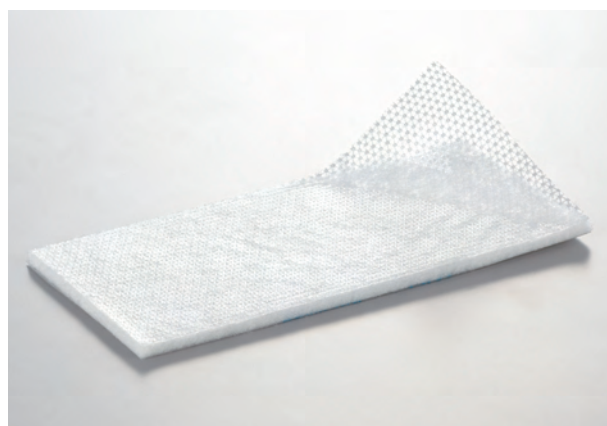


使用方法

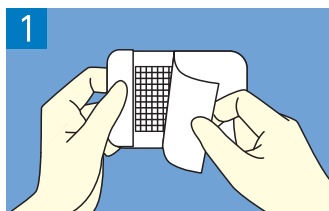


大きい方ははく離紙をゆっくりはがす。

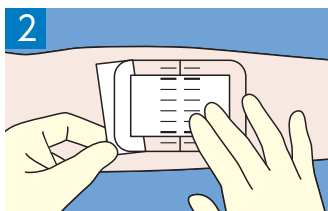

創部にパッドを当てて、残りのはく離紙をはがし、周りのテープで固定する。

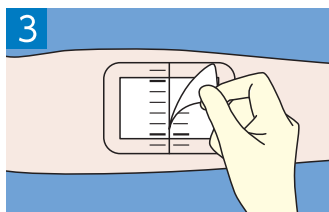

粘着面をしっかり貼った後、離型フィルムをゆっくりはがす。

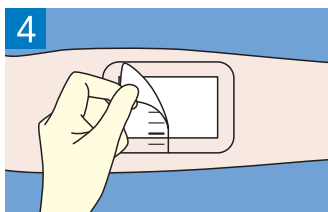

残った離型フィルムをゆっくりはがし、ならすように皮膚に密着させる。

※カテーテル固定に使用する場合は、必要に応じてサージカルテープ等でカテーテルをしっかり固定してください。

A4判の添付文書をご要望の際は、お客様相談室にご連絡ください。

TMは商標です。日本製

使用目的、効能又は効果

1. 救急絆創膏用途
傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。
2. カテーテル固定用途
注射針又はカテーテル刺入部位に直接貼付してその固定に用いる。

規格

品番	サイズ		1箱	標準価格 (税別)
	粘着部	パッド部		
CPSP0508	50mm×80mm	25mm×50mm	50枚	7,800円
CPSP0610	60mm×100mm	30mm×65mm	50枚	11,300円
CPSP0812	80mm×120mm	40mm×80mm	25枚	8,300円
CPSP0915	90mm×150mm	50mm×100mm	20枚	8,500円
CPSP0921	90mm×210mm	50mm×160mm	15枚	7,900円

販売名：カテリープラスパッド
 一般医療機器：救急絆創膏（カテーテル被覆・保護材）
 医療機器届出番号：13B2X00218211201
 製造販売元・発売元：【ニチバン株式会社】〒112-8663 東京都文京区関口2-3-3
 お客様相談室：【TEL】03-5978-5622【ホームページ】<http://www.nichiban.co.jp/>
 受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00（土・日・祝日を除く）
 製造元：ニチバンメディカル株式会社

FOR BETTER BEING
いつも笑顔でいたいから——ニチバン

ニチバン株式会社

〒112-8663 東京都文京区関口 2-3-3
ホームページ <http://www.nichiban.co.jp/>