

オプサイト® ジェントルロール

smith&nephew

OPSITE
FLEXIFIX GENTLE

Transparent Silicone Adhesive Film Roll

シリコーン粘着剤を採用したロールフィルムです。
肌へのやさしさを追求したまさに「ジェントル」な使い心地。




シリコーン粘着剤を採用




シリコーン粘着剤がやさしく皮膚に密着するので、ドレッシング交換時の剥離刺激による疼痛やスキントラブルを軽減します。

いますぐ取り組めるペインコントロール(剥離刺激の緩和)です。

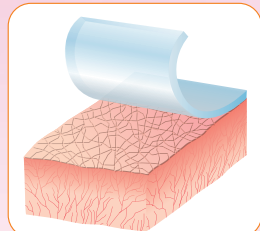


シリコーン粘着剤により剥離時のズレ・摩擦の負担をさらに軽減します

イメージ図

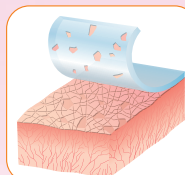


肌に優しい一般的な粘着剤剥離時のイメージ図

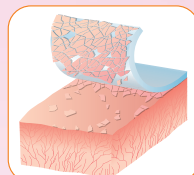

従来のアクリル系粘着剤剥離時に角質が損傷した表皮イメージ

従来のアクリル系粘着剤に比べ角質剥離が少ない。

データ提供: さっぽろキズケア・アンチエイジング研究所 所長 小浦場祥夫先生

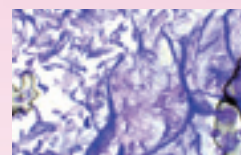

従来のアクリル系粘着剤



シリコーン粘着剤

高い密着性

シリコーン粘着剤が薄く柔らかいため、めくれにくく、屈曲部にも密着します。

貼り直しが可能

観察のために一時的にめくったり、フィルムの貼り直しができます。

糊残りがなく、きれいに剥離

医療材料のシリコーン製器具にも粘着します。

また糊が残ることなくフィルム材等からもきれいに剥がせます。

透明性

透明フィルムを通して、周囲皮膚の状況等を観察できます。

低摩擦フィルム

表面の摩擦係数が小さく、ズレによる皮膚への負担を軽減します。


防水性・バクテリアバリアー

外部からの水や排泄物、細菌の侵入などを防ぎます。


3種類のサイズ

2.5cm、5cm、10cmのロール幅。用途にあわせて選べます。


貼り方

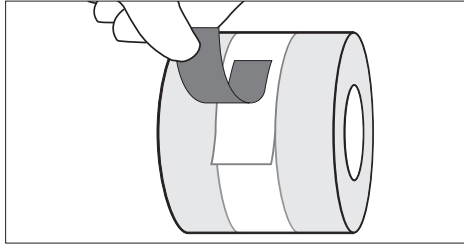

① 青いテープをとり、箱に戻します。

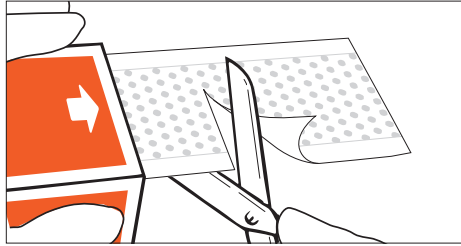


② 箱の矢印部分から適当な長さを引きだし、はさみで切ります。

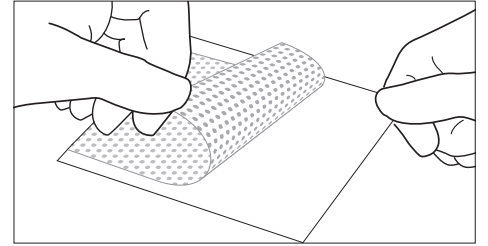


③ 離けい紙をはがしながら、皮膚やドレッシング材の上から貼付します。

使用例


皮膚が脆弱な方のケアに 皮膚が脆弱または敏感な方、同じ部位に継続してフィルムを使用する方に適しています。

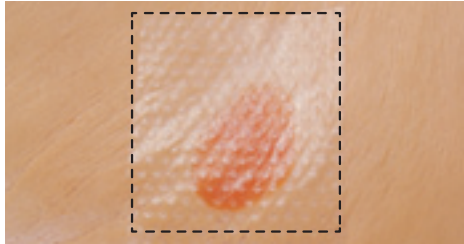

創治癒後の保護（創には使用しないで下さい）

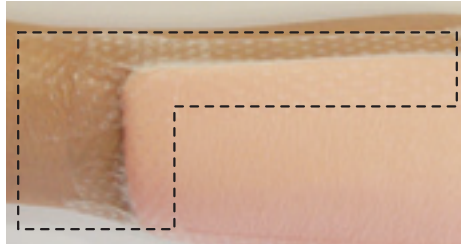

ドレッシング材やガーゼの固定

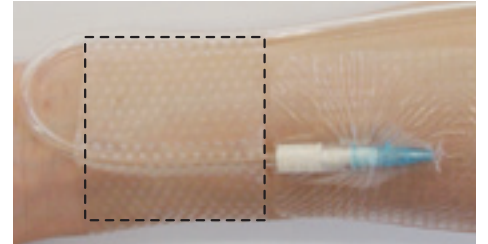

ルートやチューブ類の固定の補助

- 【用途】 ●保護目的(摩擦や外部汚染からの保護等、ストーマ周囲皮膚の保護等)
●固定目的(創傷ドレッシング、ガーゼ、チューブ・カテーテル、その他 器具等)
●シャワー等防水目的(ドレッシング材、ストーマ装具、その他 器具等)



製品番号	サイズ	巻/箱
66801195	2.5cm × 5m	1
66801196	5cm × 5m	1
66801197	10cm × 5m	1


<使用上の注意>

オプサイト ジェントルロールは未滅菌ですので、カテーテル刺入部や創傷部に直接貼付しないでください。使用される際は、皮膚を充分脱脂・乾燥させてください。

シリコン粘着剤を使用していますが、皮膚トラブルを起こしやすい方は事前に医師にご相談ください。

創傷管理において“一人ひとりの暮らし”を優先したハイドロサイト[®]ライフ

在宅での創傷管理に適した5層構造

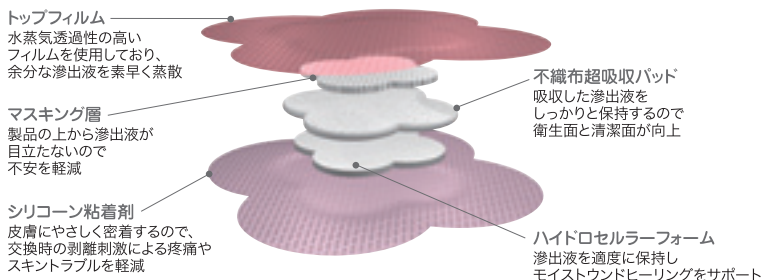

しっかり吸収 (シリコンゲル粘着剤)

ハイドロサイト[®]ライフ



製造販売元

スミス・アンド・ネフュー株式会社 ウンドマネジメント事業部

〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目4番1号 TEL.03-5403-8830

札幌営業所 TEL.011-736-9596 FAX.011-736-9755

仙台営業所 TEL.022-276-6726 FAX.022-276-6652

東京営業所 TEL.03-5403-8915 FAX.03-5403-8916

名古屋営業所 TEL.052-221-1407 FAX.052-221-1420

大阪営業所 TEL.06-6399-3303 FAX.06-6399-3993

広島営業所 TEL.082-502-7322 FAX.082-502-7325

福岡営業所 TEL.092-452-0142 FAX.092-452-0146

<http://www.smith-nephew.com/japan/>

◇Trademark of Smith & Nephew.

© 2015-2017 Smith & Nephew KK

販売店