



# 使い捨て 食事用エプロンポケット付

プラスハートは看護・介護現場の声から生まれました

- + ワイドポケット&サイドガード付き!  
食べこぼしをしっかりキャッチ
- + 調整可能な紐タイプ!  
首回りにぴったりフィット
- + 透明タイプ!  
着用しても目立ちにくい



目立ちにくく、自然な印象!

透明



ワイドポケット&サイドガード形状

目立ちにくい透明タイプ!  
人目を気にすることなく使えます。



## 商品特長

### + 1.食べこぼしをしっかりキャッチ

- ワイドポケットとサイドガードで、食べこぼしをしっかりとキャッチできます。
- 液体を通さないポリエチレン製です。
- エプロンをトレーの下に敷いて固定すると、ポケットが広がり、効果的に食べこぼしをキャッチできます。

### + 2.首周りにぴったりフィット

- 首の太さに合わせて調整できる紐タイプのため、首周りに隙間ができません。

### + 3.目立ちにくい透明タイプ

- 色は使用者の羞恥心に配慮した、透明です(エプロンを付けていることが分かりにくいいため、人目が気になりにくい)。
- 色が透明で喉の動きが見えるため、嚥下状態の確認が可能です。

### + 4.片付け簡単、手間いらず

- 使い捨てのため、洗濯などの手間がありません。

### + 5.必要枚数に合わせた2種類の入数

- 9枚入は、3食×3日分を1袋にしているため、短期入院時に無駄なく使い切ることができ、外出時も持ち運びやすくなっています。
- 60枚入は、1枚ずつ取り出しやすいパッケージです。“オオサキ PPEホルダーソフト”を使用すると壁掛けができ、置き場に困りません。




1枚ずつ取り出しやすい!




“オオサキ PPEホルダーソフト”にぴったりと取まります。

## 商品情報


### ■着用方法

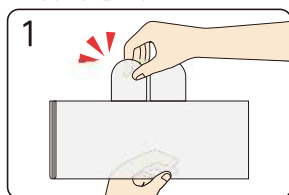


1 エプロンを取り出し、突起の部分を持つと、簡単に広げることができます。

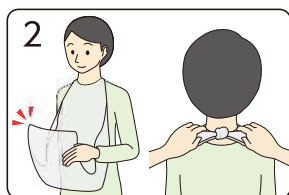

2 ポケットがある方を前にして、首紐を結んで装着します。

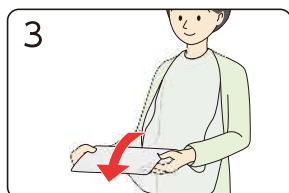


3 ポケット部を広げて整えます(このままでも使用できます)。

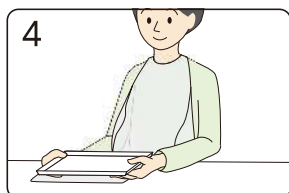

4 エプロンのすそをトレーの下にはさんで固定します。

### ■規格

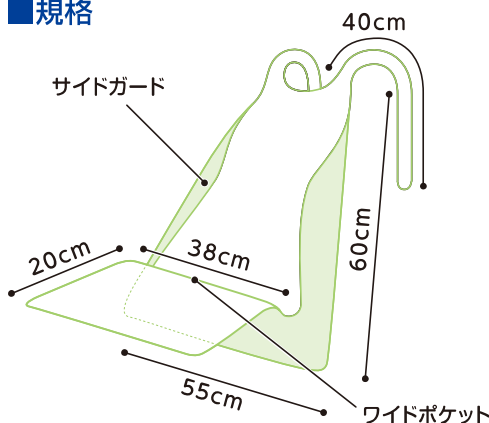

### ■素材

ポリエチレン

## 商品規格

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	POSレジ登録用名略称/JANコード	JANコード/ITFコード
73740	使い捨て食事前エプロン ポケット付 透明 60枚入 幅55cm×丈60cm(首紐を除く)	販売単位   238 × 90 × 115	680.0g	10箱	シヨクエプ・ホ・ケ   60マイ 4 971032 737409	4971032737409
		外装   480 × 258 × 248	7.4kg			14971032737406
73756	使い捨て食事前エプロン ポケット付 透明 9枚入 幅55cm×丈60cm(首紐を除く)	販売単位   145 × 255 × 8	94.5g	10袋 × 8箱	シヨクエプ・ホ・ケ   9マイ 4 971032 737560	4971032737560
		内装   150 × 230 × 90	1.0kg			24971032737564
		外装   384 × 250 × 315	8.6kg			14971032737567

◇商品はすべてオープン価格です。

**Osaki**  
オオサキメディカル株式会社  
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812  
http://plus-ph.com



取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。