


BOXの組み立て方法


【注意】完全ロック用のツメを差し込まないようにご注意ください。

フタをしっかり押し込み、BOXを組み立ててください。

● 1.5L / 3.2L / 3.2L回転タイプ / 7.6L / 7.6L回転タイプ

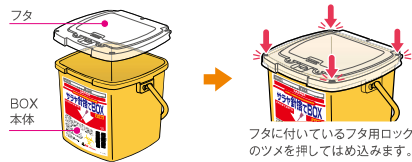


● 1L / 5L

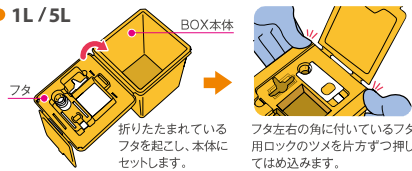


仮フタの開閉方法

【注意】完全ロックをするとフタは開きませんのでご注意ください。

● 0.2L / 1L / 1.5L / 3.2L / 5L / 7.6L

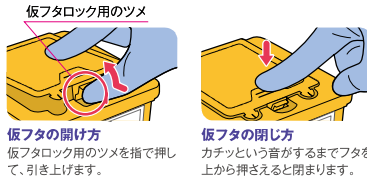

● 3.2L回転タイプ / 7.6L回転タイプ

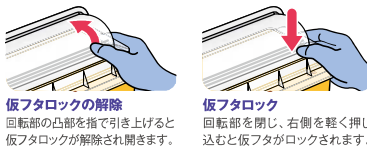

BOXの廃棄方法

廃棄物が上限ラインまで一杯になったら完全ロックをしてください。確実に封がされていることを確認の上、感染性廃棄物処理マニュアルや各自治体の指示に従って廃棄してください。


● 0.2L / 1L / 1.5L / 3.2L / 5L / 7.6L

完全ロック用のツメ

※0.2Lの完全ロック用のツメは1ヶ所です。


上限ライン

※上限ラインを超えての廃棄は、針先が飛び出す恐れがあるため、絶対にお止めください。

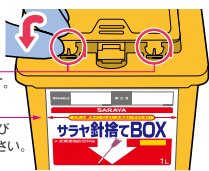

● 3.2L回転タイプ / 7.6L回転タイプ

廃棄物が上限ラインまで一杯になったら、回転部の両側を強く押し込み、完全ロックします。

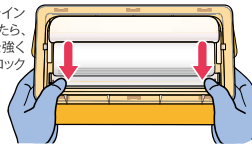

オプション品 (専用ブラケット、専用ホルダー)

専用ブラケットを使用することで、回診車等のパイプや欄に固定して使用できます。また、専用ホルダーは滑りにくく、針捨てBOXを安定して設置することが可能です。詳細は、担当営業へお問い合わせください。

● 1L



専用ホルダー使用例 (商品コード：77251) 専用ブラケット使用例 (商品コード：77248) 専用フック式ブラケット使用例 (商品コード：77256)

● 1.5L



専用ホルダー使用例 (商品コード：77252) 専用ブラケット使用例 (商品コード：77249)

1.5L専用フック式ブラケットもあります (商品コード：77257)

● 3.2L / 7.6L共通



専用ホルダー使用例 (商品コード：45299) 専用ブラケット使用例 (商品コード：77250) 3.2L、7.6L共通専用フック式ブラケットもあります (商品コード：77258)

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
サラヤ針捨てBOX	0.2L×10	1	45345	49-87696-45345-6
	1L	60	45327	49-87696-45327-2
	1.5L	30	45335	49-87696-45335-7
	3.2L	20	45328	49-87696-45328-9
	3.2L 回転タイプ	18	45346	49-87696-45346-3
	5L	12	45316	49-87696-45316-6
	7.6L	12	45297	49-87696-45297-8
	7.6L 回転タイプ	12	45298	49-87696-45298-5

■製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■記載内容は2022年7月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
https://www.saraya.com/

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938
(受付時間：平日 9:00～18:00)

SARAYA

Medical SARAYAにて
注射針取り外し方法の動画公開中▶



サラヤ針捨てBOX 0.2L/1L/1.5L/3.2L/5L/7.6L

医療廃棄物回収容器



医療現場の 針刺し切創防止のために

針刺し
切創防止
Point


- リキャップをしない
- 使用後の注射針は放置せず、直ちに廃棄する
- 使用後の注射針は必ず使用者が責任を持って廃棄する
- 使用後の注射器・注射針は素手で扱わない
- 十分な数の廃棄容器を設置する
- 適切な廃棄容器を設置する

ポリプロピレン製

サラヤ針捨てBOXの特徴

- 耐貫通性で針が飛び出さない安全設計
- 仮ロック・完全ロック機能付き
※完全ロック後は開閉不可能
- ISO 23907-1:2019の認証を取得
- CDC(米国疾病管理予防センター)のNIOSH*が求める機能性、アクセスの容易さ、視認性、便宜性を考慮

* National Institute for Occupational Safety and Health
(国立労働安全衛生研究所)

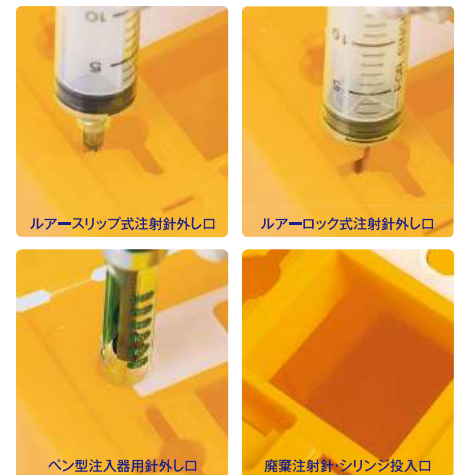

ルアーロック式注射針外し口

ルアーロック式注射針外し口

ペン型注入器用針外し口

廃棄注射針・シリンジ投入口

0.2L

サイズ(mm) :
W80×D50×H80

- ペン型注入器用針の取り外しに対応
専用スライダーで手指への汚染リスクを低減
- 持ち運びに便利なコンパクトサイズ
- 半透明の容器で廃棄量が分かりやすい
- 予めフタと本体がセットされており、
組み立て要らずですぐに使用可能



1L

サイズ(mm) :
W110×D110×H133
投入口(mm) : W45×H38 (目安)

- ペン型注入器用針の取り外しに対応
専用スライダーで手指への汚染リスクを低減
- フタと本体が一体なので組み立てが簡単
- 入れやすい投入口
小容量のシリンジや翼状針の廃棄にも対応
- 転倒時の廃棄物の流出をブロック
投入口内部の仕切板で廃棄量の上限もわかりやすい



1.5L

サイズ(mm) : (取手部分を除く)
W150×D151×H137
投入口(mm) : W105×H41 (目安)

- ペン型注入器用針の取り外しに対応
専用スライダーで手指への汚染リスクを低減
- 入れやすい投入口
小容量のシリンジや翼状針の廃棄にも対応
- 転倒時の廃棄物の流出をブロック
投入口内部の仕切板で廃棄量の上限もわかりやすい
- 手提携用取手付きで、持ち運びに便利



3.2L/7.6L

サイズ(mm) : (取手部分を除く)
W225×D130×H195 (3.2L) / H400 (7.6L)
投入口(mm) : W185×H55 (目安)

- ペン型注入器用針の取り外しに対応
専用スライダーで手指への汚染リスクを低減
- ルアーロック式注射針対応の
スライダー付
専用スライダーでルアーロック式注射針の取り外しが可能
- 入れやすい大きな投入口
針が付いた50mLシリンジを横向きで廃棄可能
- 転倒時逆流防止板付き
転倒時に起こる注射針等の廃棄物の流出をブロック
- 手提携用取手付きで、持ち運びに便利



3.2L/7.6L 回転タイプ

サイズ(mm) : (取手部分を除く)
W225×D136×H210 (3.2L) / H422 (7.6L)
投入口(mm) : W197×H67 (目安)


- 転倒時或使用時に内容物が
飛び出ない
仮ロック機能付き、また回転部が開いているときは注射針等の医療廃棄物の流出をブロック
- 設置場所を選ばない
仮フタが上開きでないため、回診車の最下段でも収納しやすい
- 入れやすい大きな投入口
針が付いた50mLシリンジを横向きで廃棄可能
※投入口から手が入りにくいよう安全性に配慮
- 手提携用取手付きで、持ち運びに便利
波形状の取手でグリップしやすい



5L

サイズ(mm) : W279×D136×H210
投入口(mm) : W242×H55 (目安)

- 入れやすい大きな投入口
透析用留置針や針が付いた50mLシリンジを横向きで廃棄可能
- 転倒時逆流防止板付き
転倒時に起こる注射針等の廃棄物の流出をブロック
- フタと本体が一体なので組み立てが簡単

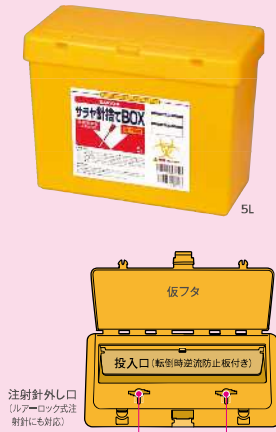


注射針の外し方


Medical SARAYAにて注射針取り外し方法の動画公開中



ルアーロック式注射針 1L / 1.5L / 3.2L / 5L / 7.6L

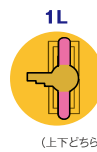



(上下どちらでも針外し可能)

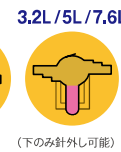

(下のみ針外し可能)

① シリンジと注射針のすき間をBOXの注射針外し口(上下どちらか)に引っかけます。


② 引っかけたまま、シリンジを引き上げると注射針が外れ、針捨てBOX内に落ちます。

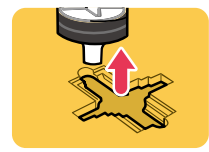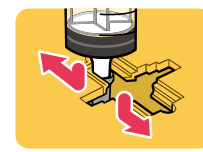

ルアーロック式注射針 1L / 1.5L / 3.2L / 5L / 7.6L



(左のみ針外し可能)

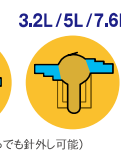


(左右どちらでも針外し可能)



ルアーロック式注射針 3.2L / 7.6L スライダー使用時



①: 針外し口
②: スライダーボタン

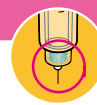

ペン型注入器用針 0.2L / 1L / 1.5L / 3.2L / 7.6L スライダー使用時




①: 針外し口
②: スライダーボタン



ペンニードル® プラスを使用される場合

スライダー外し口のツメ4点とペンニードル® プラスの凹形状の溝(右記イラスト○印)が合うよう、ペン型注入器本体を挿入してください。

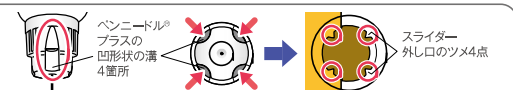

その他の注射針やシリンジなど

投入口に廃棄します(採血用針、血糖測定用穿刺針、翼状針、透析用留置針、シリンジなど)。

廃棄する注射針、シリンジ(注射筒)の長さ合った針捨てBOXをご使用ください。