

使い捨て プラスチック手袋 ソフト

DISPOSABLE PLASTIC GLOVES

- + 指先までフィット!
看護・介護に最適
- + 左右両用のため
片手でも使えて経済的
- + アレルギーの原因でもある
天然ゴムは使用しておりません

天然ゴム 不使用

パウダー 不使用

未滅菌



伸縮性が高くフィット感に富んだ
使い捨てプラスチック手袋です。

プラスチック手袋ソフト パウダーフリー



看護・介護製品

衛生関連

商品特長

- ＋ 指先までフィットし、介護・看護に最適**
 - ・やわらかく、薄手のため、指先までフィットし、細かい作業が必要な介護・看護に最適です。
- ＋ 片手でも使えて経済的！**
 - ・左右両用のため、片手だけでも使用でき、経済的です。
- ＋ 肌にやさしい素材**
 - ・天然ゴムを使用していないためラテックスアレルギーの心配な方にも使用していただけます。
 - ・パウダーフリーのためパウダーアレルギーの心配がある方にも使用していただけます。
- ＋ 豊富なサイズ展開**
 - ・SS～Lまで幅広いサイズ展開があるため、ぴったりのサイズを選択できます。
 - ・ひと目でサイズを識別できるように、パッケージを色分けしています。

商品情報

■着脱方法

取り着け方



袖口の部分をつかんで装着してください。

取り外し方



1 片方の手袋の袖口(外側)をつかみます。



2 手袋が裏表逆になるように外します。



3 外した手袋をにぎり、手袋をはずした手を反対の手袋の袖口に差し込みます。




4 手袋が裏表逆になるように外します。



5 外した手袋は2枚ひとかたまりになった状態ですぐに廃棄してください。

■サイズガイド

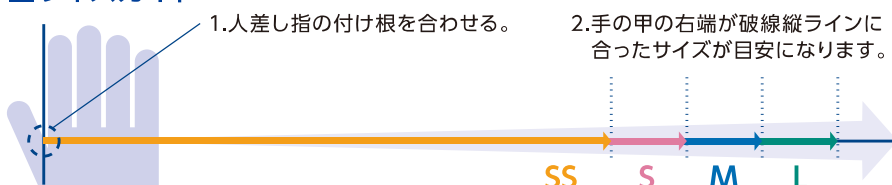

■バリエーション

サイズ	規格(全長×手のひらの幅×中指の長さ)
SS	24cm × 7.5cm × 7.1cm
S	24cm × 8.5cm × 7.1cm
M	24cm × 9.5cm × 8cm
L	24cm × 10.5cm × 8.8cm

■素材

塩化ビニル・可塑剤



オオサキPPEホルダーにぴったりと収まります。

商品規格

■プラスチック手袋ソフト PF

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	POSレジ登録用名称・JANコード	JANコード/ITFコード
70006	プラスチック手袋ソフト PF SS 100枚入	販売単位 230 × 60 × 118	405.0g	20箱	ツカイスチフ・ラテソフトSS	4971032700069
		外装 490 × 245 × 325	8.8kg		4 971032 700069	14971032700066
70007	プラスチック手袋ソフト PF S 100枚入	販売単位 230 × 60 × 118	415.0g	20箱	ツカイスチフ・ラテソフトS	4971032700076
		外装 490 × 245 × 325	9.0kg		4 971032 700076	14971032700073
70008	プラスチック手袋ソフト PF M 100枚入	販売単位 230 × 60 × 118	465.0g	20箱	ツカイスチフ・ラテソフトM	4971032700083
		外装 490 × 245 × 325	10.0kg		4 971032 700083	14971032700080
70009	プラスチック手袋ソフト PF L 100枚入	販売単位 230 × 60 × 118	475.0g	20箱	ツカイスチフ・ラテソフトL	4971032700090
		外装 490 × 245 × 325	10.2kg		4 971032 700090	14971032700097

◇ 商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

取扱店