

滅菌ポート用ワイパー

エンドワイパーX®



ガーゼ製品

鏡視下手術用ワイパー



E.O.G. 滅菌
Tyvek



画像提供：大阪大学大学院医学系研究科 産科学婦人科学講座
助教 小林 栄仁先生

ポート内腔の汚れを簡単に除去して
カメラ再挿入時の汚染を防ぐワイパーです。



商品特長

ワンショットで除去

- カメラポート内腔の汚れをワンショットで除去し、再挿入したカメラに汚れが付着することを防止します。

優れた吸収力

- 吸収性に優れているため、ポート内腔の血液をしっかり吸収します。

高いリントフリー性

- リントフリー性の高い素材を使用しているため、脱落繊維がほとんどありません。

やわらか素材

- やわらかい不織布素材のため、万一臓器と接触した場合でも、臓器を傷つけにくくなっています。

X線造影糸入り

- X線造影糸入りのため、万一体内に遺残した場合でもレントゲン撮影により位置が特定できます。

商品情報

■使用方法



1

滅菌バッグから清潔に取り出します。



2

挿入する長さ

トロッカー内筒の長さから挿入する長さの目安を計ります。



3

2で計った長さを目安にして、トロッカーに差し込み、2〜3度上下させて、内腔の血液等を拭き取ります。



反対側も使用可能

※回転させながら差し込むと、効果的に拭き取れます。
※反対側も使用することができます。

■バリエーション

規 格	サ イ ズ	素 材
5mmポート用	直径 約 6mm × 長さ 25cm	セルロース、パルプ、X線造影糸
12mmポート用	直径 約 12mm × 長さ 25cm	セルロース、X線造影糸

■製品仕様



商品規格

■エンドワイパー X[®]

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))		重量	梱入数	JANコード / ITFコード
23721	エンドワイパーX [®] 5mmポート用 1本入(20袋) 直径約6mm×長さ25cm	販売単位	155 × 320 × 40	165.5g	8箱	4971032237213
		外装	355 × 170 × 330	1.8kg		14971032237210
23722	エンドワイパーX [®] 12mmポート用 1本入(20袋) 直径約12mm×長さ25cm	販売単位	155 × 320 × 80	270.0g	8箱	4971032237220
		外装	345 × 330 × 330	2.6kg		14971032237227

△使用前にトロッカーとの適合性を確かめてください。

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本 社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店