



洗浄料

清拭用滅菌ディスポワイプ

ハイポでスッキリ!
滅菌清拭ワイプHP



汚れ(ヨウ素など)を拭き取る
ノンアルコールタイプの滅菌済清拭用ワイプです。



外科製品

清拭ワイプ

商品特長

汚れ(ヨウ素など)を素早く清拭!

- 8%ハイポ(チオ硫酸Na)含浸により、汚れ(ヨウ素など)を素早くきれいに落とせます。
- 1枚ずつ包装されているため、必要な時にすぐ、清潔に使用できます。

ノンアルコール

- アルコールを含んでいないため、肌が敏感な方にも使用できます。

無駄な薬液使用の削減

- 不織布に薬液を浸す必要がないため、無駄な薬液の使用を削減できます。

- ▲傷口や粘膜等には使用しないでください。
- ▲本品は滅菌品です。再滅菌をしないでください。
- ▲用途に応じて滅菌手袋等を装着し、使用してください。
- ※パッケージ記載の〈使用上の注意〉をよく読み使用してください。

十分な薬液量

- 厚手でやわらかく強度のある不織布に、十分な薬液を含浸しているため、しっかりと拭き取ることができます。

成分の蒸発を防ぐアルミ個包装

- アルミ個包装のため、気密性が高く、成分の蒸発を防ぎます。

温めて使用可能

- 電子保温ボックス(別売り)などで温めて使用することができます。

※約60℃までなら、包材等に影響はありません。

- ▲電子レンジでは温めないでください。
- ▲加温・保温する際は、切り込みを入れしないでください。
- ▲温めて使用する場合は、やけどに注意してください。
- ▲高温や長時間の加温は、パッケージの破損や変色の恐れがあるため避けてください。

商品情報

■成分

水、チオ硫酸Na、炭酸Na

■素材

コットン不織布

■使用用途

汚れ(ヨウ素など)の清拭

関連商品



洗淨料

ハイポでスッキリ!
清拭タオルHP
ノンアルコールタイプ
ふつうサイズ 大きめサイズ



からだふきおしほり大判
ぬれタオル

- 汚れ(ヨウ素など)を拭き取る、ノンアルコールタイプの清拭用タオルです。
- 使用範囲に合わせて、ふつうサイズ(27.5cm×30cm)、大きめサイズ(55cm×30cm)の2種類から選べます。

- “グリコシルトレハロース”を配合した、個包装タイプのからだふき用ぬれタオルです。
- “清拭タオルHP”及び、“滅菌清拭ワイプHP”使用后、仕上げの清拭として最適です。

商品規格

■滅菌清拭ワイプHP

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード	
57000	滅菌清拭ワイプHP 7.5cm×8cm 2ツ折 1枚入(100包)	販売単位	145×112×75	493.0g	20箱	4971032570006
		外装	395×245×301	10.4kg		14971032570003

■販売名:滅菌清拭ワイプS-hp

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店