

ウルトラアラーウ  
&  
7%7ムウルトラミルクディップ  
&  
7%7ムうえっと

中材向け洗剤  
ウルトラアラーウ シリーズ



ウルトラアラーウ 20

ウルトラアラーウ S

ウルトラアラーウ 30

ウルトラアラーウ 800

ウルトラアラーウ 700

ウルトラアラーウ M

浸漬用潤滑・防錆剤  
7%7ムウルトラミルクディップ



ウルトラミルクディップ

血液凝固防止剤  
7%7ムうえっと



うえっと

アルカリ性洗剤

# ウルトラアラーウ 20



● チューブなど、樹脂製品専用の除菌・洗浄剤です。

### 主成分

陰イオン界面活性剤  
次亜塩素酸ナトリウム  
水酸化カリウム  
非イオン陰イオン界面活性剤  
金属イオン封鎖剤

### 性状

外 観：黄色透明液体  
p H：11.8(1%溶液)

### 使用条件

- 希釈濃度：20～50倍希釈(2～5%)
- 使用温度：30～45℃
- 洗浄時間：30～120分(汚染度に応じて)

### 注意事項

- 浸漬洗浄後は流水で十分にすすいでください
- 金属製品の適用は避けてください

### 禁忌事項

- 酸性洗剤と混合すると有毒な塩素ガスが発生するので、絶対に混合しないでください



製品ページにて  
取説動画を配信中

注文コード	品番	容量	標準価格
233-030-11	201754	4.5kg	¥10,000
233-030-12	201755	20kg	¥41,000

浸漬／超音波洗浄装置用アルカリ性洗剤

# ウルトラアラーウ S



● 浸漬洗浄、超音波洗浄装置(加圧水流方式を併用する装置は不可)に使用できます。

### 主成分

非イオン界面活性剤  
金属イオン封鎖剤  
水酸化アルカリ  
可溶化剤

### 性状

外 観：無色～淡黄色透明液体  
p H：11.8(1%溶液)

### 使用条件

- 希釈濃度  
：浸漬洗浄 20～50倍希釈(2～5%)  
：超音波洗浄 140～200倍希釈(0.5～0.7%)
- 使用温度：30～45℃
- 洗浄時間：15～120分(汚染度に応じて)

### 注意事項

- 浸漬/超音波洗浄後は流水で十分にすすいでください
- 銅、真鍮、アルミ製の器具には使用を控えてください



製品ページにて  
取説動画を配信中

注文コード	品番	容量	標準価格
233-030-01	201752	4kg	¥5,400
233-030-02	201753	20kg	¥23,000

浸漬／超音波洗浄装置用アルカリ性洗剤

# ウルトラアラーウ 30



● 鋼製器具に付着した、タンパク質、脂肪の汚れの除去に適しています。

### 主成分

非イオン界面活性剤  
可溶化剤  
金属イオン封鎖剤  
水酸化アルカリ

### 性状

外 観：無色～淡黄色透明液体  
p H：11.6(1%溶液)

### 使用条件

- 希釈濃度  
：浸漬洗浄 20～50倍希釈(2～5%)  
：超音波洗浄 140～200倍希釈(0.5～0.7%)
- 使用温度：30～45℃
- 洗浄時間：15～120分(汚染度に応じて)

### 注意事項

- 浸漬/超音波洗浄後は流水で十分にすすいでください
- 銅、真鍮、アルミ製の器具には使用を控えてください



製品ページにて  
取説動画を配信中

注文コード	品番	容量	標準価格
233-030-16	201750	4.5kg	¥9,000
233-030-17	201751	20kg	¥35,000

浸漬／超音波洗浄装置用中性洗剤

# ウルトラアラーウ 800



● アルカリによって腐食する器具の洗浄に適しています。

### 主成分

蛋白質分解酵素  
非イオン界面活性剤  
水溶性溶剤  
金属腐食抑制剤  
再汚染防止剤

### 性状

外 観：無色～淡黄色透明液体  
p H：8.6(原液)

### 使用条件

- 希釈濃度  
：浸漬洗浄 20～50倍希釈(2～5%)  
：超音波洗浄 100～200倍希釈(0.5～1%)
- 使用温度：40～45℃
- 洗浄時間：15～120分(汚染度に応じて)

### 注意事項

- 浸漬/超音波洗浄後は流水で十分にすすいでください



製品ページにて  
取説動画を配信中

注文コード	品番	容量	標準価格
233-030-26	201756	4kg	¥6,600
233-030-27	201757	20kg	¥30,000

## 血液溶解剤

# ウルトラアラーウ 700

アルカリ性

サンプル有

- 乾燥、固着した血液などのタンパク汚れを溶解します。
- ※グルタラル系消毒薬などで変性、凝固した汚れの除去には適していません。

### 主成分

高級アルコール系非イオン界面活性剤  
グリコール系溶剤  
アルカノールアミン  
カチオン系除菌剤

### 性状

外 観：無色～淡黄色透明液体  
p H：10.6



### 使用条件

- 希釈濃度：原液で使用
- 使用温度：30～45℃
- 洗浄時間：5～30分(汚染度に応じて)

### 注意事項

- 浸漬洗浄後は流水で十分にすすいでください
- 銅、真鍮、アルミ製の器具には使用を控えてください



製品ページにて  
取説動画を配信中

注文コード	品番	容量	標準価格
233-030-21	201758	4.5kg	¥9,500

## 錆除去剤

# ウルトラアラーウ M

中性

サンプル有

- 鋼製器具に発生した錆を除去します。
- 錆の除去と共に、液体が紫に変色します。

### 主成分

グリコール酸塩化合物  
水溶性溶剤  
pH調整剤  
金属イオン封鎖剤

### 性状

外 観：無色～微紅透明液体  
p H：8.0



### 使用条件

- 希釈濃度：原液で使用
- 使用温度：常温
- 洗浄時間：15分以内

### 注意事項

- 浸漬洗浄後は流水で十分にすすいでください
- 使用時間を大きく超過すると器具への影響性があります
- 前回の適用から3日以内に、本品を再度適用することは避けてください
- ステンレス以外の器具への適用は避けてください



製品ページにて  
取説動画を配信中

注文コード	品番	容量	標準価格
233-030-06	201759	5kg	¥15,400

## 浸漬用潤滑・防錆剤

# ウルトラミルクディップ

中性

サンプル有

- 希釈時の液が乳白に濁らず、内容物の確認が簡単に行えます
- 高希釈倍率(100～200倍)での使用でコストが削減できます

### 主成分

ポリグリセリン脂肪酸エステル  
ソルビタン脂肪酸エステル

### 性状

外 観：淡黄色透明液体  
p H：9.0(1%溶液)



### 使用条件

- 希釈濃度：浸漬洗浄 100～200倍希釈(0.5～1%)
- 洗浄時間：10～30秒

### 注意事項

- 体内埋設器具、防錆処理を必要としない器具(樹脂、ガラス、ゴム等)、薬液投与を目的とした器具(注射筒、注射針、チューブ、薬盞等)には使用しないでください



製品ページにて  
取説動画を配信中

注文コード	品番	容量	標準価格
233-029-03	MY-45	1ℓ	¥7,150

## 血液等タンパク汚れ凝固防止剤

# ウルトラうえっと

サンプル有

- 鋼製器具に付着した血液の乾燥、固着を防止します
- 本製品が付着したまま、ウォッシャーディスインフェクターなどの自動洗浄が可能です

### 主成分

湿潤剤  
蛋白凝固防止剤  
緩衝材  
金属腐食防止剤  
防腐剤

### 性状

外 観：無色～淡黄色透明液体  
p H：9.8



4ℓ  
詰替用

500ml  
スプレーボトルタイプ

### 使用条件

- 希釈濃度：原液で使用

### 注意事項

- スプレー後、72時間以内に洗浄が必要です



製品ページにて  
取説動画を配信中

注文コード	品番	容量	標準価格
233-028-02	MY-110	500ml スプレーボトルタイプ	¥1,400
233-028-01	MY-100	4ℓ 詰替用	¥6,500

# サンプルご依頼フォーム

各種洗剤のサンプルをご希望される場合は、『サンプル依頼』欄に☑マークを入れ、お客様の情報をご記入の上、FAXにてご依頼ください。

※弊社ホームページの『お問い合わせフォーム』からもサンプルをご依頼いただけます。

## FAX : 0725-53-5646

### 製品概要 一覧表

商品名	ウルトラ アラウ 20	ウルトラ アラウ S	ウルトラ アラウ 30	ウルトラ アラウ 800	ウルトラ アラウ 700	ウルトラ アラウ M	ウルトラミルク ディップ	うえっと
商品画像								
液性	アルカリ性			中性	アルカリ性	中性		-
pH	11.8	11.8	11.6	8.6	10.6	8.0	9.0	9.8
対象物	チューブ類 樹脂製品	鋼製器具						
用途	浸漬洗浄	超音波洗浄 (浸漬洗浄も可)	浸漬洗浄 (超音波洗浄も可)	超音波/浸漬洗浄	血液溶解	除錆	防錆	血液凝固防止
サンプル 依頼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\*は必須項目です。

ふりがな*			
ご氏名*			
貴院名*	( 部署名 : )		
連絡先住所*	〒		
TEL*		指 定 ディーラー名	
サンプル ご依頼理由	<input type="checkbox"/> 新規検討 <input type="checkbox"/> 他社切替検討 <input type="checkbox"/> その他 ( )		



村中医療器(株)ホームページ  
『お問い合わせフォーム』

※本カタログの表示価格は、メーカー希望小売価格で消費税は含んでおりません。  
 ※印刷の都合上、質感や色が実際の商品と異なる場合があります。  
 ※本カタログに掲載の仕様・形状・価格などは、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。

**Muranaka**  
MEDICAL INSTRUMENTS Co., Ltd.

**村中医療器 株式会社**

<http://www.muranaka.co.jp/>

本 社 〒540-0036 大阪府大阪市中央区船越町 2-3-6 ☎ 06-6943-1221 (大代) FAX06-6947-5360  
 総合センター 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野 2-8-2 ☎ 0725-53-5541 (代) FAX0725-53-5641  
 東京支店 ☎ 03-3813-9211 (代) FAX03-3813-9217 札幌営業所 ☎ 011-737-9121 (代) FAX011-737-9122  
 仙台営業所 ☎ 022-274-7780 (代) FAX022-271-8448 埼玉営業所 ☎ 048-844-3500 (代) FAX048-844-3501  
 金沢営業所 ☎ 076-286-4531 (代) FAX076-286-0490 名古屋営業所 ☎ 052-709-7111 (代) FAX052-709-7116  
 村中船越ビル ☎ 06-6943-1431 (代) FAX06-6941-7121 米子営業所 ☎ 0859-33-6231 (代) FAX0859-33-7930  
 広島営業所 ☎ 082-532-1800 (代) FAX082-233-8818 福岡営業所 ☎ 092-473-0123 (代) FAX092-474-1363