

I. V. ポール（車椅子用） 取扱説明書

1. 安全上の注意

- 1) 使用目的以外に使用しないでください。
- 2) 耐荷重は 5kg です。車椅子が転倒するおそれがありますので、本品にそれ以上の無理な力がかからないようにしてください。
- 3) 各固定ノブがしっかり締まっているか、定期的に（週に一回以上）点検してください。

ノブがゆるんだ状態で使用されますと、転倒や破損の原因となります。必ず定期的に点検を行い、ゆるみがある場合は増し締めをしてください。



2. 製品概要と各部・付属品の名称



部品名	数量
①上パイプ（φ 16mm×900mm）	1
②下パイプ（φ 19mm×940mm）	1
③フック	1
④マジックカフ	1
⑤上パイプ固定ノブ	1
⑥車椅子取付用ノブ	1
⑦下パイプ固定ノブ	1
⑧固定ホルダー④	1
⑨固定ホルダー⑥	1
⑩プッシュボタン	1
⑪ストッパー	1
⑫割りピン（7/8 インチ（22mm）パイプ用） （3/4 インチ（19mm）パイプ用）	各 1 組

耐荷重 : 5kg
全長 : 1390～1820mm
重量 : 約 1.1kg

3. 使用方法とその注意事項



注意

- ① 車椅子への取り付けは、平坦な場所で行ってください。
- ② 必ず車椅子のブレーキをロックし、車椅子が動かない状態で取り付けてください。
- ③ 固定ホルダー④は 1 インチ（25mm）パイプ用です。車椅子のパイプがそれより細い場合、固定ホルダー④に付属の割りピンを取り付けてください。
（次頁の【割りピンの取付方法（車椅子のパイプが細い場合）】参照。）


- 1) 車椅子取付用ノブをゆるめて固定ホルダー④から取り外します。
- 2) 固定ホルダー④、⑤を車椅子のパイプにしっかりとはめこみます。
(右図参照)。



- 3) 取り外した車椅子取付用ノブを固定ホルダー④に取り付け、しっかりと締めます。
下パイプ固定ノブをしっかりと締めます。

⚠ 注意

各固定ノブ・取付用ノブは、車椅子の車輪に触れないよう車椅子の内側に取り付けてください。

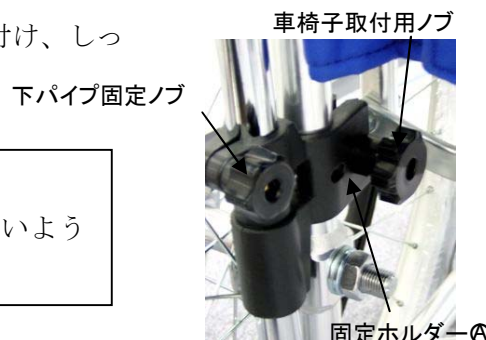

- 4) マジックカフを車椅子のパイプに巻きつけます。
- 5) 上パイプを下パイプに差し込み、上パイプ固定ノブを締めて固定します。




- 6) プッシュボタンを押しながら、フックを上パイプに差し込みます。



【割りピンの取付方法(車椅子のパイプが細い場合)】

- 1) 固定ホルダー④から車椅子取付用ノブを取り外します。
- 2) 割りピンを右図のように固定ホルダー④に挿入し、車椅子のパイプに取り付けます。(割りピンにより 19mm、22mm のパイプに取り付けが可能となります。)

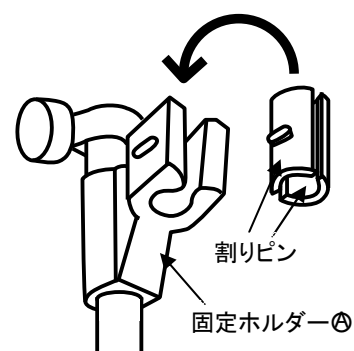

4. 連絡先

販売元：村中医療器株式会社

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号

TEL 0725-53-5546 <http://www.muranaka.co.jp/>

注文コード	品番	商品名
502-022-32	HP2011	I. V. ポール (車椅子用)