

フ.テム

ナーシングストレッチャー

国内生産

センターブレーキ
仕様

3年間保証付
【全機種】

ストレッチャーシリーズ CM動画公開中



しゃべるカタログ

しゃべカタログ

ストレッチャー各シリーズの製品特長はこちらからご覧いただけます。

らくらく移動

NST-1




NST-1の詳細はこちら

しゃべるカタログ



小回りが効き、病室などの狭いスペースでも
楽々移動の双輪キャスターφ125mm

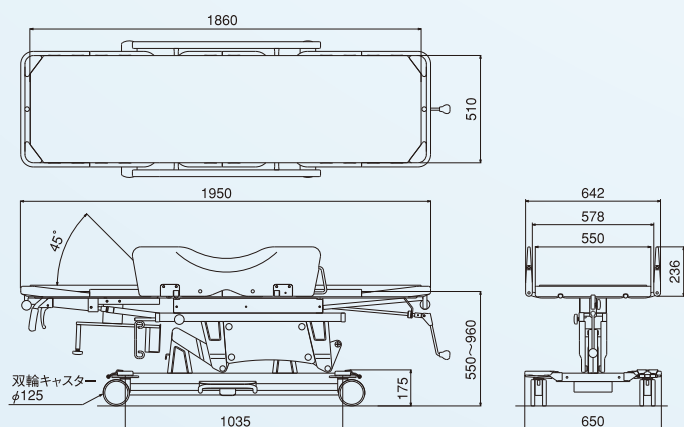

〔仕様〕

サイズ：W650×L1950×H550～960mm（座面高）

マットレスサイズ：W510×L1860×t30mm

材質：（ボトム）樹脂製（フレーム）スチール

（マットレス）ビニールレザー（防汚・耐薬品性）

重量：約61kg

耐荷重：125kg

キャスター：φ125mm（双輪）、4輪トータルロック

背上げ：0～45°（無段階調節）

付属品：ガードル架、ポンベ受け、安全ベルト（2本1組）



注文コード	品番	標準価格
030-123-10	NST-1	¥342,000
■別売品		
030-123-03	アンダーバスケット	約W385×D385×H75mm * ¥12,000
030-123-11	アッパーバスケット（取付フック付）	約W340×D230×H95mm * ¥16,800

*有効サイズ

使用例


1 らくらく移動

本体重量約61kgと軽量で双輪キャスターを採用。操作性に優れており、狭いスペースなどでも小回りが利きます。



2 センターブレーキ・4輪トータルロック

ブレーキペダルがストレッチャー中央にあるので前後に移動せず、その場でブレーキ操作ができます。

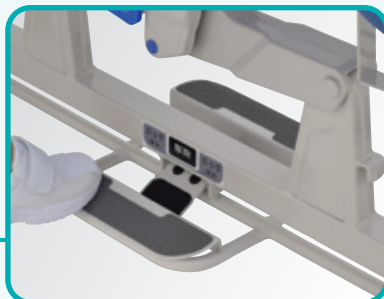

3 サイドレール形状

サイドレールのへこみが
移載対応時などの腹部圧迫を
軽減します。



4 オーバーラップ方式

ストレッチャーの支柱が中心にあるため、
ベッドとの距離が短くなり、患者さんの
移載が楽になります。



※ベッドの形状によっては、オーバーラップができない場合があります。

5 すっきり収納ボンベ受け

ボンベの収納は酸素流量計が
はみ出さないすっきり構造です。



● その他機能

背上げ



0~45°(無段階調節)

方向規制(直進・自在)



アッパーバスケット(別売品)



アンダーバスケット(別売品)



● ガートル受けは頭側・足側に各1カ所

ワンランク上の安定感

NST-2




NST-2の詳細はこちら

しゃべるカタログ



使いやすさと機能性を向上させたモデル

センターブレーキ仕様

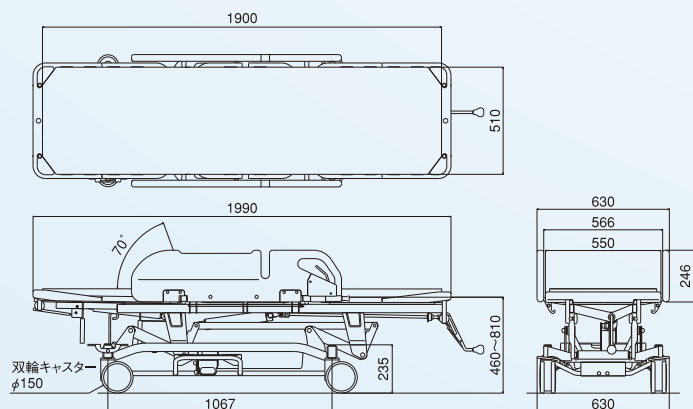

〔仕様〕

サイズ：W630×L1990×H460～810mm（座面高）

マットレスサイズ：W510×L1900×t40mm

材質：（ボトム）樹脂製（フレーム）スチール

（マットレス）ビニールレザー（防汚・耐薬品性）

重量：約74kg

耐荷重：140kg

キャスター：φ150mm（双輪）、4輪トータルロック

背上げ：0～70°（無段階調節）

付属品：ガートル架、ポンプ受け、安全ベルト（2本1組）、ユーティリティトレイ



注文コード	品番	標準価格
030-123-20	NST-2	¥428,000
■別売品		
030-123-21	ガートル架アダプター（左右兼用）	¥12,000

使用例

1 上肢台としても使用可能な大型サイドレール

サイドレールは水平保持できますので作業スペースを広くとることができます。
また、サイドレールにはスリットがあるのでチューブの取り回しが簡単にできます。



水平保持



2 背上げ

背受けは70°まで無段階に調節可能。患者さんの身体状況に合わせて調整いただけます。



0~70°(無段階調節)

3 大型双輪キャスター

φ150mmの大型双輪キャスターを採用し、安定感のある走行ができます。



4 センターブレーキ・4輪トータルロック

ブレーキペダルがストレッチャー中央にあるので前後に移動せず、
その場でブレーキ操作ができます。



5 耐荷重140kg(緊急時は心肺蘇生にも使用可能)

● その他機能

すっきりボンベ受け



方向規制(直進・自在)



ユーティリティートレー(付属品)



W458×D264×H115mm

ガートル架アダプター(別売品)



● ガートル受けは頭側・足側に各2カ所

スライディング機能搭載 NST-3




NST-3の詳細はこちら
しゃべるカタログ



患者さんを持ち上げることなく移載でき、
看護する方の腰への負担を軽減します。

センターブレーキ仕様

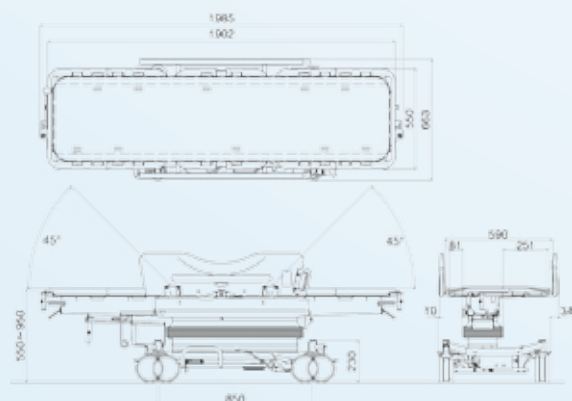

〔仕様〕

サイズ：W663×L1985×H550～950mm(座面高)

材質：(ボトム)樹脂製 (フレーム)スチール

(マットレス)ビニールレザー(防汚・耐薬品性)

重量：約83kg

耐荷重：120kg

キャスター：φ150mm(双輪)、4輪トータルロック

背上げ：0～45°(無段階調節)

付属品：ガートル架、ポンベ受け



注文コード	品番	標準価格
030-123-30	NST-3	¥568,000
■別売品		
030-123-24	アッパーバスケット(取付フック付)	W290×D197×H94mm * ¥19,800

*有効サイズ

使用例

1 スライディング機能

患者さん移載時の 操作手順



患者さんを側臥位にし、サイドレールを降ろします。



巻き込みハンドルを回して繰り出しベルトを送り出します。



繰り出しベルトを患者さんの体の下に敷きこみ、患者さんを仰臥位にします。



体を支えながら繰り出しベルトがストレッチャーの中央にくるまで巻き取ります。



サイドレールを戻し、安全確認後、患者さんを移送します。

※移載手順を見やすくするために1人の状態で撮影しています。実際には安全のため、2人以上で移載を行ってください。

2 足踏み式昇降ペダル

昇降は足踏み式のペダルで軽々と調整できます。

上昇ペダルを踏みこむたびに段階的に上昇。下降ペダルを軽く踏みこむことでスムーズに下降できます。

ハンドル収納の煩わしさを解消し、昇降作業による腕への負担が軽減されます。



● その他機能

大型双輪キャスターφ150mm



背上げ



0~45°(無段階調節)

ハンドル収納



すっきり収納ボンベ受け



方向規制(直進・自在)



センターブレーキ



アッパーバスケット(別売品)



● 固定力が高い4輪トータルロック ● ガートル受けは頭側・足側に各1ヵ所

MMI[®] ムーブボードII

患者さんの移載がスピーディーに行えます！

- 看護・介護する方の腰への負担を軽減します。
- コンパクトに折りたたみため、手軽に持ち運べます。
- 抗菌・防水加工を施しています。
- X線が透過します。

(仕 様)
 サイズ：W490×L1700×t15mm
 折りたたみ時サイズ：W490×L850×t30mm
 ローラーシートサイズ：W505×L1680mm
 材 質：特殊ナイロン、ポリカーボネート
 重 量：約3.3kg
 使用可能患者体重：280kg以下

カ ラ ー	レッド	グリーン
注文コード	135-020-03	135-020-04
標準価格	¥49,000	¥49,000



使用例



折りたたみ例

ムーブボードIIを使用した移載の手順

用 途：手術室、ICU、処置室、救急、病室、レントゲン室、CT・MRI他、シーツ交換等に



※ベッドとストレッチャーの高さをほぼ同じに、隙間間隔は10cm以内になるように、ベッドあるいはストレッチャーを調節してください。
 ※移載手順を見やすくするために1人の状態で撮影しています。実際には安全のため、2人以上で移載を行ってください。

■補充品：専用ローラーシート

注文コード	カラー	標準価格
135-020-05	レッド	¥11,000
135-020-06	グリーン	¥11,000

■別売品：デスポカバー

注文コード	入 数	標準価格
030-020-08	1袋 (10枚入)	¥3,400



MMI ムーブボードIIの
 使用方法詳細については
 こちらからご覧いただけます。

フラムストレッチャーカバー

- 撥水の不織布に防水加工を施したストレッチャー用のカバーです。
- 両サイドのポケットに固定することにより「ズレ」を防止します。

(仕 様)
 サイズ：W550×L1850mm
 ポケット部サイズ：550×150mm
 材 質：SMS25g+PEラミ
 カラー：ブルー
 入 数：1ケース(100枚入)
 対応機種：NST-1



注文コード	品 番	標準価格
030-123-31	MP-FDS-185	¥52,000

フラム防滑ストレッチャーシート

強力防滑加工・高強度・バリア性を兼ね備えたシートです。

- 特殊な防滑加工により患者さんの体位変換時のズレやヨレを防止します。
- 強度が高く、手術室のフロアシートや手術台などでも使用できます。
- バリア性に優れており、内視鏡治療等にも使用できます。

(仕 様)
 サイズ：W800×L2100mm
 材 質：(防滑面)オレフィン系樹脂
 (吸水面)ポリプロピレン
 入 数：1ケース(10枚×10袋入)
 対応機種：NST-1、NST-2



注文コード	品 番	標準価格
030-123-32	MP-E5-821B	¥44,000

※本カタログの表示価格は、メーカー希望小売価格で消費税は含んでおりません。
 ※印刷の都合上、質感や色が実際の商品と異なる場合があります。
 ※本カタログに掲載の仕様・形状・価格などは、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。

Muranaka
 MEDICAL INSTRUMENTS Co., Ltd.

村中医療器 株式会社

<http://www.muranaka.co.jp/>

本 社 〒540-0036 大阪府大阪市中央区船越町 2-3-6 ☎ 06-6943-1221 (大代) FAX06-6947-5360
 総合センター ☎ 0725-53-5541 (代) FAX0725-53-5641 東京支店 ☎ 03-3813-9211 (代) FAX03-3813-9217
 札幌営業所 ☎ 011-737-9121 (代) FAX011-737-9122 仙台営業所 ☎ 022-274-7780 (代) FAX022-271-8448
 埼玉営業所 ☎ 048-844-3500 (代) FAX048-844-3501 金沢営業所 ☎ 076-286-4531 (代) FAX076-286-0490
 名古屋営業所 ☎ 052-709-7111 (代) FAX052-709-7116 村中船越ビル ☎ 06-6943-1431 (代) FAX06-6941-7121
 北大阪営業所 ☎ 06-6386-0003 (代) FAX06-6386-0006 米子営業所 ☎ 0859-33-6231 (代) FAX0859-33-7930
 広島営業所 ☎ 082-532-1800 (代) FAX082-233-8818 福岡営業所 ☎ 092-473-0123 (代) FAX092-474-1363

RS2204.2000