

規格・包装

※これらの製品は未滅菌です。



優肌 パーミロール® (ハンディロールタイプ)

品番	サイズ	入数	JANコード
H24R05	5cm×10m	1巻	4976006712338
H24R07	7.5cm×10m	1巻	4976006712420
H24R10	10cm×10m	1巻	4976006712345
H24R15	15cm×10m	1巻	4976006712352

お求めやすいショートタイプはこちら。



優肌 パーミロール® HS (ハンディロールタイプ)

品番	サイズ	入数		JANコード
		化粧箱	中箱	
H24S05	5cm×2m	1巻	12化粧箱	4976006712956
H24S10	10cm×1m	1巻	12化粧箱	4976006712963



優肌 パーミロール®

品番	サイズ	入数	JANコード
14R05	5cm×10m	1巻	4976006711997
14R10	10cm×10m	1巻	4976006712000
14R15	15cm×10m	1巻	4976006712017

●パーミロール、PERME-ROLLは日東電工(株)の登録商標です。

◆このカタログに記載の内容は、改良などの理由により、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

●お問い合わせは
株式会社ニトムズ
TEL 0570-007-006 FAX 0120-210-679

●このカタログの内容は2019年5月現在のものです。

株式会社ニトムズ

Nitto

Innovation for Customers

フィルムドレッシング 優肌 パーミロール® シリーズ PERME-ROLL SERIES

皮膚の角質を
ほとんどはがしません。
“むれにくく、かぶれにくい”

株式会社ニトムズ

角質剥離が少なく、水蒸気透過性が高い、フィルムドレッシングです。

特長

1.角質剥離の少ないゲル粘着剤を使用しています

皮膚の角質剥離が少なく、かぶれ・かゆみを抑えます。

2.水蒸気透過性・粘着性にすぐれています

不感蒸泄を妨げないので、むれにくく剥がれにくくなっています。

3.防水性があります

貼付したまま、入浴・シャワーができます。外部からの汚染を防止します。

4.柔軟性・粘着性にすぐれています

薄くしなやかなフィルムなので、屈曲部や凹凸部にもよくなじみ、ずれやはがれが少なくなっています。


5.操作が簡単で、しかも経済的です

操作性にすぐれていますので、スムーズに処理できます。必要に応じた長さに切って使うことができるので無駄がありません。


カバーフィルムに波状スリットを入れ、サイドに剥離紙を残すことで、手袋をしたまま貼付が可能になりました。
※14R05～14R15を除く。

使用例

- ドレッシング類で被覆した部位の防水
- ストーマ・CAPD療法等の装具装着部位の防水
- 各種チューブ・ドレイン等の固定

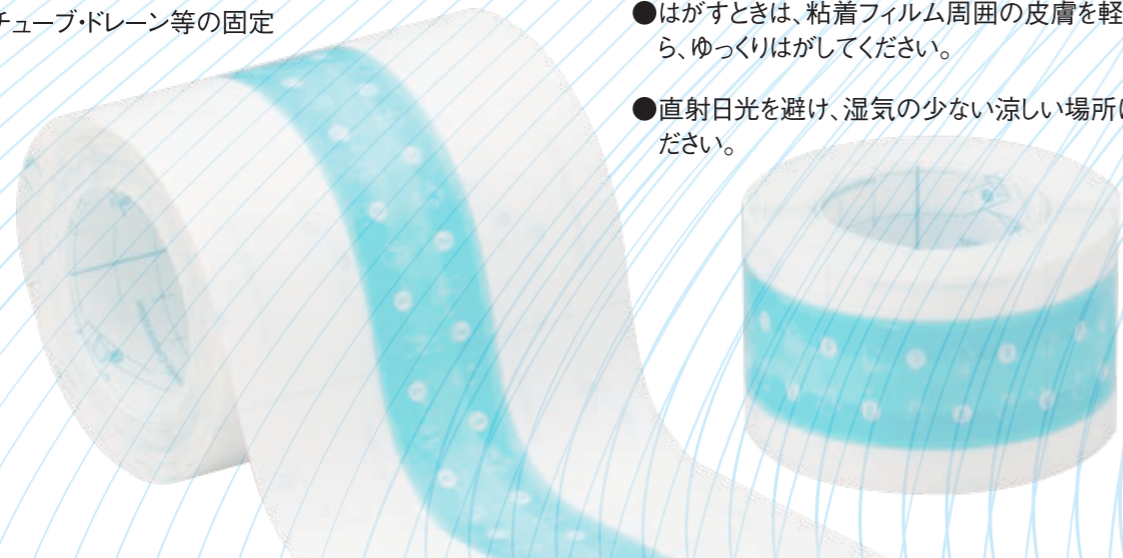


角質保護システム

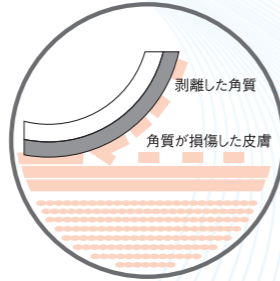

●自社従来品

角質が損傷した皮膚は外界から刺激を受けやすくかぶれの原因にもなります。

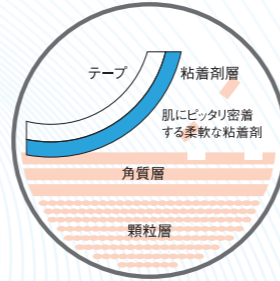

●優肌 パーミロール

角質がほとんどはがれません。

使用上の注意

- 傷口には直接貼付しないでください。
- シャワー・入浴などには、周囲が皮膚に密着していることを確認し、不完全な場合は新しいものと交換してください。
- 貼付部位の皮膚は清潔で乾いた状態にしてください。また、体毛の多い部位では、必要に応じて剃毛してください。
- フィルムを引っ張って伸ばした状態で貼付しないでください。
- 使用中、皮膚障害その他の異常が認められた時は、直ちに使用を中止してください。
- 再使用はしないでください。
- はがすときは、粘着フィルム周囲の皮膚を軽く押さえながら、ゆっくりはがしてください。
- 直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管してください。

使用手順




優肌 パーミロール® (ハンディロールタイプ)

※必要な長さにハサミで切り取ってください。




手袋着用時の操作性を向上させました。



[H24R07、H24R10、H24R15]

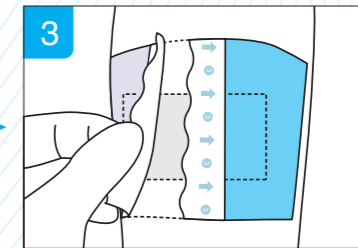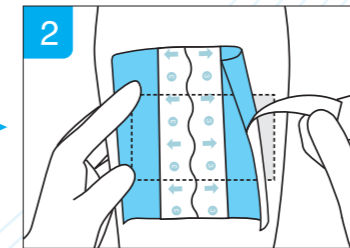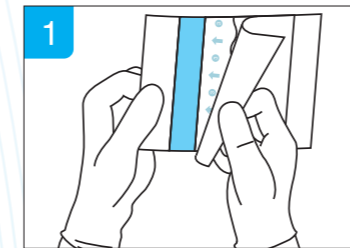

[H24R05、H24S05]

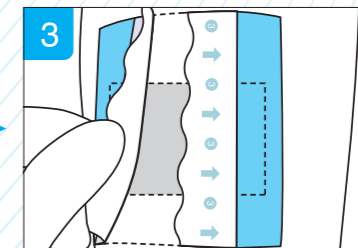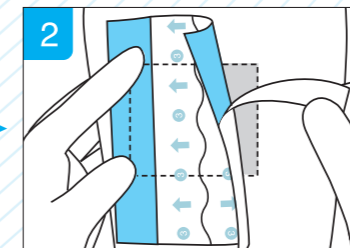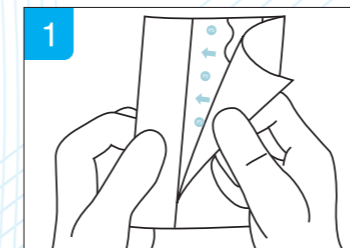

お求めやすいショートタイプもございます。

優肌 パーミロール®

[14R05、14R10、14R15]

