

規格



貼り方動画



優肌 パーミエイド® ピロー

品番	サイズ	入数/化粧箱	入数/外箱	JAN コード
1206 【ピロータイプ】	6cm×7cm	50 枚	6 箱	4976006713021

※一般医療機器 カテーテル被覆・保護材  
JMDNコード 70444000 届出番号：13B1X00203000011

優肌 パーミエイド® IV

品番	サイズ	入数/化粧箱	入数/外箱	JAN コード
1204 【スクエアタイプ】	4cm×5cm	100 枚	5 箱	4976006713038
1207 【スクエアタイプ】	6cm×7cm	100 枚	6 箱	4976006713045
1267v 【Vカットタイプ】	6cm×7cm	100 枚	6 箱	4976006713052
1210 【オーバルタイプ】	10cm×12cm	50 枚	5 箱	4976006713069

※一般医療機器 カテーテル被覆・保護材  
JMDNコード 70444000 届出番号：13B1X00203000010

Nitto

Innovation for Customers

優肌 パーミエイド®  
シリーズ

優肌 パーミエイド® IV  
優肌 パーミエイド® ピロー

P  
E  
R  
M  
E  
-  
A  
I  
D  
®  
S  
E  
R  
I  
E  
S



優肌 パーミエイド®



品番	サイズ	入数/化粧箱	入数/外箱	JAN コード
1409	6cm×9cm	100 枚	5 箱	4976006711812
1410	8cm×10cm	50 枚	6 箱	4976006711973
1413	10cm×13.5cm	50 枚	6 箱	4976006711829
1425	10cm×25cm	20 枚	6 箱	4976006711980

※一般医療機器 カテーテル被覆・保護材(救急絆創膏)  
JMDNコード 70444000(34864000) 届出番号：13B1X00203000001

●パーミエイド、PERME-AID は日東電工(株)の登録商標です。  
◆このカタログに記載の内容は、改良などの理由により、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

使用上のご注意  
●詳細については添付文書をご参照ください。

●お問い合わせは  
株式会社ニトムズ  
TEL 0570-007-006 FAX 0120-210-679

●このカタログの内容は 2019 年 5 月現在のものです。

株式会社ニトムズ



株式会社ニトムズ

# すべては「優しさ」から。 カテーテル固定に「安心」「安全」「安定」を お届けします。

特長ある形状と定評ある優肌®ゲル粘着剤により、肌への優しさと固定力を両立させました。  
「パーミエイド® ピロー」はクッション材と一体化することで、カテーテルロック部による皮膚への負担を軽減させつつ、高い作業性と確実な操作性を実現しました。

## 優肌®粘着剤=角質保護システム®(Skin Protection System)の使用により フィルム交換時の角質剥離によるかぶれを軽減

角質保護システム®(Skin Protection System)は貼付・剥離による物理的な刺激(角質層の損傷)を抑えます。従来の粘着剤が貼り替え時に角質層まで剥離し、痛みやかぶれの原因となるのに対し、角質保護システム®(Skin Protection System)は軟らかく皮膚の凹凸になじみやすく、優しく剥離することができます。

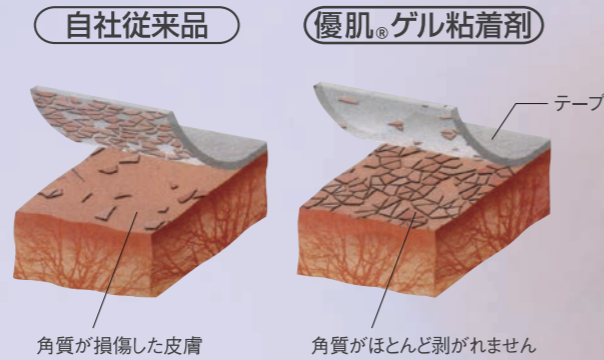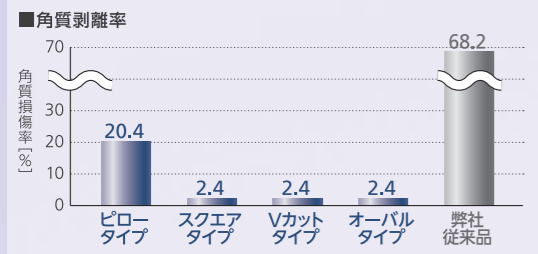

## フィルム周囲に不織布テープをつけることで 安定したカテーテル固定を実現

通常のアクリル粘着剤を使用したドレッシングフィルムと比較し 2~3 倍の抜去抵抗性を実現。安全面においても大きな安心を手に入れました。



## カバーフィルムをなくすことで 操作を簡便にしました

貼付手順もシンプルになり、無駄なゴミを減らします。

## LINE - UP

カテーテルの  
様々なシーンに  
対応できる4タイプの  
新形状をご用意



優肌®パーミエイド®ピロー  
【ピロータイプ】



優肌®パーミエイド®IV  
【スクエアタイプ】



優肌®パーミエイド®IV  
【Vカットタイプ】



優肌®パーミエイド®IV  
【オーバルタイプ】

末梢用

中心静脈用







# 優肌 パーミエイド® ピロー

【ピロータイプ】

「パーミエイド®ピロー」は、  
ロック部分による痛み、  
圧痕をなくしたいという  
医療現場の声から生まれた  
フィルムドレッシングです。

■疼痛・圧痕の調査 (107施設より)

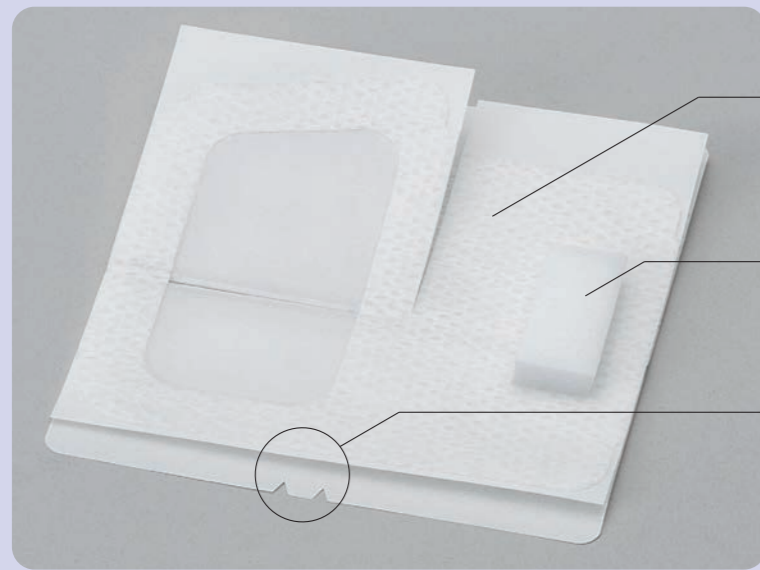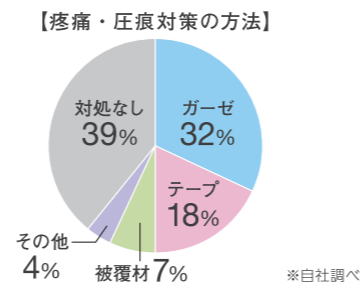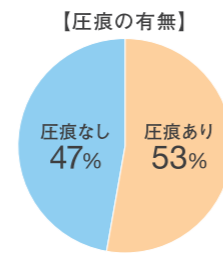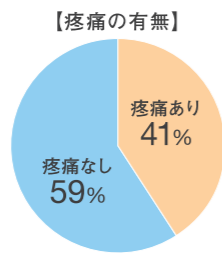

### 不織布部分

補強用不織布テープ(優肌®粘着剤を使用)でフィルム周囲を補強しています。

### ピロー(クッション)

適度な柔らかさを持つフォームを使用することで痛みを緩和、圧痕を軽減します。



### ガイド切り込み

操作手順をわかりやすくナビゲートする切り込みを入れました。

## 痛み・圧痕の緩和

ロック部分による痛み、圧痕を軽減し留置針固定の不快感をやわらげます。

■従来品(イメージ)

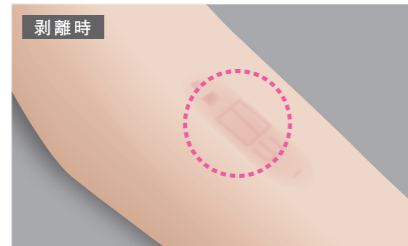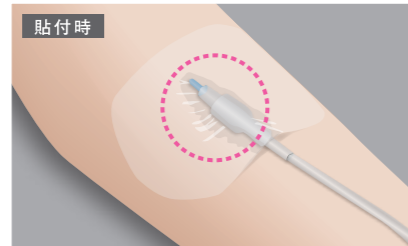

剥離すると、圧痕が見られる場合があります。

■パーミエイド®ピロー




ロック部を浮かすことで、圧痕を最小限に抑えます。

## 固定力の確保

フィルム部分には、固定力の高いアクリル系粘着剤を採用しました。

固定用テープをつけることで、よりしっかりとした固定を実現しました。

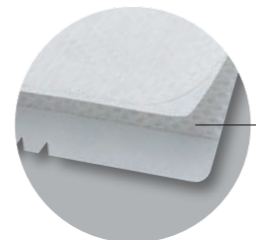

固定用テープ(滅菌済み)  
滅菌済の固定用テープです。

## 末梢用

# 優肌 パーミエイド®ピロー 【ピロータイプ】


(ロック部の緩衝材付)



貼り方動画



### STEP 1 パーミエイドピローをスタンバイします

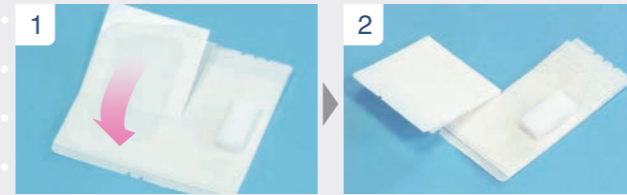

窓部分を矢印の方向に起こして準備します。

### STEP 2 チューブの接続部後方にピローがくるようにセットします



窓部分を起こしたまま、穿刺後、ピロー(クッション材)を接続部の下にもぐり込ませます。




ピローは接続部の後方にセットしてください。

### STEP 3 切り込みの入った剥離紙を順に引き抜き 固定用テープで固定します



剥離紙 [V] を引き抜き、穿刺部を固定します。

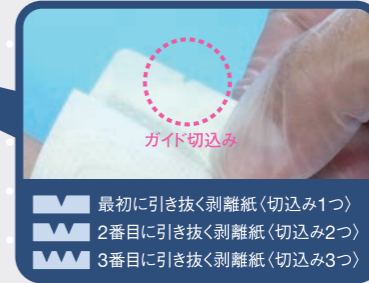

ガイド切り込み

- 最初に引き抜く剥離紙(切り込み1つ)
- 2番目に引き抜く剥離紙(切り込み2つ)
- 3番目に引き抜く剥離紙(切り込み3つ)

穿刺部周囲をしっかりおさえます。



剥離紙 [V] を横方向に引き抜きます。

剥離紙 [V] を横方向に引き抜きます。

1番長い補助テープでクッション材の上を固定します。



2番目に長い補助テープで切れ目の隙間をおさえます。

全体を軽くおさえ、なじませ完成です。



末梢用  
優肌 パーミエイド® IV  
【スクエアタイプ】



STEP 1 剥離紙をはがします



STEP 2 フィルムを置き、剥離紙を引き抜きます



末梢用  
優肌 パーミエイド® IV  
【Vカットタイプ】



STEP 1 剥離紙をはがします



STEP 2 フィルムを置き、剥離紙を引き抜きます



中心静脈用  
優肌 パーミエイド® IV  
【オーバルタイプ】



STEP 1 剥離紙をはがし、引き抜きます



テープのはがし方


◎ 片手でテープを引っ張らない

テープをはがすときは、片手で引っ張らないようにしましょう。皮膚をおさえながら180°折り返すようにはがしましょう。

◎ はがすときはゆっくりと

テープから皮膚をはがすようにゆっくりはがしましょう。

◎ 良い例

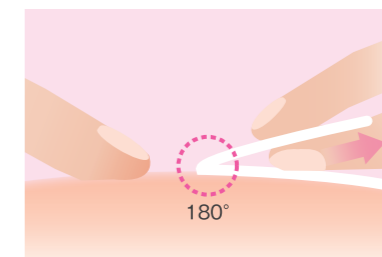

✕ 悪い例

