



日本製

業務用

ジアワイパー0.1

次亜塩素酸ナトリウム0.1%の環境清拭用ワイパー

70枚入

次亜塩素酸
ナトリウム0.1%
調製済



薬剤ボトル



不織布ボトル



パッケージの中に
2つのボトルが
入っています



キャップリニューアル!



取出口が横に広くなり広げやすい
状態でタオルが取り出せます

成分:次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、その他添加剤(界面活性剤等)


用途

- 人の手が触れやすい高頻度接触面の除菌
テーブルやドアノブ・ベッドサイドの除菌
- 汚染された環境表面の清拭
トイレなど汚物が付着した箇所など

使用方法



1 手袋、マスク、ゴーグル、
ガウン(エプロン)等を
着用してください。

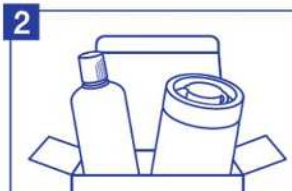

2 箱から
薬剤ボトルと不織布ボトルを
取り出してください。



3 不織布ボトルのフタを外して
内側のアルミフィルムをはがし、
薬剤全量をムラがないように
注ぎます。



4 フタをしっかりと閉め、タオルを
斜めに引き出してご使用ください。
※不織布ボトルは含浸日の記入欄があります。
含浸日を記入してご使用ください。

特長

ポイント

1

薬剤は調製済です。

希釈作業による濃度間違いリスクがありません。

ポイント

2

薬剤を注ぐだけで、すぐに使えます。


濃度調製する手間が削減でき、いつでもすぐに使えます。

ポイント

3

薬剤含浸後4週間は有効塩素濃度1000ppm以上を維持できます。*

薬剤を含浸した日から2週間を目安にお使いください。使用期限は製造より2年です。

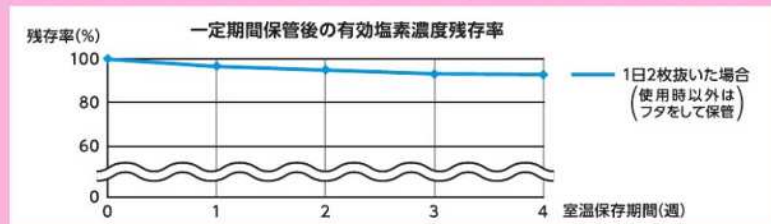

薬剤含浸4週間後も有効塩素濃度1000ppmを維持していました。

※当社実験室内での試験結果によります。(室温)

キャップ

タオル取出し口の中央凸部を表から押し込むと片側が下がり、タオルを通した後、取出し口を裏から押し戻すとタオルが挟まります。



参考資料

1. ノロウイルス発生時

厚生労働省のQ&Aでは、感染者が発生した場合、次亜塩素酸ナトリウム等を使用するように記載されています。

※参考資料：厚生労働省 ノロウイルスに関するQ&A

2. 透析

透析終了後には、ベッド周辺の環境表面に付着した有機物や汚れを除去し、清拭消毒することが推奨されています。その消毒薬の1つとして500～1,000ppm(0.05～0.1%)次亜塩素酸ナトリウムが紹介されています。

※参考資料：透析施設における標準的な透析操作と感染予防に関するガイドライン(五訂版)

【使用上の注意】

- ◆酸性の薬剤と混ぜると有毒ガスが発生しますので、他の薬剤を絶対に混ぜないでください。
- ◆使用する時は、使い捨て手袋、マスク、ゴーグル、ガウン(エプロン)などを着用してください。
- ◆また、液ハネ、液ダレをしないように不織布ボトルはなるべく傾けずにご使用ください。
- ◆同一梱包の薬剤以外は使用しないでください。不織布への浸透性が悪くなり、まんべんなく含浸しないことがあります。
- ◆ご使用時には必ず換気をよくしてお使いください。
- ◆この製品はトイレに流せません。
- ◆乾燥を防ぐため、使用後はフタをしっかりと閉め、できるだけ早く使用してください。
- ◆色物繊維、樹脂やゴム、皮革等、又は材質が不明なものは、変色・変質する恐れがあるため、目立たない所で確かめてから使用してください。
- ◆他容器への入れ替え(誤用の原因や品質が変わる)、使用中の継ぎ足しや、使用後容器の再利用はしないでください。
- ◆液が目や皮膚、衣類につかないように注意してください。
- ◆ステンレス以外の金属は、材質劣化を起こす場合がありますので、使用しないでください。
- ◆高温、多湿および直射日光の当たる場所を避け、清潔な場所に保管してください。
- ◆廃棄時には酸性タイプの製品と混ぜないように注意してください。
- ◆人体には使用しないでください。
- ◆小児の手の届かないところに保管してください。

商品名・規格	寸法 高さ×幅×奥行(mm)	重量	希望小売 価格	梱 入数	品番	JANコード	ITFコード
ジアワイパー0.1 70枚入 基布サイズ 140×250mm	単品 192×164×112	685g	オープン価格	6	42640	4 987603 426405	梱 24987603426409
	梱 210×515×245	7.2kg					

●お問い合わせは

白十字株式会社
〒171-8552 東京都豊島区高田3-23-12

商品情報はこちら

2020.12.5.006 [5M-27]





日本製

次亜塩素酸ナトリウム0.1%の環境清拭用ワイパー

ジアワイパー0.1

詰替用専用液



成分：次亜塩素酸ナトリウム、酸化ナトリウム、その他添加剤（界面活性剤等）

詰替用不織布



調製済専用液を注ぐだけ



ご使用後の
ジアワイパー0.1容器と
併せてご使用ください。

ジアワイパー0.1容器

用途

●人の手が触れやすい高頻度接触面の除菌
テーブルやドアノブ・ベッドサイドの除菌

●汚染された環境表面の清拭
トイレなど汚物が付着した箇所など

使用方法



1 交換前には
手袋をご使用ください。
詰替用不織布を袋のまま
容器に入れ開封します。



2 詰替用不織布の中に詰替用
専用液をムラが無いように
全量を注ぎ切ってください。



3 容器のフタを裏返して
不織布を通します。



4 フタをしっかりと閉め、不織布を
斜めに引き出してご使用ください。
※交換キャップは含浸日の記入欄があります。
含浸日を記入してご使用ください。

特長

ポイント 1 専用液は調製済です。


希釈作業による濃度間違いリスクがありません。

ポイント 2 専用液を注ぐだけで、すぐに使えます。

濃度調製する手間が削減でき、いつでもすぐに使えます。

ポイント 3 専用液含浸後4週間は有効塩素濃度1000ppm以上を維持できます。※

専用液を含浸した日から2週間を目安にお使いください。使用期限は製造より2年です。

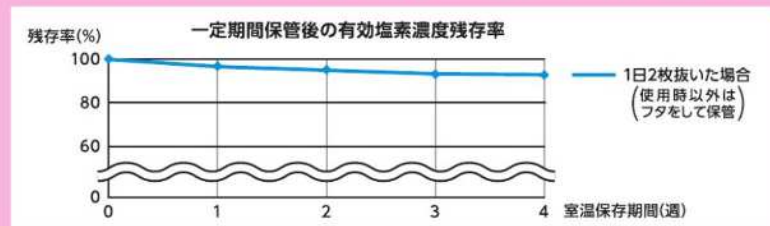

薬剤含浸4週間後でも有効塩素濃度1000ppmを維持していました。

※当社実験室内での試験結果によります。(室温)

キャップ

不織布取出し口の中央凸部を表から押し込むと片側が下がり、不織布を通した後、取出し口を裏から押し戻すと不織布が挟まります。取出し口が横に広くなり広げやすい状態で不織布が取り出せます。



参考資料

1. ノロウイルス発生時

厚生労働省のQ&Aでは、感染者が発生した場合、次亜塩素酸ナトリウム等を使用するように記載されています。

※参考資料：厚生労働省 ノロウイルスに関するQ&A

2. 透析

透析終了後には、ベッド周辺の環境表面に付着した有機物や汚れを除去し、清拭消毒することが推奨されております。その消毒薬の1つとして次亜塩素酸ナトリウムが紹介されております。

※参考資料：透析施設における標準的な透析操作と感染予防に関するガイドライン(五訂版)

商品名・規格	寸法 高さ×幅×奥行(mm)	重量	希望小売 価格	梱 入数	品番	JANコード	ITFコード
ジアワイパー0.1 70枚入 基布サイズ 140×250mm 次亜塩素酸ナトリウム 350mL	単品 192×164×112	685g	オープン 価格	6	42640	4 987603 426405	梱 24987603426409
	梱 210×515×245	7.2kg					
ジアワイパー0.1 詰替用不織布 70枚 6個入 基布サイズ 140×250mm	単品 178×257×167	729g	オープン 価格	3	42641	4 987603 426412	梱 14987603426419
	梱 199×528×271	2.7kg					
ジアワイパー0.1 詰替用専用液 6本入 次亜塩素酸ナトリウム 350mL	単品 198×202×137	2,540g	オープン 価格	3	42642	4 987603 426429	梱 14987603426426
	梱 219×439×211	8.0kg					

●お問い合わせは

白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田3-23-12

商品情報はこちら

22710-M01

