

DELTA-DRY® SOFTLINER

デルタドライ® ソフトライナー

デルタドライ®ソフトライナーは特許取得の耐水パッド付き下巻きチューブ包帯です。衛生的で患者様に安心してご使用いただけます。オープンニット構造がキャストを水に浸した際の排水を加速させ、その後90分で、患者様の体温により残った水分がパッドのエアメッシュと弊社のポリエステルキャストテープを通してすばやく蒸発します。ドライヤーの冷風を使用し乾きを加速させることも可能です。

デルタドライ®は高い品質と技術で患者様のQOLを維持します。

利点

- 耐水パッド付き下巻き包帯によりシャワーや水泳なども可能
- すばやく乾燥 – 装着から90分で乾きます –
- 皮膚のふやけ、かゆみ、臭いを低減
- 材質の組み合わせにより実現された柔らかいクッションと快適なつけ心地
- 経済的、且つ装着が簡単
- キャスト固定時の皮膚への合併症を低減し、キャストの交換回数を最小限に留めます。



やけど注意


デルタドライ®ソフトライナーを使用後、ギブスカッターをお使いの際に発熱の恐れがあります。ギブスカッターをご使用の際は、必ずジップスティック(21ページ)を使用してください。

装着

- デルタドライ®ソフトライナーは合成キャストテープの下に使用します。骨突出部は、皮膚を保護するために追加のパッドや二重のソフトライナーが必要な場合があります。
- 患部に最適な幅のライナー(締め付けないサイズ)を選択します。
- 希望の長さにライナーをカットし、患者様の患部にはめます。
- 必要なライナーの長さの両端から3センチ長さになるように袖口は折り返し、キャスト材の最後の層で固定します。
- 腕・手首への装着の際は、親指用にソフトライナーに切り込みを入れます。舟状骨に対する装着の際は、親指の保護のためデルタドライ®ソフトライナーを親指の周りに巻きます。
- キャストテープを巻きます。

*水分の蒸発量測定結果 (MTVR)

Amount of water that is able to pass through 1, 2 or 3 layers of padding

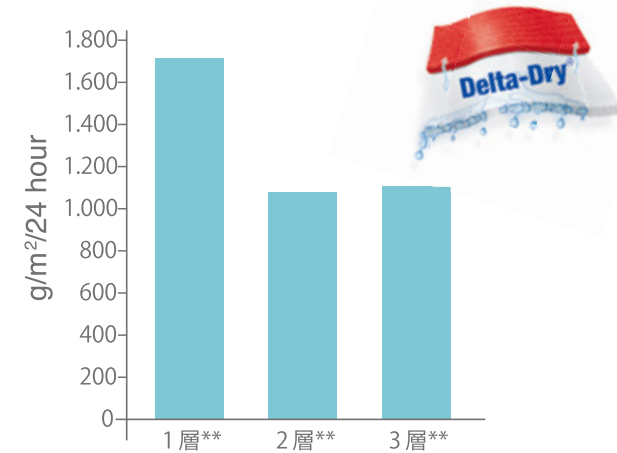

**この結果は特定の管理下に置かれた測定結果での数値のため、実際の使用環境での数値とは 多少の誤差が生じます。

デルタドライ®を使用した臨床経験

WE Wilson, Children's Orthopedics of Atlanta at Children's Healthcare of Atlanta (アトランタ小児整形外科)

米国ジョージア州、アトランタ、2007年10月

目的: 若い活発な子供たちの入浴、シャワー、水泳、手洗いの際におけるガラス繊維キャストとデルタドライ®耐水パッドの使用に対する評価。(n=13, 年齢: 6~16歳, 対象: 上肢骨折患者, 期間: 4~6週間)

観察結果:

- ほぼ全ての患者がデルタドライ®耐水パッドが1時間以内に乾いたと報告
- 臨床医は皮膚状態を「良好」から「大変良好」と評価
- デルタドライ®によるギブスカッターの熱の軽減により、キャストの取り外しが快適と臨床医が評価

SJ Oweida et al., Oweida and Christian Orthopedics and Sports Medicine Practise(オウエーダ&キリスト教整形外科)

米国ノースカロライナ州、シャーロット、2008年6月 – 2009年5月

目的: 手洗い、シャワー、入浴等の日常的な衛生管理におけるデルタドライ®耐水パッドとガラス繊維キャストの使用に対する評価。(n= 20, 年齢: 17ヶ月~61歳, 対象: 様々な傷害患者: 75%前腕用キャスト, 10%上肢用キャスト, 5%母指CM関節キャスト, 10%短下肢キャスト)

観察結果:

- 取り外し時の皮膚状態を「良好」から「大変良好」と臨床医が評価
- 濡らした約1時間後には製品が乾いたと患者が報告
- 臨床医はデルタドライ®の全体的品質を1=「大変良い」から5=「悪い」の5段階評価のうち1.2と評価



品番	製品規格 (幅 × 長さ)	種類	1 箱入数
DELTA-DRY® SOFTLINER - デルタドライ® ソフトライナー			
7277901	2.5 cm x 10 m	1号	1ロール
7277902	5.0 cm x 10 m	2号	1ロール
7277903	7.5 cm x 10 m	3号	1ロール
7277904	10.0 cm x 10 m	4号	1ロール
7277905	12.5 cm x 10 m	5号	1ロール