

YUTOKU

【届出番号】

ブラッドバンプレスパッド フィット 41B2X00001000018

ブラッドバンプレスパッド Plus 41B2X00001000016

滅菌済 再使用禁止

事後処置用パッド付絆創膏

一般医療機器(クラスI) 救急絆創膏 34864000

ブラッドバン® プレスパッド フィット ブラッドバン® プレスパッド Plus



つまみやすい
タブ付きライナー

はがし口

不織布パッド
(厚さ3mm)

【禁忌・禁止】
再使用禁止

ブラッドバンプレスパッドシリーズの特徴

◎ 貼りやすく、はがしやすい工夫

- ・タブ付きライナー…パッドおよび粘着面に触れることなく、ワンタッチで貼付できます。
- ・はがし口…使用後は簡単にはがすことができます。

◎ パッドに厚さ3mmの複合不織布を使用

適度な圧迫性と吸水性があり、穿刺部を保護します。



◎ 滅菌済み及び個包装のため衛生的

EOG（エチレンオキサイドガス）滅菌済み及び個包装のため衛生的です。

◎ 目的に応じた2タイプ（※右ページ参照）

「しっかり付着する固定タイプ」と「肌に優しい低刺激性タイプ」の2種類の製品があります。

構造上の工夫

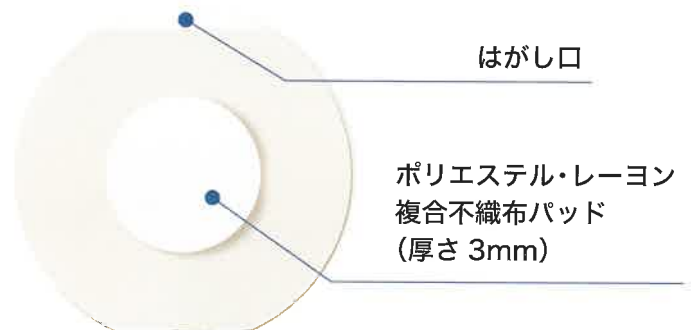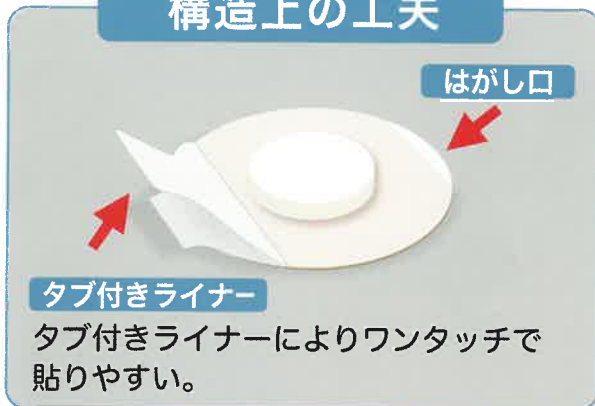

本品は、アクリル系粘着剤を塗布した不織布粘着テープと、吸水性に優れた不織布パッドからなる止血用ドレッシング材です。

	ブラッドバンプレスパッド フィット	ブラッドバンプレスパッド Plus
特徴	しっかり付着する固定タイプ	肌に優しい低刺激性タイプ
粘着力	高 (Plus の約2倍)	中
支持体	ポリエチレン不織布	ナイロン不織布
膏体	アクリル系粘着剤	アクリル系ゲル粘着剤（「優肌」ゲル）
パッド	ポリエステル・レーヨン複合不織布パッド	
滅菌	EOG（エチレンオキサイドガス）滅菌済	
有効期間	3年（自己認証による）	

しっかり付着する固定タイプ

支持体

ポリエチレン不織布

膏体

アクリル系粘着剤


ブラッドバン® プレスパッド フィット

しっかりと付着するため、採血だけでなく関節穿刺などにも最適です

- やわらかいポリエチレン不織布の支持体が屈曲部位にもフィットします。
- 粘着力を高めたアクリル系粘着剤により、しっかりと付着します。
- アルコール消毒後でも粘着力が低下しません。

プローブタック試験

製品の粘着面とステンレス製のプローブを接触させ、プローブを粘着面より引き離した際に要した力をプローブタック値 (N/cm²) とした。プローブは消毒用エタノールで清拭しなかったもの (消毒なし) と清拭したもの (消毒あり) を用いた。ブラッドバンプレスパッドフィット及びブラッドバンプレスパッド Plus はいずれも、消毒の有無で粘着力に大きな差はなかった。

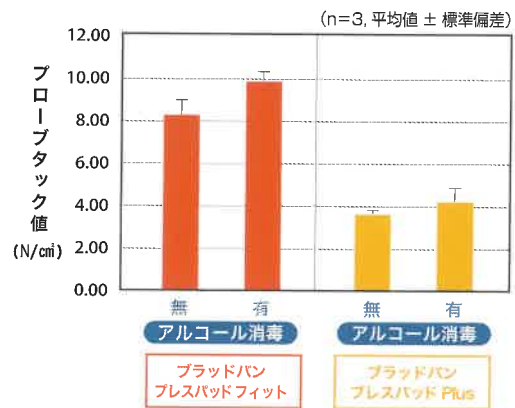

祐徳薬品工業株式会社 社内試験

肌に優しい低刺激性タイプ

支持体

ナイロン不織布

膏体

アクリル系ゲル粘着剤

ブラッドバン® プレスパッド Plus

肌に優しいため、皮膚の弱い方や血液透析の方などに最適です


- はがす時の刺激を軽減した「優肌」ゲル粘着剤が角質層を守ります。
- アルコール消毒後でも粘着力が低下しません。

「優肌」ゲル粘着剤の角質保護のメカニズム

はがす時の刺激を軽減して角質層を守ります。

「優肌」ゲル粘着剤は、貼付・剥離による物理的な刺激 (角質層の損傷) を抑えます。従来の粘着剤が貼りかえ時に角質層まではがれ、痛みやかぶれの原因となるのに対し、「優肌」ゲル粘着剤は柔らかく皮膚の凹凸になじみやすく、優しくはがすことができます。

日東電工株式会社 技術資料より抜粋

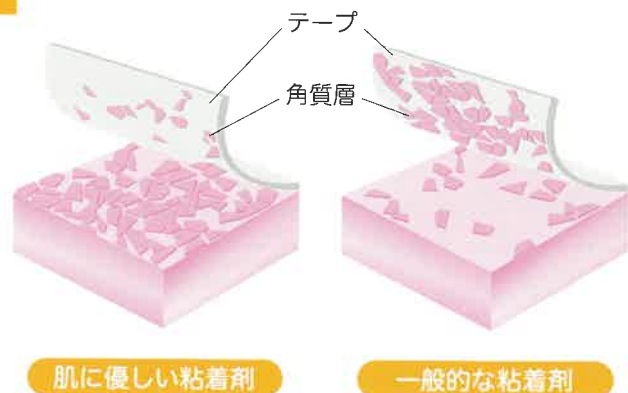

※優肌®は日東電工株式会社の登録商標です。

ブラッドバンプレスパッドシリーズの貼り方・はがし方



① タブ付きライナーごとつまんで取り出します。

② 穿刺部にパッドをあて、テープを貼付します。

③ タブ付きライナーを取り除き全体をしっかりとおさえます。

はがす時 はがし口をつまみ、はがしてください。

【使用目的又は効果】

傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。

【使用方法等】

- ・ 静脈注射、採血、予防注射後の被覆保護
 - ・ 関節穿刺後の被覆保護
- 包装を開いて本品を取り出し、穿刺部にパッドをあてて周りのテープでしっかり固定してください。

【保管方法】

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて、室温で保管してください。

【有効期間】

3年（自己認証による）

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 本品の使用中に、創部に感染又は皮膚障害（発疹・発赤、かゆみ等）と思われる症状が現れた場合は、使用を中止し、適切な治療を行ってください。
- 2) 本品の使用中に、濡れたり汚れたりした場合や、血液や滲出液などのにじみが見られた場合は、直ちに新しいものと貼りかえてください。

2. その他の注意

- 1) 包装に汚れや破損、水濡れなどがあるものは使用しないでください。
- 2) 開封後は、直ちに使用してください。
- 3) 使用後は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくり剥がしてください。

販売名	サイズ	箱（幅×奥×高・重量）	JANコード
	包装		
ブラッドバン® プレスパッド フィット	直径 36 mm (パッド直径 16 mm)	(226×145×80mm・202g)	 4 987235 011369
	200 枚 (1 枚/袋 × 200 袋)		
ブラッドバン® プレスパッド Plus	直径 36 mm (パッド直径 16 mm)	(226×77×80mm・107g)	 4 987235 011208
	100 枚 (1 枚/袋 × 100 袋)		