

デフォッガー 内視鏡用くもり止め



特 徴

- 溶液はくもり止め効果に優れ、内視鏡レンズのくもり、結露の発生を防ぎ視界をクリアに保ちます。
- 引火しにくい含有率のイソプロピルアルコール/界面活性剤成分のため引火、火災の危険性はありません。
- スポンジはシール付なので患者ドレープ等に貼りつけて使用できます。
- 開け易いフリップキャップです。
- ボトルは 1 滴ずつ滴下するドロップ構造です。
- 容量が 6 g あるので長時間の使用に対応できます。
- 放射線滅菌済

使用方法

1. デフォッガーのスポンジのシールを剥がし、ドレープ等の使いやすいエリアに貼り付けてください。
2. デフォッガー溶液を数滴スポンジに滴下します。
3. 内視鏡レンズをスポンジ部分でこすって溶液をつけてください。(スポンジはレンズを傷つけません。)
4. 溶液が乾いて来ましたら、再度溶液をスポンジに滴下してください。
5. 手技が終わりましたらスポンジ、溶液は廃棄して下さい。

品 番	商品名	仕 様	包 装
28-0102	デフォッガー 内視鏡用くもり止め	内容量 6g	20本/箱

一般的名称：自然開口向け内視鏡用くもり止め

医療機器届出番号：13B1X00008000031

製造販売元
株式会社 **フジメディカル**

〒160-0004
東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F
TEL 03-3356-8377 FAX 03-3356-8380
[http:// www.fuji-medical.co.jp](http://www.fuji-medical.co.jp)

販売代理店