

タケトラ® ニトリル手袋

- 伸縮性、耐水性、薬剤耐性に優れた合成ゴム素材
- 指先の滑り止め加工により、様々な環境で高いグリップを発揮
- テープが付きにいため、作業性が向上
- ラテックスフリー（ラテックスアレルギーの心配がない）
- パウダーフリー（パウダーによる手荒れがない）

タケトラ® ニトリル手袋

規格ごとに色分けされた箱で
使いたいサイズを一目でセレクト



ホワイト



薄手
200 枚入

指先の厚み：約 0.08~0.12
掌の厚み：約 0.06~0.10
(単位：mm)

長さ
240mm

ブルー



ホワイト



ブルー

様々な処置や検査に使える
レギュラータイプ

商品番号	規格(全長×手のひらの幅)	定価	JAN CODE
075811	ホワイト SS 240mm× 78mm 200 枚入	オープン	4958995758115
075812	ホワイト S 240mm× 85mm 200 枚入		4958995758122
075813	ホワイト M 240mm× 97mm 200 枚入		4958995758139
075814	ホワイト L 240mm×106mm 200 枚入		4958995758146
075851	ブルー SS 240mm× 78mm 200 枚入	オープン	4958995758511
075852	ブルー S 240mm× 85mm 200 枚入		4958995758528
075853	ブルー M 240mm× 97mm 200 枚入		4958995758535
075854	ブルー L 240mm×106mm 200 枚入		4958995758542

タケトラ® ニトリル手袋ロング



長さ
295mm

通常サイズよりも
5.5cm 長い
ロングタイプ

規格ごとに色分けされた箱で
使いたいサイズを一目でセレクト

厚手
100 枚入

指先の厚み：約 0.13~0.15
掌の厚み：約 0.10~0.11
(単位：mm)



ガウンの
袖口も覆える
ロングタイプ



商品番号	規格(全長×手のひらの幅)	定価	JAN CODE
075841	SS 295mm× 76mm 100 枚入	オープン	4958995758412
075842	S 295mm× 84mm 100 枚入		4958995758429
075843	M 295mm× 94mm 100 枚入		4958995758436
075844	L 295mm×105mm 100 枚入		4958995758443

物性データ

タケトラ®ニトリル手袋 タケトラ®ニトリル手袋ロング

	テスト	目的	規格	結果
物理的特性	引張り強度 ASTM D6319	グローブを引っ張り、破断時の強度を評価します。	4.0 AQL [老化前] ≥ 14.0MPa [老化後] ≥ 14.0MPa	4.0 AQL [老化前] ≥ 14.0MPa : 合格 [老化後] ≥ 14.0MPa : 合格
	最大伸長度 ASTM D6319	グローブを引っ張り、裂けるまでの最大の伸びを評価します。	4.0 AQL [老化前] ≥ 500% [老化後] ≥ 400%	4.0 AQL [老化前] ≥ 500% : 合格 [老化後] ≥ 400% : 合格
	ニトリル手袋：厚み ASTM 3767 ロング：厚み ASTM 6319	測定器を用い、指定された圧力を加えて指先、掌部分の厚みを測定します。	4.0 AQL [指先] ニトリル手袋 0.10±0.02mm ロング 0.08±0.02mm ≥ 0.05mm	4.0 AQL [指先] ニトリル手袋 0.10±0.02mm : 合格 ロング 0.08±0.02mm : 合格 ≥ 0.05mm : 合格
	ニトリル手袋：長さ ASTM 3767 ロング：長さ ASTM 6319	測定器を用い、指先から袖口までの長さを測定します。	4.0 AQL ニトリル手袋：≥ 240mm ロング：≥ 300±10mm	4.0 AQL ニトリル手袋：≥ 240mm : 合格 ロング：≥ 300±10mm : 合格
	パウダー残留量 ASTM 6124	グローブ表面に残留するパウダー量を測定します。	<2mg	<2mg : 合格
	水漏れ ASTM D5151	グローブのピンホール(ごく小さい穴)の有無を調べるため、水を入れて漏れないか評価します。	2.5AQL	1.5AQL : 合格
感刺作激性と	一次皮膚刺激 ISO-10993-10	グローブが接触する皮膚への刺激について評価します。	0~0.4 : 無刺激性	0 : 無刺激性
	感作性試験 ISO-10993-10	グローブからの抽出物による皮膚感作について評価します。	0 : 目に見える変化なし	0 : 目に見える変化なし
バリア性	耐薬品性 EN16523-1 37% Formaldehyde	ホルムアルデヒドに対する防護性能を確認します。	—	480 分まで浸透せず (CLASS6)
	耐薬品性 EN16523-1 40% Sodium hydroxide	水酸化ナトリウムに対する防護性能を確認します。	<1	<1 : 合格
	血液由来病原体透過性 ASTM F1671	グローブに、血液由来病原体が、透過しないかを評価します。	—	240 分まで浸透せず
	抗がん剤耐性 ASTM D6978-05 Cyclophosphamide(Cytoxan), 20mg/ml	抗がん剤 [一般名:シクロホスファミド (エンドキサン)] に対する防護性能を確認します。	—	240 分まで浸透せず
	抗がん剤耐性 ASTM D6978-05 Dacarbazine(DTIC), 10.0mg/ml	抗がん剤 [一般名:ダカルバジン (ダカルバジン)] に対する防護性能を確認します。	—	240 分まで浸透せず
	抗がん剤耐性 ASTM D6978-05 Fluorouracil, 50.0mg/ml	抗がん剤 [一般名:フルオロウラシル (5-FU)] に対する防護性能を確認します。	—	240 分まで浸透せず
	抗がん剤耐性 ASTM D6978-05 Methotrexate, 25mg/ml	抗がん剤 [一般名:メトトレキサート (メトトレキサート、リウマトレックスなど)] に対する防護性能を確認します。	—	240 分まで浸透せず
	抗がん剤耐性 ASTM D6978-05 Vincristine Sulfate, 1.0mg/ml	抗がん剤 [一般名:硫酸ビンクリスチン (オンコビン)] に対する防護性能を確認します。	—	240 分まで浸透せず
	抗がん剤耐性 ASTM D6978-05 Paclitaxel(Taxol), 6.0mg/ml	抗がん剤 [一般名:パクリタキセル (タキソール)] に対する防護性能を確認します。	—	240 分まで浸透せず
	抗がん剤耐性 ASTM D6978-05 Etoposide(Toposar), 20.0mg/ml	抗がん剤 [一般名:エトポシド (ペプシド、ラストテットなど)] に対する防護性能を確認します。	—	240 分まで浸透せず
	抗がん剤耐性 ASTM D6978-05 Doxorubicin Hydrochloride.2.0mg/ml	抗がん剤 [一般名:ドキシロビン塩酸塩 (ドキシル、アドリアシンなど)] に対する防護性能を確認します。	—	240 分まで浸透せず
	抗がん剤耐性 ASTM D6978-05 Mitomycin C, 0.5mg/ml	抗がん剤 [一般名:マイトマイシン C (マイトマイシン)] に対する防護性能を確認します。	—	240 分まで浸透せず
	抗がん剤耐性 ASTM D6978-05 Cisplatin, 1.0mg/ml	抗がん剤 [一般名:シスプラチン (アイエーコール、プリプラチン、ラングなど)] に対する防護性能を確認します。	—	240 分まで浸透せず

発売元



株式会社 竹虎®

<https://www.taketora-web.com/>

【メディカル事業部】

東日本営業部 〒231-0017 神奈川県横浜市中区港町 2-6-8 横浜関内ビル
TEL.045 (680) 0308 (代) FAX.045 (680) 0312

西日本営業部 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町 10-35 江坂南口第二ビル
TEL.06 (6386) 7217 (代) FAX.06 (7175) 7101

取扱店