

JMS

Jフィット グローブ

検診用手袋は、新世代へ！



検診用手袋は、新世代へ！

Jフィット グローブは、ポリ塩化ビニル製でありながら、
柔らかく、伸縮性に富み、手にフィットします。

Jフィット グローブ

製品特徴

- **高い安全性、AQL1.5（※水密性ピンホール試験）の実現**
日本ではJIS規格（AQL2.5）が定められており、Jフィット グローブは更に高い基準の「AQL1.5」を実現、製品化しました。
- **優れた指先感触&フィット性**
柔らかく、且つ伸縮性を有しているため、手にフィットし、幅広い手技に対応します。
- **ラテックスフリー**
I型アレルギーの原因となる天然ゴムラテックスを含みません。
- **パウダフリー**
パウダーを使用していないので、合併症や皮膚炎のリスクを低減させます。
- **めくれ上がり防止カフ**
ビート付カフにより、めくれ上がりを防止します。
- **クリーンカラー**
従来のポリ塩化ビニル製手袋にはない清潔なイメージのカラー：ホホワイトを採用しています。

仕様

品番	サイズ	JANコード
JG-JVSSX	SS	4987494243570
JG-JVSX	S	4987494243587
JG-JVMX	M	4987494243594
JG-JVLX	L	4987494243600

販売名：Jフィット グローブ
医療機器届出番号：34B1X00001000091
梱包単位：150枚×10箱=1,500枚

使用上の注意

- かゆみ、かぶれ、発疹等の症状が現れた場合には使用を中止して下さい。又、その後の使用に際しては慎重を期して下さい。（体質により上記の症状が現れることがあります。）
- 包装が破損、汚損している場合、及び製品に破損、変形、ピンホール等の異常が認められる場合は使用しないで下さい。
- 薬品、溶剤によっては膨潤したり、浸透したりする可能性があるため、確認の上、使用して下さい。
- 手袋の主材料であるポリ塩化ビニルは高い熱により破損する可能性があるため、60℃以上の熱いものに触れないで下さい。
- 使用時に本品が破れた場合には、新しい製品に交換して下さい。
- 使用後は感染防止に配慮して安全な方法で処分して下さい。
- 刃物等の鋭利な器具に触れると、破れたり穴があいたりする可能性があるため、注意して下さい。
- ご使用に際しては、添付文書をお読み下さい。
本品における試験結果等の詳細については、別途お問い合わせ下さい。

水密性試験

	検査水準	AQL
JIS T 9116 : 2000	S-4	2.5
最終出荷時	S-4	1.5

※

手袋の品質管理とAQL（合格品質水準）

AQL は、Acceptable Quality Level の略称であり、受け入れられる不良率の上限を数値で示しています。手袋の製造工程内や最終製品において、品質を管理・確認するため、各種検査を実施しています。手袋の品質に関し、JIS規格では手袋の寸法や水密性（ピンホール試験）、性能に対し、性能値や検査水準、AQLを定めています。

JIS規格では、ピンホール不良に対するAQLは、検査、検診用手袋の場合2.5と規定されていますが、JMSではより厳しい水準（出荷時AQL1.5）を設定し、より品質の高い製品を供給すべく努めています。



製造販売業者
株式会社 ジェイ・エム・エス

〒730-8652 広島市中区加古町12番17号
<https://www.jms.cc/>

■ カスタマーサポートセンター

0120-923-107（受付時間 9:00～17:00）

2014.06.10XA169-LP
2022.02.01XA169-JMS