



**MOGU®**  
FEEL CONSCIOUS

体圧分散 体勢保持 体位変換

# 体位変換に使いやすい筒型クッションロング

本体 本体価格 **4,500円** [税込4,950円(10%)] | 専用カバー 本体価格 **3,000円** [税込3,300円(10%)]

専用すべりにくいカバー 本体価格 **4,000円** [税込4,400円(10%)]

長い筒型でパウダービーズ®が、上半身から下半身まで広く体圧を分散します。  
体位変換にも役立つクッションで専用カバー(別売)を使えば  
耐久性もアップします。



※「体位変換に使いやすい筒型クッションロング専用すべりにくいカバー」の色は、「オレンジ・緑・青・茶」のみです。

MOGU®  
体位変換に使いやすい筒型クッションロング(本体)  
[約幅18cm×長88cm]

JAN code	赤	オレンジ	緑	青	茶
	4540323018109	4540323018116			
	4540323018123	4540323018130			
	4540323018147				

MOGU®  
体位変換に使いやすい筒型クッションロング専用カバー  
[約幅18cm×長88cm]

JAN code	赤	オレンジ	緑	青	茶
	4540323018154	4540323018161			
	4540323018178	4540323018185			
	4540323018192				

MOGU®  
体位変換に使いやすい筒型クッションロング専用  
すべりにくいカバー [約幅18cm×長88cm]

JAN code	オレンジ	緑	青	茶
	4540323019083	4540323019090		
	4540323019106	4540323019113		

●組成 / ナイロン85%、ポリウレタン15% / 中材 / ポウダービーズ。(発泡ポリスチレン) / カバー: ナイロン85%、ポリウレタン15% / すべりにくいカバー: ポリエステル90%、ポリウレタン10%  
●重量 / 本体: 約1,080g / カバー: 約110g ●日本製

体位変換に使いやすい筒型クッションロングで  
様々な体位をサポートします。

## 側臥位から腹臥位への「体位変換」



体位変換に使いやすい筒型クッションロングの厚みを変えながら、姿勢を少しずつ移動させていくことで、側臥位から腹臥位への体位変換が可能です。

※骨突出部には、他のクッションと併用する必要があります。




体位変換に使いやすい筒型クッションロングを真ん中から半分に折り、山の形にして頭から肩、腕にかけて挟み込むことで、上半身を起こした時の支えとして使用できます。

ビーズを移動させて  
小さな体位変換が  
行えます

### 褥瘡予防のための体位変換スケジュール

⚠ 2時間を目安に、体位変換をする必要があります。体位変換スケジュール表を掲示し、原則として2時間に1回、一定の骨突出部上の圧を完全に排除する必要があります。

⚠ 体位変換等で引っ張る際は使用する人の肌の状態に注意してください。場合によっては褥瘡などの症状を悪化させることがあります。

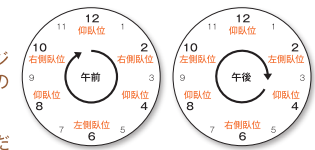

体位変換スケジュール表例