



## 医療用マスク JIS 規格クラスII 適合

日本産業規格 JIS T 9001 医療用マスククラスII M22109027		<b>使用上の注意</b> ● 使用中に発疹・皮膚炎等の過敏症状が現れた場合にはご使用を中止して下さい。 ● 使用中に臭いで気分が悪くなった場合は直ちに使用を中止して下さい。 ● 本品は使い捨て商品ですので洗濯などの再使用はできません。 ● 火気のそばでの使用はお避け下さい。 ● 有害な粉塵やガス等が発生する場所やそれを防ぐ目的での使用を禁止する。															
<table border="1"> <tr> <td>試験項目</td> <td>PFE</td> <td>BFE</td> <td>VFE</td> <td>可燃性血液/ウイルス安全衛生</td> </tr> <tr> <td>性能</td> <td>≧98%</td> <td>≧98%</td> <td>≧98%</td> <td>(呼吸) 16.0kPa・透気性</td> </tr> <tr> <td>適合判定</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </table> <p>PFE:微小粒子捕集効率 BFE:バクテリア飛まつ捕集効率 VFE:ウイルス飛まつ捕集効率</p>			試験項目	PFE	BFE	VFE	可燃性血液/ウイルス安全衛生	性能	≧98%	≧98%	≧98%	(呼吸) 16.0kPa・透気性	適合判定	○	○	○	○
試験項目	PFE	BFE	VFE	可燃性血液/ウイルス安全衛生													
性能	≧98%	≧98%	≧98%	(呼吸) 16.0kPa・透気性													
適合判定	○	○	○	○													

**JIS**

**使用方法**

①

ノーズフィットを鼻型に合わせて手で曲げていきます。

②

鼻にあてたノーズフィットを押さえながら耳にゴムひもをかけます。

③

鼻と口を覆うようにブリーツを広げ、あごの下まで伸ばします。

(一社)日本衛生材料工業連合会からの環境情報はこちら  
[https://www.jhpiea.or.jp/about/environ\\_info/mask/](https://www.jhpiea.or.jp/about/environ_info/mask/)

**アポロ衛材株式会社**  
 〒599-0301 大阪府泉南郡岬町淡輪4391番地  
 MADE IN JAPAN

# サージカルマスクAP 50枚入

3層式不織布マスク (ケース入数 40箱)

### 【国産マスク発売への思い】

- ・ 現在国内に於いて新型コロナウイルスは収まりつつありますが今後再拡大の懸念もあり加えてインフルエンザ等の感染症対策を講じなければならない状況になっています。一昨年海外からの輸入が止まり製品が市場から無くなったとき国内サプライチェーンの再構築を国策で行いました。このマスク発売の経緯にはこの様な意味がございます。

### 【品質】

- ・ 全国マスク工業会会員マーク表示適合品
- ・ 日本産業規格 JIST9001 医療用マスク クラスII M22109027



**アポロ衛材株式会社**

TEL072-494-3234 FAX072-494-3196