

ニチバン

ハイコロール™

HYCOROLL™



褥瘡、医療関連機器圧迫創傷 (MDRPU) 対策などにおける皮膚の保護に
ストーマ装具の面板外周部の補強等に

摩擦、ずれの軽減

長時間の貼付でも溶けにくい


貼付部位を観察しやすい

必要な長さに切れるから、
使いやすい




手軽に、気軽にハイドロコロイド

医療機器による外力低減ケアや皮膚保護に

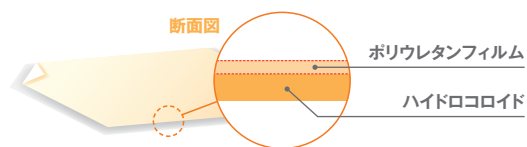

摩擦、ずれの軽減

表面が縦、横どちらの方向にもすべりやすいため、摩擦やずれを軽減し、皮膚へのダメージを防ぎます。褥瘡がしやすい骨突出部の保護に。

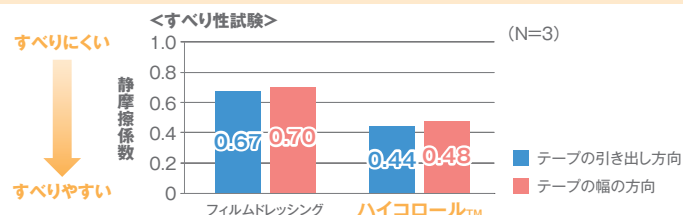

長時間の貼付でも溶けにくい

溶けにくいハイドロコロイドのため、皮膚に残留しにくく、拭き取る手間が省けます。溶けにくいため、入浴してもはがれにくいです。

＜溶解性・防水性試験＞



赤いインクを染み込ませた紙の上からハイコロール™を貼って40℃の水につけ、1日目・3日目の変化を観察

テープ周囲がほぼ溶解せず、浸水しにくいため、インク部分にもじみが少ない。

貼付部位を観察しやすい

透明性が高いため、貼付中の皮膚の観察が可能です。時間が経っても白く濁りにくいため、透明性を維持します。

何も貼っていない状態




ハイコロール™を貼った状態




※掲載データ：すべて社内データであり、保証値ではありません


使用例

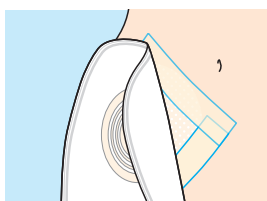


ストーマ装具の面板外周部の補強に

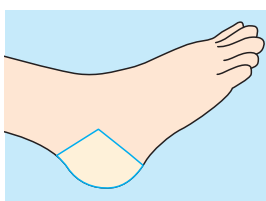

皮膚保護に

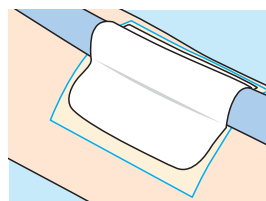

テープの下地に

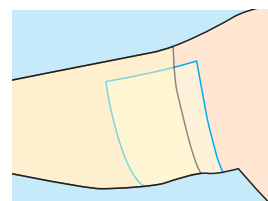

弾性ストッキングなどの医療機器による外力低減ケアに

用途

- 褥瘡、医療関連機器圧迫創傷 (MDRPU) 対策などにおける皮膚の保護
- ストーマ装具の面板外周部の補強 等

規格

品番	サイズ	1箱	JANコード
HCR25	25mm×5m	1巻	4987167092276
HCR50	50mm×5m	1巻	4987167092283
HCR100	100mm×5m	1巻	4987167092290

使用上の注意

- 未滅菌品ですので傷口には直接貼らないでください。
- 皮膚障害が見られる部位には使用しないでください。
- 皮膚を清潔で乾いた状態にして貼ってください。
- 皮膚かぶれやはがれの原因となりますので、テープを引っ張って伸ばした状態で貼らないでください。
- 使用中、皮膚障害その他異常が見られる場合は、使用を中止してください。
- シャワー、入浴の際は必ず前もって、水が入らないようテープの全面が皮膚に密着していることを確認してください。
- 使用後は皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがしてください。
- はくり紙にシミが見られることがありますが、テープ成分由来のもので、品質上問題ありません。

規格＜ショートタイプ＞

品番	サイズ	1箱	JANコード
HCR502	50mm×2m	1巻	4987167099459
HCR1002	100mm×2m	1巻	4987167099466

ハイコロール™の使いやすいショートタイプです

TM:trademark

ニチバン株式会社

日本製
MADE IN JAPAN

〒112-8663 東京都文京区関口 2-3-3 ホームページ <https://www.nichiban.co.jp/>