

# ニプロ 経腸栄養バッグ

Enteral Nutrition Bag

ISO 80369-3対応品

ENFit®

片手で開閉でき、充填口が  
広いためコップ・ボトルを  
持つ感覚で充填ができます。



閉まったことを音でも確認できる  
ジッパーを使用しています。



充填時用の  
目盛りを設けました。




チューブハンガーを  
使用することで全体を  
小さくまとめることが  
可能です。




# 使用方法

【準備するもの】

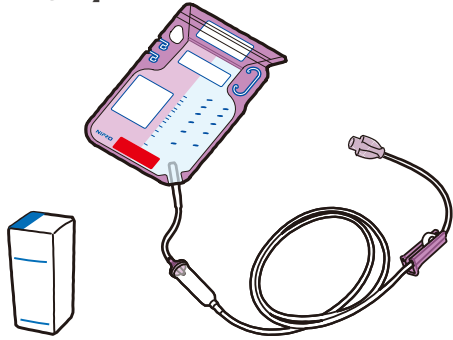

【はじめに】

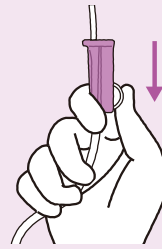


ローラークランプを下げ  
おいてください。




バッグ上部両端を一度くっつけて  
開口しておきます。


1 つり下げ口と  
スリットに指を入れる

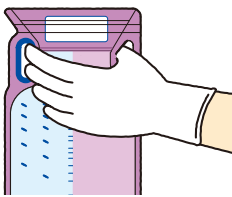

2 充填口を握って開く

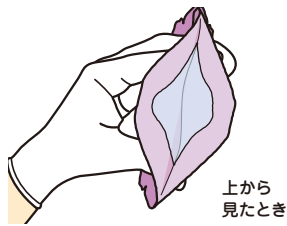

3 栄養剤を充填する

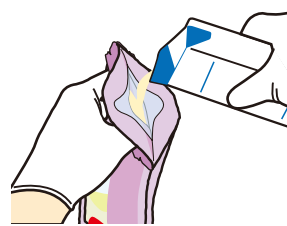

Point




バッグの下部を軽く引っ張ると  
充填しやすくなります。

4 ジッパーを閉じる



5 投与開始

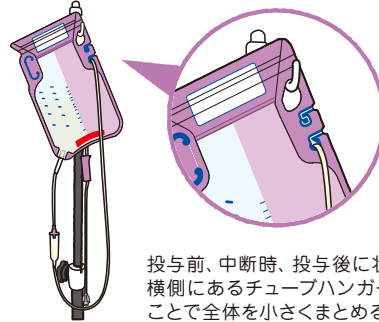


投与前、中断時、投与後に状況に応じて、製品の  
横側にあるチューブハンガーにチューブをかける  
ことで全体を小さくまとめることができます。

## 仕様

医療機器届出番号:27B1X00045000102  
医療機器クラス分類:クラスI(一般医療機器)

商品コード	品番・規格	容量	チューブ径	チューブ長	JANコード
60-100	EFA-5STZH-IS3	500mL	2.7 × 4.0mm	1150mm	4987458601002
60-101	EFA-10STZH-IS3	1000mL			4987458601019


25本/箱

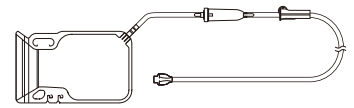

ドリップチャンバなし

商品コード	品番・規格	容量	JANコード
60-102	EFA-5TMD-P	500mL	4987458601026
60-103	EFA-10TMD-P	1000mL	4987458601033

25本/箱

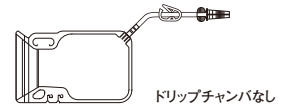

製造販売 ニプロ株式会社  
大阪市北区本庄西3丁目9番3号