

CUTBAN
F O R
E V E R Y
S C E N E



F O R E V E R Y S C E N E

Cutban repair pad enhance the natural healing power, heal injuries cleanly early.

YUTOKU

キズを早く、きれいに治す。

カットバン® リペアパッド
Repair Pad



キズを優しく保護し、痛みをやわらげる。

Merit 薄くて柔らかい素材がしなやかに伸び縮みし、キズ口をしっかり保護します。



ふつうサイズ

関節部位に巻いて保護し、治癒を促進する絆創膏です。



大きめサイズ

関節部位に巻いて保護し、治癒を促進する絆創膏です。



スポットサイズ


ひびやあかぎれ、小さくても痛むキズをしっかり保護し、治癒を促進します。



ジャンボサイズ

肘・膝などの大きめの関節をしっかり保護し、治癒を促進します。

使用シーンに合わせた4サイズ ※実物大

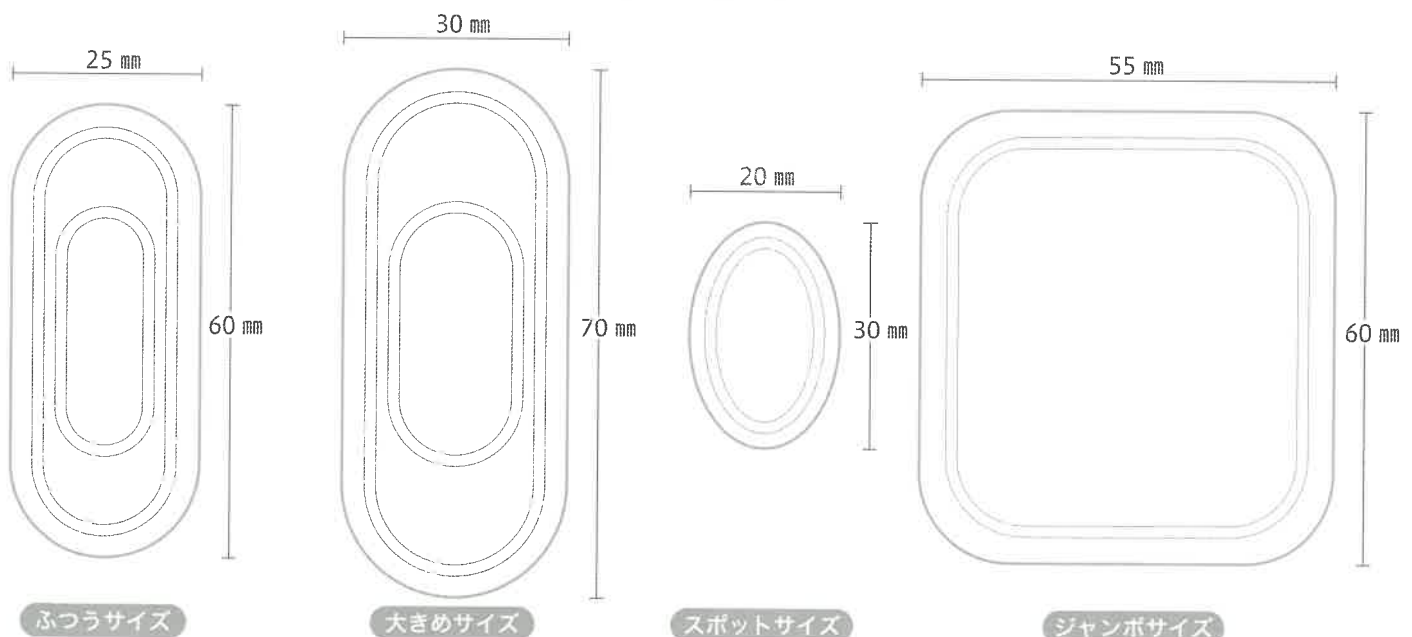

CUTBAN FOR EVERY SCENE

自然治癒力を高め、キズを早くきれいに治す。

Merit

ハイドロコロイド素材がキズの滲出液をすみやかに吸収・保持し、キズを治すための湿潤環境を整えます。

モイストヒーリング(湿潤療法)

キズ口から出てくる体液(滲出液)には、キズを治す成分(細胞の成長や再生を促す成分)が含まれています。キズ口が乾かないよう、潤った環境を保ちながら、自然治癒力を高め、キズをきれいに治す療法がモイストヒーリング(湿潤療法)です。

ハイドロコロイド素材が滲出液の「キズを治す成分」を吸収・保持して白くふくらみ、キズ口の潤いを保つことで、自然治癒力を高めてキズをきれいに治します。



防水
防菌




防水・防菌性のある薄くて柔らかいポリウレタンフィルムが、水やバイ菌の侵入をしっかりと防ぎます。



温度による影響を受けにくく、滲出液を吸収・保持し、湿潤環境をしっかりと保つ。

Merit

温度による影響を受けにくく、様々なシーンで使用可能です。温度が変化しても安定的に滲出液を吸収します。夏、冬などの四季を通じて、また、ご入浴の際にもご使用頂けます。

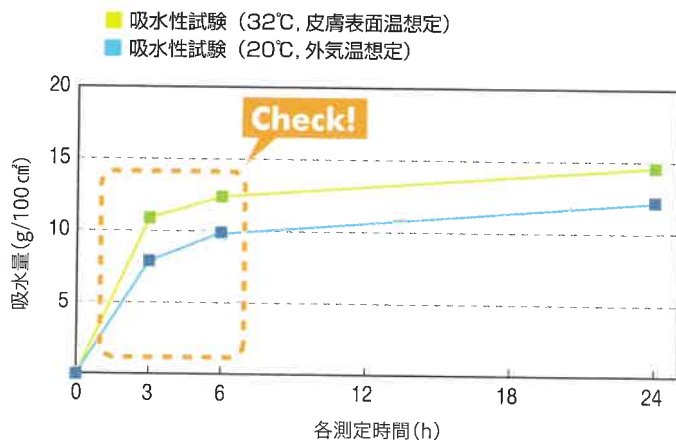

滲出液をすばやく吸収・保持し、キズを治すための湿潤環境を整えます。

温度による影響を受けにくく、様々な環境下で安定してご使用頂けます。

キズを早く、きれいに治す。

カットバン® リペアパッド

DRUG INFORMATION

名 称	カットバン®リペアパッド		認 証 番 号	228ADBZX00027000		区 分	管理医療機器	
JMDNコード	71025000		一 般 的 名 称		家庭用創傷パッド		再使用禁止	
禁忌・禁止	1. 次の部位には使用しないでください。 1) 感染が見られる傷(例: 発赤、膿の滲出、発熱、腫れ、悪臭などの異常が認められる傷) 2) 深い刺し傷や、筋肉・骨・腱が見えるような深い傷 3) ガラス・木片・砂・ほこり・衣類の繊維など異物が入り込んだ傷 4) 動物等に咬まれた傷 5) にきび、湿疹、虫さされ、皮膚炎などの症状およびそれらをかきむしった傷 6) 目の周辺や粘膜 7) 怪我をしてから時間が経った傷および、かさぶたがすでにできている傷 8) 出血を伴う熱傷(やけど)、患部が白や黒に変色して感覚が無い重度の熱傷の可能性がある傷 2. 傷に塗布する軟膏・クリーム等の殺菌・消毒剤を本品と併用しないでください。 使用した場合は水道水等で残さないようによく洗浄してください。 (不必要な消毒は傷の治りを遅くすることがあります。) 3. 引っ張った状態で貼付すると皮膚障害(発赤、発疹、痒み、水疱、表皮の剥離など)やはがれの原因となる恐れがあります。 4. 本品を切って使用しないでください。 5. 個包装を開封してそのままにしておいた本品および、一度使用した本品の再使用はしないでください。 6. 2歳以下の乳幼児には使用しないでください。 7. 本品は皮膚の表面に使用する製品なので口に入れないでください。							
形状・構造及び原理等	本品は吸収層であるハイドロコロイドパッドと背面の剥離紙から構成され、滅菌紙で個包装されています。 ハイドロコロイド素材は創傷からの体液(滲出液)を吸収・保持し、その部分がゲル状に白くふくらみ治療に適した湿潤環境を整えます。 体液(滲出液)は細胞の成長や再生を促す因子＝「傷を治す成分」を含み傷の治療に重要な役割を果たしています。 注: ハイドロコロイド素材は、水分を吸収すると色が白く変わってふくらみますが、製品の異常ではありません。 また、本品を貼付した部分が発汗した場合、水分を吸収してハイドロコロイドが白くなることがあります。							
使用目的、効能又は効果	軽度の切り傷、すり傷、刺し傷、かき傷、あかぎれ、さかむけ、靴ずれ等の創傷および、軽度の熱傷の“保護”、“湿潤環境の維持”、“治癒の促進”、“痛みの軽減”を図る。							
操作方法又は使用方法等	本品は通常の救急絆創膏とは異なりますので、用法を確認して正しくご使用ください。 本品を傷にあてた後、傷や傷口のまわりに、均一に、そして確実に密着するように、本品を上から手のひらで約1分間押さえて温めてください。 ・3歳以上の幼児・小児に使用させる場合は保護者の監督のもと使用してください。 ・貼付前に傷およびその周囲の皮膚を水道水で洗浄し、水気をよく拭き取って清潔にしてください。 ・貼付前に適用部位の止血を行ってください。 ・傷より大きいサイズの製品を使用してください。 ・貼付後しばらくすると傷口からにじみ出てくる体液(滲出液)が本品が吸収・保持し、その部分がゲル化して白くふくらみます。傷が治るにしたがい体液の分泌が減っていくため貼り替えるたびに白くふくらみは小さくなります。 ・体液(滲出液)が多く、貼り付けた本品から漏れたり、汚れたりした場合は、本品をはがし、傷を水道水などでよく洗浄してから新しいものに貼り替えて、傷口を清潔に保ってください。 ・指などに貼り付ける際はきつく巻かないように注意してください。 ・貼付中は毎日傷の状態を観察し、感染(例: 発赤、膿の滲出、発熱、腫れ、悪臭など)が認められる場合は直ちに使用を中止し、医師に相談して適切な治療を受けてください。 ・ハイドロコロイドが体液(滲出液)を吸収しきれない状態が続くと、浸軟(ふやけ)を起こす場合があります。浸軟した状態で本品をはがすと表皮剥離を起こす場合があります。本品の端まで白くなった場合はすみやかに新しいものに貼り替えてください。最長5日間の連続貼付が可能です。感染の症状が認められた場合は直ちに使用を中止してください。 ・製品にくぼみやムラがみられることがありますが、製造過程で生じるもので品質上問題ありません。 ・茶色っぽい小さな点は原料由来のもので品質上問題ありません。 (はがし方) 本品の端を軽く横に何回か引っ張り、ゆっくりはがしてください。はがれにくい場合は、温水を皮膚と本品との隙間に流し込むようにするとはがれやすくなります。出血させたり、再生した皮膚を取り除かないように注意してはがしてください。							
使用上の注意	1. 重要な基本的注意 1) 次の人は本品使用前に医師または、薬剤師に相談すること。 (1) 糖尿病や血行障害の治療を受けている人 (2) 絆創膏等によりかぶれやすい人や、アレルギー体質の人 (3) 強い倦怠感を感じたり、発熱を感じたりするなど全身の状態がよくない人 2) 次の場合は使用を直ちに中止し、医師の診療を受けてください。 (1) 本品の使用により傷の悪化、化膿、感染(例: 発赤、膿の滲出、発熱、腫れ、悪臭などの異常が認められる傷)、傷の治りが悪い等の症状があらわれた場合 (2) 数日間使用しても傷の治療や改善がみられない場合または、悪化した場合 2. その他の注意 1) 本品は滅菌済みで、包装の破損等がない限り無菌性は保証されますが、包装が破損または汚損が認められたときは使用しないでください。 2) 本品は強いこすれや、過度の発汗、運動による隙間の発生、水仕事、入浴またはプールなどで皮膚がふやけた場合には剥がれやすくなることがあります。 3) 患部の状態や個人の体質によっては、治癒後色素沈着や傷跡が残る場合があります。 4) 本品は開封後、直ちに使用してください。							
貯蔵・保管方法及び使用期間等	1. 貯蔵・保管方法 1) 直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所で保管してください。 2) 乳幼児・小児の手の届かないところに保管してください。 2. 使用期限 1) 個箱の底面に記載(西暦年月 / 製造番号) 2) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。							
包 装	ふつうサイズ(25mm×60mm) 12枚入		大きめサイズ(30mm×70mm) 8枚入		スポットサイズ(20mm×30mm) 10枚入		ジャンボサイズ(55mm×60mm) 4枚入	

品名	品番	規格	希望小売価格(本体価格)	JANコード / ITFコード	詰数	サイズ(幅×奥×高)・重量
カットバン リペアパッド	CRP12F	ふつう サイズ 12枚	800円	4 987235 020873 14987235020870	パッケージ	65×22×105mm・26g
					内装	20個 232×134×112mm・580g
					梱包	200個 581×246×285mm・6.8kg
	CRP8O	大きめ サイズ 8枚	800円	4 987235 020880 14987235020887	パッケージ	65×22×105mm・24g
					内装	20個 232×134×112mm・540g
					梱包	200個 581×246×285mm・6.4kg
	CRP10S	スポット サイズ 10枚	800円	4 987235 020897 14987235020894	パッケージ	65×22×105mm・21g
					内装	20個 232×134×112mm・490g
					梱包	200個 581×246×285mm・5.5kg
	CRP4J	ジャンボ サイズ 4枚	800円	4 987235 020903 14987235020900	パッケージ	85×22×105mm・23g
					内装	20個 232×174×112mm・530g
					梱包	200個 581×246×365mm・6.5kg

製造販売元



祐徳薬品工業株式会社

お客様相談窓口
TEL.0954-63-1320
受付時間9:00～17:00(土、日、祝日は除く)

本 社: 佐賀県鹿島市大字納富分2596番地1 ☎ 0954(63)1231代
北 海 道 支 店: 札幌市中央区北五条西六丁目2番2号札幌センタービル ☎ 011(233)0007代
東 北 支 店: 仙台市青葉区本町二丁目15番1号ルナル仙台9F ☎ 022(263)7277代
東 京 支 店: 東京都大田区東糺谷一丁目1番21号 ☎ 03(3745)6151代
名 古 屋 支 店: 名古屋市中天白区植田東一丁目701番地 ☎ 052(805)3039代
大 阪 支 店: 大阪府吹田市南吹田五丁目1番1号 ☎ 06(6380)1451代
四 国 支 店: 広島市中区本通6番11号明治安田生命広島本通ビル ☎ 082(504)6060代
福 岡 支 店: 福岡市博多区冷泉町5番32号オーシャン博多ビル7F ☎ 092(271)7701代

<http://www.yutokuyakuhin.co.jp/>

CRP-001K
21702-10