



まもろーる

Self-adhering foam roll

医療機器や自重による外力を低減する
ポリウレタンフォーム



使用シーン

医療機器や自重による外力がかかる部位●にご使用ください。

医療機器

気管カニューレ固定具



NPPVマスク




医療用弾性ストッキング




防水性なので
入浴中も貼付できます




自重

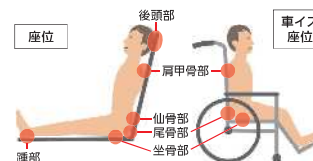

座位の場合

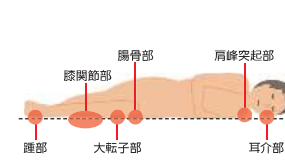


側臥位の場合

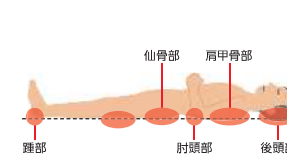


仰臥位の場合


使用方法

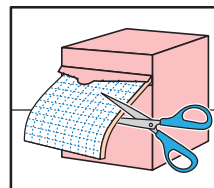

開封口からロールを引き出し
適度なサイズにカットします。
※剥離紙の格子は1cm角です。

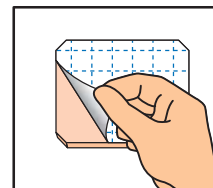

切り取ったフォームの剥離紙を
はがします。

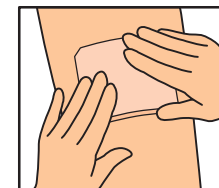

フォームが浮かないように
しっかりと貼付してください。

POINT



角を切って丸くすると
はがれにくくなります！

【使用上の注意】

- 使用中、かゆみ・痛み等の症状があらわれた場合には使用を中止して医師又は薬剤師に相談してください。
- 皮膚の弱い方は同じところに繰り返し貼らずに少しずつ使用してください。
- 本品は未滅菌ですので、傷口には直接貼らないでください。
- 使用後は必ず剥がしてください。
- 長期間貼付し続けしないでください。
- 本品はディスプレイ製品ですので、再使用はしないでください。
- カットする際はハサミの取り扱いにご注意ください。
- 本品は通気性ではないため、口や鼻を覆わないようにしてください。

【保管上の注意】

- 直射日光を避け、清潔なところに保管してください。
- 小児の手の届かないところに保管してください。
- ロールは箱の中で保管してください。

商品名・規格	寸法 高さ×幅×奥行(mm)	重量	希望小売 価格	梱 入数	品番	JANコード	ITFコード
まもろーる5.0	単品 113×105×112	110g	オープン 価格	20	19050		梱 14987603190501
厚さ5.0mm 100mm×2m 1巻入	梱 245×545×240	2.7kg					

●お問い合わせは

白十字株式会社
〒171-8552 東京都豊島区高田3-23-12

患者さんのそばで 肌をやさしく守るロール

ロール形状

目立ちにくいベージュ




圧力をやわらげる

ポリウレタンフォーム

極薄3 μ m

ポリウレタンフィルム

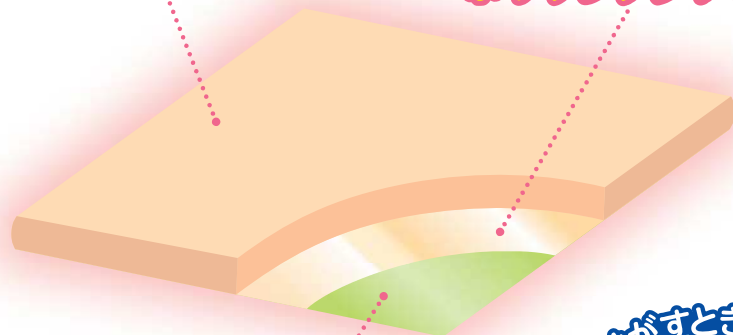

肌に低刺激な

医療用粘着材

※イラストはイメージです。

はがすときキレイ



フィルムをしっかりとつまむと
キレイにはがせます。



汚れの
付着を防ぐ



使わないとき
フタができる

開封口がツバとなり最後まで清潔にお使いいただけます！


圧分散効果

医療機器や自重による外力を低減


厚みのあるポリウレタンフォームを使用し、皮膚にかかる外力をしっかりと分散します。

圧力分散性試験 1,000g 荷重


赤いエリアが荷重が集中している所です。
一般的なドレッシング材よりも赤いエリアが少なく、外力が分散されております。

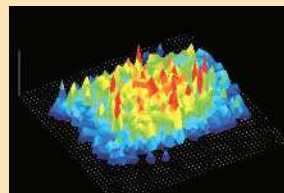

一般的なドレッシング材

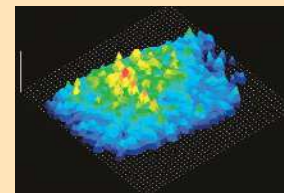

まもろーる

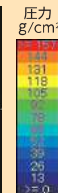

試験方法

10cm×10cmのサンプル片の
上に ϕ 30mmの金属荷重棒を
置いた。


低刺激性

剥離刺激を抑えた肌にやさしい設計

やさしい粘着力のため肌への負担が少ないです。

角質剥離染色試験

藍に染まった箇所は肌から剥離した角質細胞を示しています。
一般的なフィルムドレッシングより角質剥離量が少なく低刺激です。

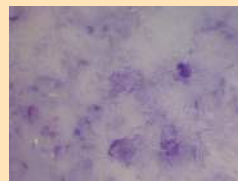

一般的なフィルムドレッシング



まもろーる

試験方法

試験片を前腕部に5時間貼付し、
剥離後に染色液に浸漬して染色。
撮影倍率：200倍

前腕部に5時間貼付後



一般的なフィルムドレッシング

まもろーる


肌への刺激が少ないので
はがした後もキレイです！

高い透湿性

ムレにくい 極薄ポリウレタンフィルムで安心

しっかり厚みはありますが、貼付していてもムレにくいので
快適にお使いいただけます。

透湿度試験

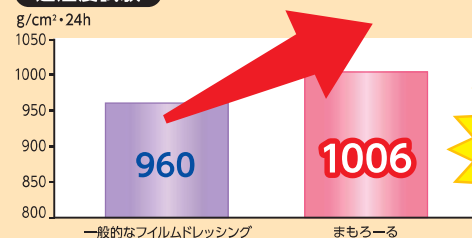

約5%
UP!!

試験方法

JIS Z 0208 カップ法