



サージステイン（熱やけ・サビ除去剤）

7-3004（4ℓ × 4本入）

ステンレス製手術器具のサビ・熱やけを短時間の浸漬と簡単なブラッシングだけで確実に除去することができます。

■ステンレスの再活性化

ステンレス本来の光沢を取り戻し、器具の動きをよくします。

サージスリップと併用することで、器具の寿命を延ばし、買い替えや修理の費用を節約することができます。

サージステインのご使用方法

- ①原液 1 に対して温水 7（50℃から60℃）の割合で希釈液を作ります。
- ②洗浄後の器具を希釈液に5～10分間浸漬し、非金属製の柔らかいブラシでブラッシングを行います。
- ③器具を十分にすすぎます。

サージステインのご使用上の注意

- ◆ステンレス製以外の器具への使用についてはご相談ください。
- ◆他の洗浄剤、消毒剤と混ぜて使用しないでください。
- ◆10分以上の浸漬は避けてください。
- ◆使用時には必ず手袋、マスク、ガウン等を着用してください。
- ◆高温、多湿の場所での保管は避けてください。
- ◆誤飲防止のために、保管、取り扱いには十分注意してください。
- ◆万一飲込んだ場合には、水を飲ませる等の処置の上、専門医の診断を受けてください。
- ◆目に入った場合には、直ちに水で洗い流して専門医の診断を受けてください。

エンドザイムスポンジ（内視鏡・医療器具洗浄用スポンジ）



7-1210（10個入）

7-1225（25個入）

内視鏡や医療用器具の表面を簡単に、すばやく洗浄できるようにデザインされた洗浄用スポンジです。スポンジ全体に、エンドザイムを含ませてあり、器具のデリケートな部分を傷めず、効果的に洗浄ができます。また、力を入れずに洗えるので、先端、ゴムのたわみを防げます。

製品に関するお問い合わせ、サンプル等のご依頼は下記までご連絡ください。

発売元：宮野医療器株式会社

本社 〒650-0017 兵庫県神戸市中央区楠町5丁目4番8号 TEL:078-371-2121(大代表) FAX:078-371-2039

東京営業所 〒113-0034 東京都文京区湯島2丁目16番7号 TEL:03-3816-4575 FAX:03-3814-1566

輸入元：株式会社アムテック TEL:03-3332-7807 FAX:03-3332-7843