



# PREMIXSLIP

7-9112 (500cc 12本入)

## 手術器具用保護・潤滑剤 プレミックススリップ

### 【使用方法】

1. 直接器具にスプレーするか、原液を垂らします。
2. 30秒間、プレミックススリップを浸透させます。
3. 器具の動きを確認してください。
4. 動きが悪い場合には、再度スプレーしてから動きを確認してください。
5. 動作の確認中に、汚染物が見られた場合には、再度洗浄を行います。
6. 自然乾燥させて、滅菌を行います。



発売元：宮野医療器株式会社

〒 650-0017 神戸市中央区楠町 5-4-8  
Tel: 078-371-2121 Fax: 078-371-2300

輸入元：株式会社アムテック

〒 168-0081 東京都杉並区宮前 2-10-42  
Tel: 03-3332-7807 Fax: 03-3332-7843

**RUHOF**