



外科製品

PPE

処置・検査用マスク

# プロフェッショナル マスクI



「ASTM F2100-11」\*レベル1に適合した  
肌触りの良いサージカルマスクです。

\*「ASTM F2100-11」は、医療用マスクの米国標準規格です。



外科製品

PPE

## 商品特長

### 1 優れたバリア性

- バリア性に優れたフィルタを使用しており、「ASTM F2100-11」※1レベル1に適合しているため、病棟や外来、検査室等、幅広く使用できます。
- ※1:「ASTM F2100-11」は、医療用マスクの米国標準規格です。

### 2 しっかりフィット

- ゴム紐がマスク外面から出ているため、頬に隙間ができていくなくなっています。
- フィット性の高いノーズピースを使用しているため、メガネやゴーグルが曇りにくくなっています。

### 3 やさしい肌ざわり

- 肌側に柔らかい不織布を使用しているため、ソフトな肌ざわりです。

### 4 耳が痛くなりにくい

- ゴム紐は、長時間の着用でも耳が痛くなりくい平ゴムです。

## 商品情報

### 試験データ

試験項目	プロフェッショナルマスクI 実測値※2	ASTM F2100-11 規格値		
		レベル1	レベル2	レベル3
BFE(細菌濾過効率)	≥99%	≥95%	≥98%	≥98%
ΔP(呼吸抵抗)	4.0mmH <sub>2</sub> O/cm <sup>2</sup>	<4.0mmH <sub>2</sub> O/cm <sup>2</sup>	<5.0mmH <sub>2</sub> O/cm <sup>2</sup>	<5.0mmH <sub>2</sub> O/cm <sup>2</sup>
PFE(微粒子濾過効率)	≥99%	≥95%	≥98%	≥98%
人工血液不浸透性	80mmHg	80mmHg	120mmHg	160mmHg
可燃性	CLASS1	CLASS1	CLASS1	CLASS1

※2:実測値であり、保証値ではありません。

<試験実施日> 一般財団法人 カケンテストセンター

- BFE、人工血液不浸透性: 2017年9月29日 ●ΔP: 2020年10月8日
- PFE: 2017年9月27日 ●可燃性: 2017年9月28日

### 推奨使用シーン

使用部署	レベル1	レベル2	レベル3
病棟	●	●※3	—
外来	●	▲	—
検査室	●	●	▲
救急科・ICU	—	▲	●
手術室	—	—	●

※3:口腔ケア・おむつ交換時等、飛散しやすい処置時

### 素材

本体・フィルタ: ポリプロピレン

ノーズピース: 鉄

耳紐: ポリエステル、ポリウレタン

※ラテックスフリー

(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません。)

⚠MRI検査時は使用しないでください。ノーズピースは鉄製のため、磁力でマスクが引き寄せられる恐れがあります。

### 着脱方法

着け方



ノーズピースを上にして、ヒダが下向きになるように装着します。ゴム紐の付け位置は外面です。

※ピンク・ブルーは、色面が外側になります。



耳にゴム紐を掛け、ノーズピースを鼻の形に合わせます。



ノーズピースを押さえたままプリーツを広げます。

外し方



マスク外面を触らないようにゴム紐をもって取り外します。

## 商品規格

### プロフェッショナルマスクI

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
51408	プロフェッショナルマスクI ゴム紐 フリー ブルー 50枚入 9.5cm×17.5cm	販売単位   180 × 90 × 100	190.0g	40箱	4971032514086 14971032514083
		外装   520 × 380 × 380	8.6kg		
51409	プロフェッショナルマスクI ゴム紐 フリー ホワイト 50枚入 9.5cm×17.5cm	販売単位   180 × 90 × 100	190.0g	40箱	4971032514093 14971032514090
		外装   520 × 380 × 380	8.6kg		
51411	プロフェッショナルマスクI ゴム紐 小さめ ホワイト 50枚入 9cm×14.5cm	販売単位   180 × 90 × 100	165.0g	40箱	4971032514116 14971032514113
		外装   520 × 380 × 380	7.6kg		
51410	プロフェッショナルマスクI ゴム紐 小さめ ピンク 50枚入 9cm×14.5cm	販売単位   180 × 90 × 100	165.0g	40箱	4971032514109 14971032514106
		外装   520 × 380 × 380	7.6kg		

長期欠品中

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市中区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221

ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / [support@osakimedical.co.jp](mailto:support@osakimedical.co.jp)

※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店