

N-95 対応サージカルマスク

サージマスク N-95(折りたたみ式)



軽量で着け心地がよい N-95 対応のサージカルマスク

- NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health = 米国労働安全衛生研究所) 認可マスク
- フェイスラインに密着するので結核などの空気感染予防に
- NaCl (粒子径 $0.075 \pm 0.02 \mu\text{m}$) の粒子試験で、捕集効率 95% 以上
- 肌にやさしいラテックスフリー

日本製
MADE IN JAPAN

N-95 マスクとは

NIOSH (米国労働安全衛生研究所) の規格に合格したマスクです。結核や SARS の感染防止に効果が認められ、感染者が発する飛沫 (せき、くしゃみ) や菌などの微粒子から、呼吸器感染のリスクを軽減する目的として使用されています。



50 枚入

ノーズブリッジで
ピッタリフィット


素材

本体 : ポリプロピレン・ポリエチレン
ノーズブリッジ : ポリエチレン・鉄芯



装着方法

1

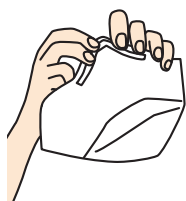

マスクを上下に開き
ノーズブリッジを上にして、
鼻に沿うよう軽く曲げます

2



マスクの下側をあごに
掛け、マスク下側ゴムを
首に掛けます

3



上側ゴムを頭頂部に
持っていくます

4




両手でノーズブリッジを指先
で押さえつけるようにして鼻
の形に合わせます

5



両手でマスクを覆い、呼吸を
して**空気のもれをチェック**し
装着完了です

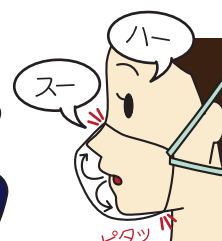

商品番号	規格	販売単位	定価	JAN CODE
076073	M ホワイト 7.5cm×24.0cm (折りたたんだ状態の寸法) 50 枚入	1箱	オープン	4958995760736

発売元



株式会社 竹虎®

<https://www.taketora-web.com/>

【メディカル事業部】

東日本営業部 〒231-0017 神奈川県横浜市中区港町 2-6-8 横浜関内ビル
TEL.045 (680) 0308 (代) FAX.045 (680) 0312

西日本営業部 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町 10-35 江坂南口第二ビル
TEL.06 (6386) 7217 (代) FAX.06 (7175) 7101

取扱店