

目の周りを押さえて冷やす/温める

メオアイス

Hot + Cool

温めても冷やしても使用できます

男女兼用
フリーサイズ

凍らせても固まらない
シャーベットタイプ

片眼使用の際は、
半分に切って使用する
こともできます。



ジェル

アイマスク

眼瞼など

外眼部の周術期のケアに

「メオアイス」は、眼瞼の周術期のケアを目的として、眼形成外科の鹿嶋友敬医師監修のもと開発した商品です。

凍らせても固まらないシャーベットタイプのジェルが目のくぼみにフィットして目の周りを冷やすことができます。専用アイマスクを用いることでジェルを適度な圧迫感で頭に固定でき、効率的に冷やすことができます。

個装パッケージ



2015年の形成外科学会販売 No.1

『超アトラス 眼瞼手術』
(全日本病院出版会)

編集者、鹿嶋友敬医師監修！

使用
方法



1 冷凍庫でジェルを
冷やす (30分以上冷やしてください)



2 アイマスクにセットする




3 ゴムバンドで取り付ける



片眼の場合
ジェルを半分に切り、
片側のみに入れ、斜めに
取り付ける

【温度℃】 時間経過による保冷剤表面の温度変化

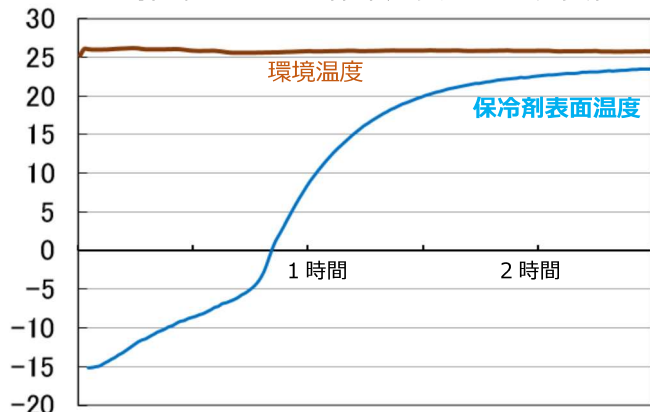

※試験条件：冷凍庫(約-20℃)で十分に冷却した保冷剤を、約26℃環境下にて静置した時の保冷剤表面温度を測定。

商 品 名	メオアイス Hot+cool 8885-01
小 売 価 格	¥2,000(本体価格)+税 /個
受 注 単 位	10 個
J A N	4990097059110
内 容	アイマスク×1、ジェル×2
パ ャ ケ ー ジ	<サイズ>H195×W120×D27mm <重 さ>約 245g <内容物>水・増粘剤 (CMC:カルボキシメチルセルロース) <本体袋>ナイロン・ポリエチレン <サイズ>約 H80×W180mm <容 量>92g <原産国>日本
ジェ ル	<材 質>表生地: ポリエステル 100%、 裏生地: ポリエステル 95%、ポリウレタン 5% ゴムバンド: ポリエステル 95%、スパンデックス 5%
アイマスク	<サイズ>本体: H95×W195mm、ゴムバンド: H30×W230mm <重 さ>約 25g <原産国>中国

【ジェルの安全性について】

急性経口毒性試験、皮膚刺激性試験、眼刺激試験にて、
安全性が高いことを確認しております。

発売元



日本眼科医療機器協会会員・(公社)日本視能訓練士協会賛助会員
(財)日本アイバンク協会賛助会員

名古屋眼鏡株式会社

TEL: 050-3786-0758 ・ 052-261-6561

FAX: 0120-333-263 http://www.meigan.co.jp



0 09999 002002

目の周りを温める/冷やす メオアイス

Hot + Cool

温めても冷やしても使用できます

ジェル×2



アイマスク



表面

裏面

マイボーム腺
の油分に


目の疲れに

目の乾きに



ドライアイの原因の1つに、マイボーム腺機能不全 (MGD) による油分不足があげられます。目を温めることで、涙の油分の分泌が改善されるといわれています。

- 約 40℃の温度が 10 分程度続きます。
- 電子レンジで加熱するだけですぐに使えます。
- 天然素材を使用していないため、約 400 回 繰り返し使えるので経済的です。
(1 回あたり 2.5 円)
- 目に合わせた型のジェルと、専用アイマスクで、優しくフィットします。

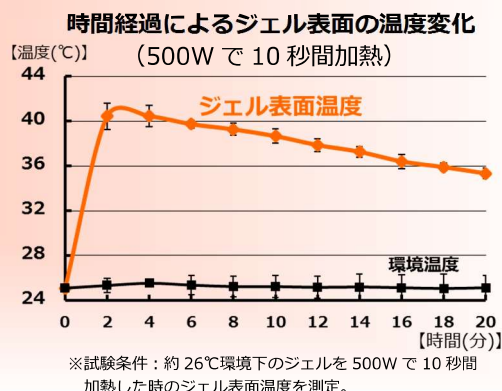

温め方法



電子レンジでジェルを 500W
または 600W で 10 秒間温める



アイマスクにセットする



ゴムバンドで取り付ける

加熱の目安時間		
500W	600W	1000W
10秒	10秒	使用不可

温かさが足りない場合…ジェルを手で揉みほぐした後、確認しながら数秒ずつ追加加熱
※表示の加熱時間は26℃の室温においたジェルを40℃まで温める標準的な加熱時間です。

オート加熱 おまかせ加熱 オープン

商 品 名	メオアイス Hot+cool 8885-01
小 売 価 格	¥2,000(本体価格)+税 /個
受 注 単 位	10 個
J A N	4990097059110
内 容	アイマスク×1、ジェル×2
パ ャ ケ ー ジ	<サイズ>H195×W120×D27mm <重さ>約 245g

ジェル	<内容物>水・増粘剤 (CMC:カルボキシメチルセルロース) <本体袋>ナイロン・ポリエチレン <サイズ>約 H80×W180mm <容 量>92 g <原産国>日本
アイマスク	<材 質>表生地: ポリエステル 100%、 裏生地: ポリエステル 95%、ポリウレタン 5% ゴムバンド: ポリエステル 95%、スパンデックス 5% <サイズ>本体: H95×W195mm、ゴムバンド: H30×W230mm <重 さ>約 25g <原産国>中国

日本眼科医療機器協会会員・(公社)日本視能訓練士協会賛助会員
(財)日本アイバンク協会賛助会員

発売元



名古屋眼鏡株式会社

TEL: 050-3786-0758 ・ 052-261-6561

FAX: 0120-333-263 http://www.meigan.co.jp



0 009999 004006

目の周りを押さえて冷やす／温める

メオアイス

片
眼
用

Hot + Cool

くりかえし温められます

凍らせても固まらない
シャーベットタイプ

「片眼ずつ手術するので
片眼用が欲しい」
というお声から開発しました

2017 年 12 月新発売



パッケージ※開発イメージ

凍らせても固まらない
シャーベットタイプ



ジェル



アイマスク

男女兼用
片眼用
フリーサイズ



眼瞼など

温めても冷やしても使用できます

外眼部の 周術期のケアに

「メオアイス」は、眼瞼の周術期のケアを目的として、眼形成外科の鹿嶋友敬医師監修のもと開発した商品です。

凍らせても固まらないシャーベットタイプのジェルが目のくぼみにフィットして目の周りを冷やすことができます。専用アイマスクを用いることでジェルを適度な圧迫感で頭に固定でき、効率的に冷やすことができます。



2015 年の形成外科学会販売 No.1

『超アトラス 眼瞼手術』
(全日本病院出版会)

編集者、鹿嶋友敬医師監修！

使用
方法



1 冷凍庫でジェルを
冷やす (30 分以上冷やしてください)




2 アイマスクにセットする



3 ゴムバンドで取り付ける



【温度℃】 時間経過による保冷剤表面の温度変化

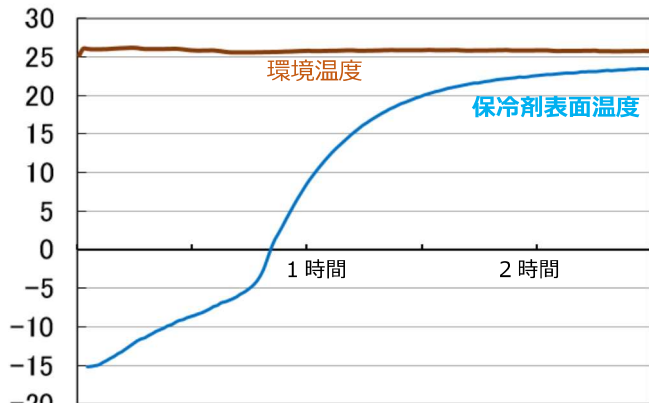

※試験条件：冷凍庫(約-20℃)で十分に冷却した保冷剤を、約 26℃環境下にて静置した時の保冷剤表面温度を測定。

商 品 名	メオアイス Hot+Cool 片眼用 8884-01
小 売 価 格	¥1,700(本体価格)+税 /個
受 注 単 位	10 個
J A N	4990097075486
内 容	アイマスク×1、ジェル×2
ジェル	<内容物>水・増粘剤(CMC:カルボキシメチルセルロース) <本体袋>ナイロン・ポリエチレン <原産国>日本
アイマスク	<材 質>表生地:ポリエステル 100%、 裏生地:ポリエステル 95%、ポリウレタン 5% ゴムバンド:ポリエステル 95%、スパンデックス 5% <原産国>中国

【ジェルの安全性について】

急性経口毒性試験、皮膚刺激性試験、眼刺激性試験にて、
安全性が高いことを確認しております。

日本眼科医療機器協会会員・(公社)日本視能訓練士協会賛助会員
(財)日本アイバンク協会賛助会員

発売元



名古屋眼鏡株式会社

TEL : 050-3786-0758 ・ 052-261-6561

FAX : 0120-333-263 http://www.meigan.co.jp