

リスクマネジメント【看護サポート用品（ミトン型手袋）】

セーフミトン®Ⅱ

自傷行為や抜管行為から身体を守ります。



アイデアホック付あまぶた

- ・取り外し可能
- ・交換用に単体販売あり

1 双入

アイデア
ホック
採用手袋

先端ファスナー開閉式

内側の肌に触れる生地にアイス ポイント
(クール感が得られる生地) を使用

利用者本人や介助者などの生命又は身体が危険にさらされる場合のみご使用ください。

“セーフミトン®Ⅱ”は、自傷行為や抜管行為等を防ぐ事を目的に開発された手袋です。
ご本人では外しにくいアイデアホック、ロック機能付ファスナーを採用することにより、これら
の行為に対応します。

ご使用の際は、ご家族や専門家とご相談の上、正しくお使いください。


ご使用者の症状や状況に応じ、
適宜安全をご確認の上、適切なケアをお願いいたします。

セーフミトンⅡ[®]

特長



つかめない・・・手袋の両面に入っている**保護パッド**により、物がつかみにくい形状になっています。

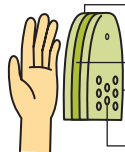

- 3層構造になっています。
内側：緩衝材(手の保護のため。)
- 中間部：硬質のポリエチレン板(使用者が物をつかみにくいようにするため。)
- 外側：緩衝材(第三者、器物の保護のため。)
- 取り外しできます。
- 通気孔：ミトン内の蒸れを軽減します。


あまぶた は・・・
ミトン本体との面ファスナー接着により“取外し可能”で、交換用に単体販売も行っています。



外せない・・・手首のベルトは面ファスナー留めのため、使用者の手首に合わせて調節できます。さらに**あまぶた**をかぶせアイデアホックで留めることで、使用者本人では手袋を外しにくい構造になっています。

手袋の内部を目視できる・・・

先端に付いているファスナーにより、手袋を外すことなく手の状態を確認できます。ファスナーはロック機能が付いているため使用者本人では開閉できないようになっています。(開閉時には付属の専用フックをご使用ください。)

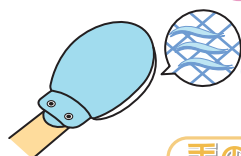

ムレにくい・・・側面はメッシュの立ち上げ構造なので、通気性があり、手袋内部のムレを軽減します。内側の肌に触れる生地には吸汗発散機能に優れた**アイスポイント**を使用しています。発汗時でも生地の肌離れが良く、快適な使用感です。

手の動きが自由・・・側面の立ち上げ構造により、手袋の中はゆったりして手の動きを妨げません。



左右兼用 表裏なし・・・

保護パッドが手袋の両面に入っているため左右・表裏関係なく使用できます。

アイスポイントは・・・
肌側に接触面積の大きい繊維構造を採用しているため、身体との接触面積が大きく、発生した身体の熱の移動を大きくします。そのため、着用してクール感が得られる素材です。

規格

● 1 双入定価・・・17,600 円 (税込)
16,000 円 (税別)

● 替えパーツ各定価・・・保護パッド：792 円 (税込) あまぶた：1,650 円 (税込)
720 円 (税別) 1,500 円 (税別)


商品番号	規格	販売単位	JAN CODE
041051	ブルー 1 双入	1 双	4958995410518

※ケース単位・・・6 箱入

商品番号	規格	販売単位	JAN CODE
041053	替え保護パッド 1 枚入	1 枚	4958995410532
041055	替えアイデアホック付あまぶた 1 個入	1 個	4958995410556

装着方法

※本品は左右兼用です。表裏関係なくご使用頂けます。

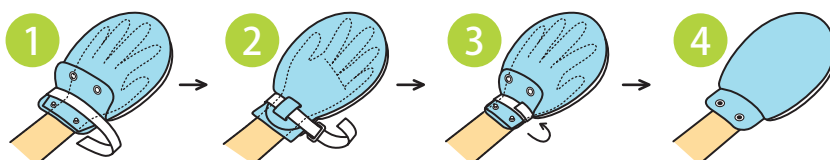

①手袋に片手を挿入します。

②固定用ベルトをベルト通しに入れ、プラスチックベルト通しに差し込みます。

③逆方向に折り返し、しっかりと締め、面ファスナーで留めます。

④アイデアホック付あまぶたをかぶせ、ホックを留めます。


※『アイデアホック付あまぶた』は取り外し可能です。取り付ける際は、面ファスナーのオス・メスを、それぞれはみ出ないように、しっかりと重ね合わせて装着してください。

注意

装着後に手袋を引っ張るなどして手から簡単に抜けないことを確認してからご使用ください。

適応サイズ

- 手首廻り：13cm ～ 22cm
- 手の長さ：14cm ～ 20cm

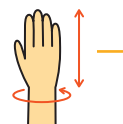

素材

【手袋本体】

- 外側生地：ナイロン
- 内側生地：ポリエステル、ナイロン
- 側面メッシュ：ポリエステル
- 面ファスナー：ナイロン
- アイデアホック：ステンレス
- スライダーベルト：ポリエステル、ポリウレタン

【固定用ベルト】

- ポリエステル

【保護パッド】

- ポリエチレン

洗濯上の注意

- 2枚の保護パッドを外してから洗濯してください。
- アイデアホック及び各ファスナーは必ず閉じて洗濯してください。
- 水の温度は 40℃を限度とし、洗濯用ネットに入れて洗濯してください。
- 塩素系の洗剤及び漂白剤はご使用にならないでください。

- タンブラー乾燥は製品変形、劣化のもとになりますのでおやめください。
- 日陰でつり干しをしてください。
- アイロン、ドライクリーニングは避けてください。

特許取得済

発売元



株式会社 **竹虎**[®]

URL <http://taketora-web.com/> E-mail info@taketora-web.com

【メディカル事業部】

東日本営業部 〒231-0017 神奈川県横浜市中区港町 2-6-8 横浜関内ビル
TEL.045 (680) 0308 (代) FAX.045 (680) 0312

西日本営業部 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町 10-35 江坂南口第二ビル
TEL.06 (6386) 7217 (代) FAX.06 (7175) 7101

取扱店