

# F easyforce

イージーフォース



## 筋力測定を正確で簡単に。

### ハンズフリー測定

付属のストラップを固定して使用できるので、ハンズフリーでの測定が可能です。徒手筋力検査に比べ検査者への負担が軽減され、客観性の高い評価を実現します。

### モチベーション維持

独自のディスプレイにより、被験者の状態を視覚的に明確に示すことができるため、被験者のケアやトレーニングに対するモチベーションが高まります。

### 正確な測定

センサー精度は1%以内のため、正確な測定が行えます。

### 複数値の読み取り


ピーク値、平均値、ピーク値までの時間、測定時間など、筋の状態確認に使用される複数の値をディスプレイに表示します。

### 素早い結果表示

測定が終了すると、測定値がリアルタイムに表示され、結果を確認することができます。

## 測定方法

### STEP 1

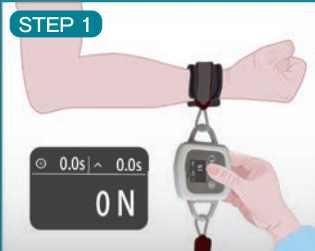

測定ボタンを押します。

### STEP 2



被験者が力を入れる、または測定ボタンを押すと測定が開始されます。

### STEP 3



被験者が力を抜く、または測定ボタンを押すと測定が終了します。

### STEP 4



測定ボタンを押すと測定の履歴を確認できます。新しい順に4回分の履歴が表示されます。



easyforceの使い方を  
動画で紹介しています。

筋骨格系障害の治療には時間制限があるため、効率の良い治療が求められています。  
また可動域や筋力、アライメントの改善には、筋機能と生体力学が大きく関わっています。  
easyforceは、筋力測定をこれまでになく簡単に行うことができる効果的なツールとして、  
限りがある診療時間の中で、治療効果を定量化するというニーズに応えることができます。  
信頼性が高く定量化可能な筋力測定が行えるため、主観的な評価が減り、治療計画の作成にも役立ちます。




easyforceとeasyangleで物理療法などの効果を  
数値化することで、客観的な評価を可能にします。



メーカー希望小売価格  
90,000円(税抜)

### 【標準付属品】

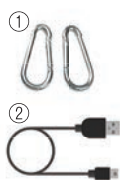

- ① 金属リング：2個
- ② USB充電ケーブル：1本
- ③ ケース：1個



- ④ 手関節／足関節用ストラップ：1本
- ⑤ 扉用付属品：1個
- ⑥ ハンドル型付属品：1個
- ⑦ 目盛り付き長いストラップ：1本

### 【別売オプション品】



- ⑧ 大腿部用ストラップ

### 【仕様】

|       |                          |                |                          |
|-------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| 充電器   | 5VDC、>0.5A、USB Micro     | 作動時間           | 3週間(1日12分使用時)            |
| 最大定格力 | 150kg                    | スタンバイ時間        | 15週間                     |
| 測定単位  | kg、N                     | 充電時間           | 5時間                      |
| 測定項目  | ピーク値、平均値、ピーク値までの時間、測定時間  | センサー精度         | ±1%                      |
| 測定履歴  | 4回分                      | サイズ            | (W)122×(D)27.5×(H)70(mm) |
| 使用環境  | 操作温度：10～45℃、保管温度：-10～60℃ | 微粒子状物質に対する保護等級 | IP4X                     |

お問い合わせ先

販売元



**伊藤超短波株式会社**

〒332-0017 埼玉県川口市栄町3-1-8

メディカル営業部

<https://www.medical.itolator.co.jp/>



製品に関するお問い合わせはこちらまで

|     |     |                  |                  |
|-----|-----|------------------|------------------|
| 営業所 | 札幌  | TEL.011(820)2830 | FAX.011(842)1562 |
|     | 仙台  | TEL.022(306)7667 | FAX.022(306)7688 |
|     | 埼玉  | TEL.048(254)1013 | FAX.048(254)1014 |
|     | 東京  | TEL.03(3812)1217 | FAX.03(3814)4587 |
|     | 横浜  | TEL.045(949)0023 | FAX.045(949)0025 |
|     | 名古屋 | TEL.052(701)4515 | FAX.052(701)6905 |
|     | 大阪  | TEL.072(242)1043 | FAX.072(242)1040 |
|     | 広島  | TEL.082(292)3330 | FAX.082(292)3331 |
|     | 福岡  | TEL.092(573)6053 | FAX.092(573)0218 |