



1



ケースをねじってラベルを破り、
キャップを外します。

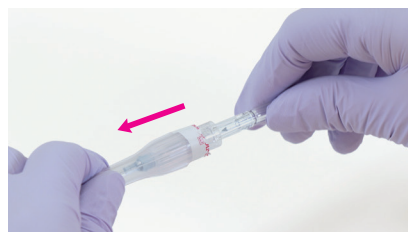

内針ハブをもって、
プロテクターを外します。

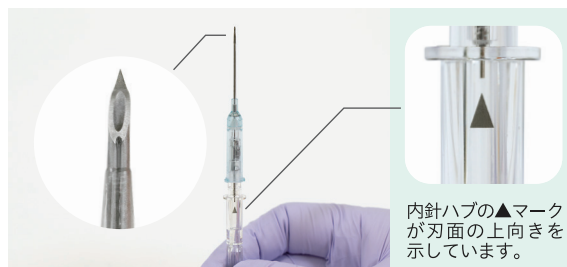

刃面の向きを確認します。




穿刺し、内針ハブの
フラッシュバックを確認します。

2



カテーテルが赤く染まり、
血管確保したことを確認します。

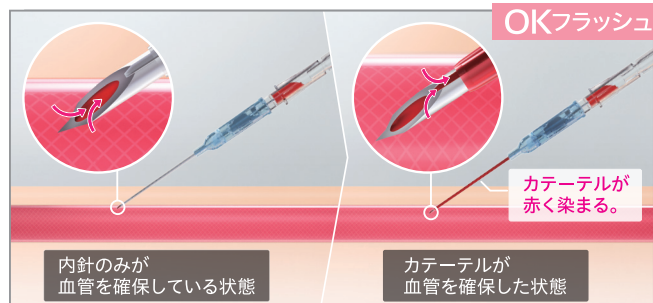

イメージ図

3





カテーテルハブを指で固定し、内針をまっすぐ引き抜きます。
止血弁の止血補助の目安は、静脈圧 20mmHgで10秒程度です。



内針を途中で止めると、止血弁と内針の
隙間から血液が漏れる可能性があります。

4

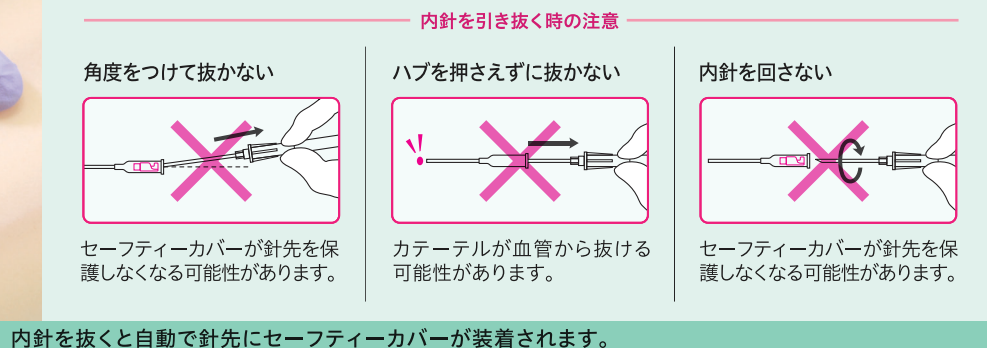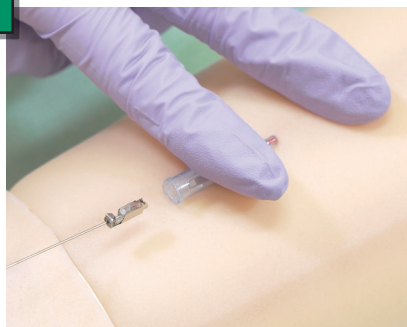

内針を抜くと自動で針先にセーフティーカバーが装着されます。

5



内針抜き取り後は、輸液セット等へ速やかに
接続してください。手順に従って内針を廃棄
してください。接続した輸液セット等をカテー
テルハブから取り外す場合は、適切に止血を
しながら取り外してください。