



救急絆創膏

サージット® 10 WA ST

- 非粘着部を設けており、ドレッシング材の剥離時の針の同時抜去を防止します。

商品コード	JANコード	品番	サイズ
21-099	4987458210990	NSD10WAST	100×115mm

50枚/箱

販 売：ニプロ株式会社
製造販売：リバテール製薬株式会社

関連製品



植込みポート用医薬品注入器具

セーフタッチコアレスニードル® セット

- 針刺し・切創防止機構が付いており、抜針時の針刺し・切創のリスクを軽減します。
- 耐圧は2.9MPa(420psi)です。(自社基準)

医療機器認証番号：220AABZX00001000 医療機器クラス分類：クラスⅡ（管理医療機器）

	商品コード	JANコード	品番	針長さ (mm)	チューブ長 (mm)
※	24-323	4987458243233	STC-20GX3/4-100	19	100
※	24-380	4987458243806	STC-20GX5/8-100	16	
	24-310	4987458243103	STC-22GX1/2-100	13	
	24-283	4987458242830	STC-22GX5/8-100	16	
	24-282	4987458242823	STC-22GX3/4-100	19	
※	24-311	4987458243110	STC-22GX1-100	25	450
	24-285	4987458242854	STC-24GX5/8-100	16	
	24-284	4987458242847	STC-24GX3/4-100	19	
※	24-324	4987458243240	STC-20GX3/4-450	19	
	24-314	4987458243141	STC-22GX1/2-450	13	
※	24-315	4987458243158	STC-22GX1-450	25	
	24-287	4987458242878	STC-22GX5/8-450	16	
	24-286	4987458242861	STC-22GX3/4-450	19	
	24-288	4987458242885	STC-24GX3/4-450	19	
	24-289	4987458242892	STC-24GX5/8-450	16	

※は受注生産品
製造販売：ニプロ株式会社

10本/箱

抜針方法



固定翼を指先でしっかり押さえ、もう片方の手で把持部を持ち、ロックを外します。




指で翼を固定した状態で把持部を垂直に「カチッ」と音がするまでしっかりと引き上げます。





ポートから抜かれた針がプロテクトされていることを十分確認してください。

サージット® 10 WA ST

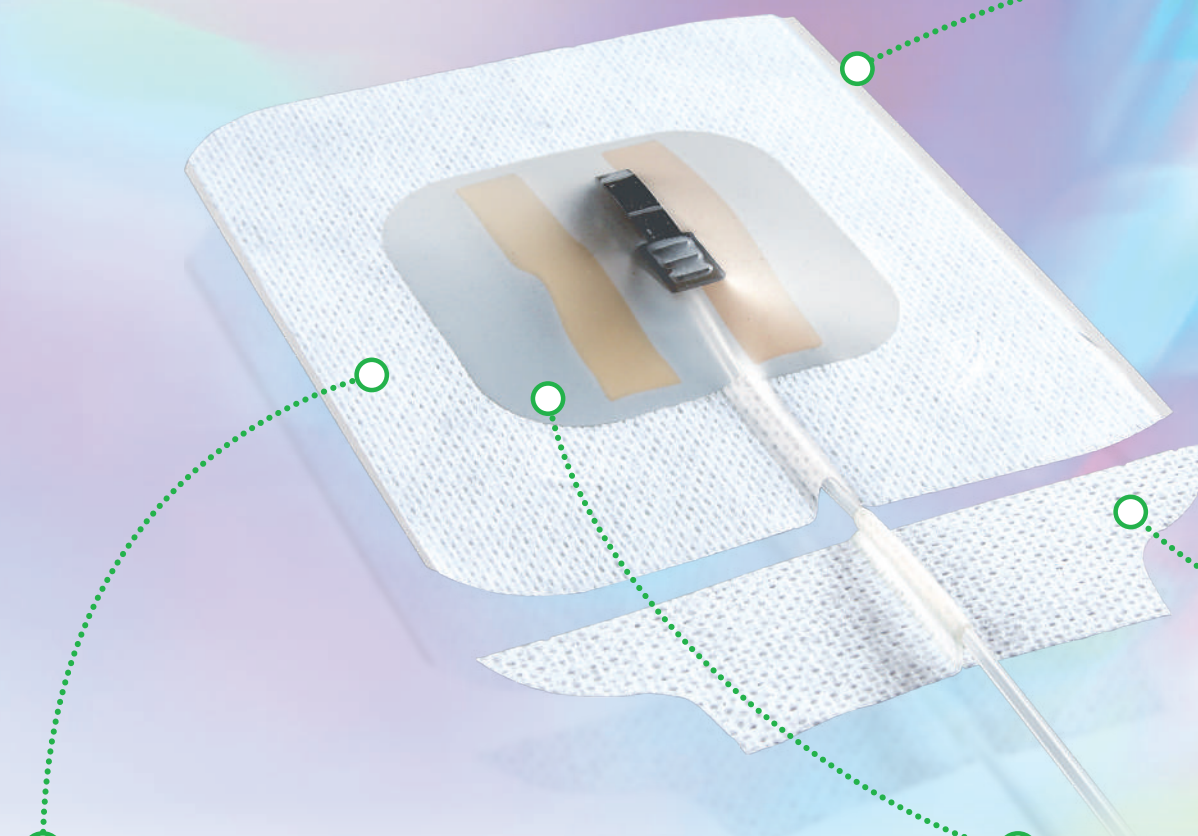


○ アクリル系粘着剤

不織布部分にはアクリル系粘着材を使用することでより剥がれにくい設計にしました。

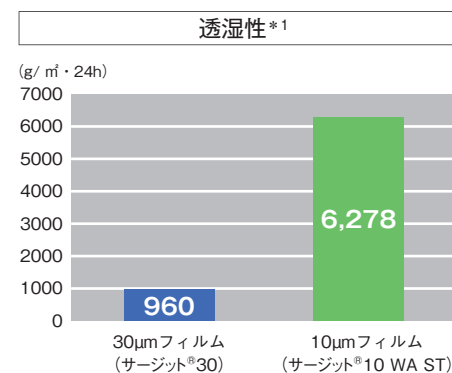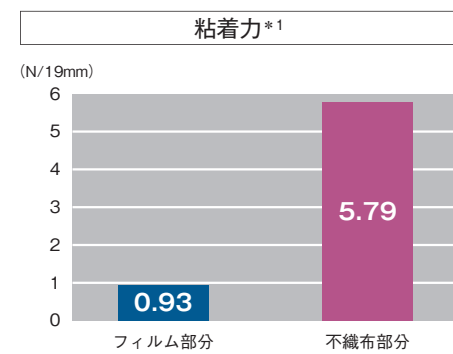

○ 極薄の10μmフィルム


10μmのフィルムは30μmのフィルムに比べ伸びやすく、透湿性にも優れています。

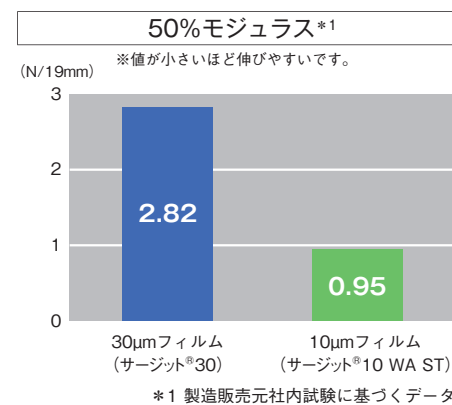

針の抜去を防止する非粘着部

どの方向からドレッシング材を剥がしても、非粘着部がフーバー針等の同時抜去を防止します。

非粘着部のサイズはフーバー針、固定テープが収まるサイズになっております。

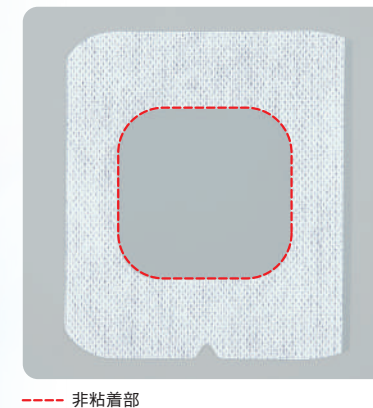

NSD10WASTを剥がした時



非粘着部が針の同時抜去を防止します。

NSD10WAIV-6を剥がした時




針が粘着面に貼りついて同時抜去される可能性があります。

ドレッシング材の中に貼れる滅菌済み固定テープ

フーバー針の固定用テープ2本、チューブの固定用テープ1本が付属されています。付属の固定テープは滅菌済みになります。


チューブへの固定はΩ貼りがしやすいよう、幅が太くなっており、しっかり固定できます。

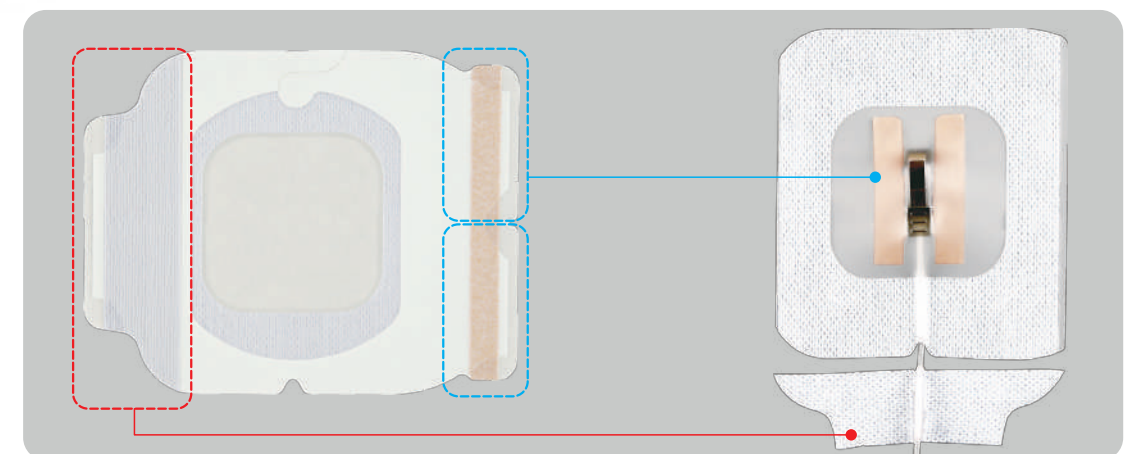


貼り方 (例)




固定テープを剥がします

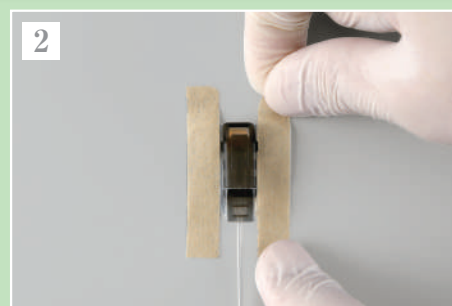


フーバー針を固定します

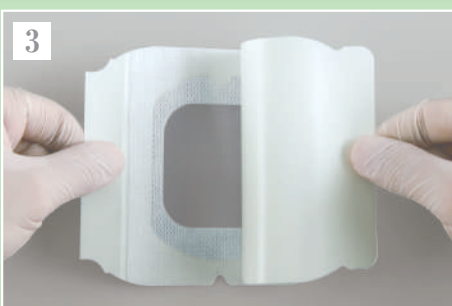

剥離紙を剥がし、粘着面を出します

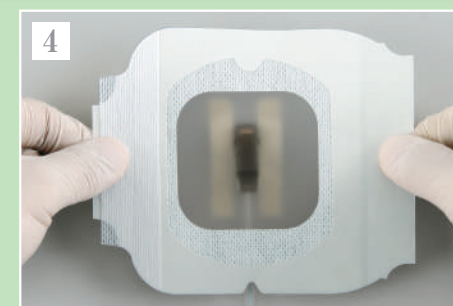

穿刺部位がフィルム(非粘着面)の中央にくるように合わせて貼付します

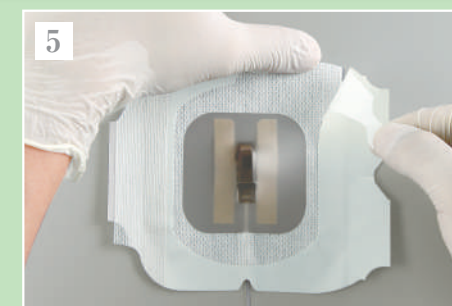

本品を押さえながら表面の剥離紙の取っ手をつまみ、ゆっくり剥がします



チューブに固定テープをΩ貼りし、固定します