

■ その他の鉗子等

エンドピーナッツ™

- 鏡視下手術での鈍的な剥離・圧排に用います。

クリアファイ™ くもり止めシステム

- 手術開始から終了まで良好な視野をお届けします。
- レンズをくもりにくくし、スコピストがレンズを拭く手間を削減します。良好な視野でサポートすることで、手術時間の短縮にも貢献します。

■ シングルユーススペシメンパウチ

ワンタッチで簡単に標本組織を採取できます。

エンドキャッチ™ ゴールド

シャフト径 10mm
口径 63mm
容量 約220ml

エンドキャッチ™ II

シャフト径 15mm
口径 130mm
容量 約1500ml

長いシャフト

深部まで届きます。
(シャフト長:29cm)

大きな開口部

バックは大きく開口しており標本回収が容易です。

- 簡単にパウチの挿入が行えます。
- ハンドルを押すと、ワンタッチでパウチの口が大きく開きますので、組織の採取が容易に行えます。
- 標本組織の採取が終了したら、手元のリングを引くとパウチを閉鎖することができます。これにより、組織を体外へ摘出することができます。

リライアキャッチ™ 10

シャフト径 10mm
口径 約62mm
容量 約275ml

エンドバック™

- シースにポリエチレンバッグが装填された組織回収システムで、トロカー創に癒や感染された組織がさらされません。
(写真は別売の鉗子にて把持しているところです。)

3"×6" 5"×8"
口径 76mm 127mm
深さ 152mm 203mm

製品コード	製品名	販売名	医療機器承認番号等	クラス
174213	ロティキュレーター™ エンドダイセクト™	オペレーティングインスツルメント	20400BZY00452000	Ⅱ
174309	ロティキュレーター™ エンドミニ シアーズ™			
174233	ロティキュレーター™ エンド グラスブ™Ⅱ			
173030	エンド グラスブ™			
176645	エンドダイセクト™			
174317	エンドクリンチ™Ⅱ			
176643	エンドシアーズ™			
174301	エンドミニ シアーズ™			
174601	エンドシアーズ™ ロング			
176605	エンドシズ™			
174001	エンドバブコック™	エンドバブコック	22100BZX00186000	Ⅱ
174209	エンドミニ リトラクト™	エンドミニリトラクト	22100BZX00179000	
176647	エンドリトラクト™Ⅱ	エンドリトラクトⅡ	22100BZX00181000	
173046	エンドバドル 12mm	エンドバドル 12mm	22100BZX00178000	
173050G	エンドキャッチ™ ゴールド	エンドキャッチ ゴールド	22100BZX00176000	
173049	エンドキャッチ™Ⅱ	エンドキャッチⅡ	22100BZX00172000	
25030	3"×6" エンドバック™ (φ7.6cm, 15.2cm長)	エンドバック	22100BZX00126000	
25040	5"×8" エンドバック™ (φ12.7cm, 20.3cm長)			
173019	エンドピーナッツ™	エンドピーナッツ	13B1X00069US013A	
22050	フレッド-2 (結露防止剤)	フレッド2	223AABZX00132000	Ⅱ
21-345	クリアファイ™ くもり止めシステム	クリアファイ	227AABZX00110000	
CATCH10	リライアキャッチ™ 10	リライアキャッチ	231AABZX00003000	

豊富な
ラインナップ



鏡視下手術用鉗子
Single Use Laparoscopic Hand Instruments

使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては
製品の添付文書をご参照ください。

Medtronic

コヴィディエンジャパン株式会社

Tel: 0120-998-971

medtronic.co.jp

©2020 Medtronic.

ct-ah-hi-inst(02)
2012.pdf/essy
SI-A6


Medtronic

■ ロティキュレーター™ シリーズ （シャフト径5mm）フレキシブルな鉗子・剪刀

シャフトのダイヤルを回すと、先端が0°～80°の間でアングルをつけられますので、鏡視下でのアクセスが楽になります。

ロティキュレーター™ エンド ダイセクト™（剥離鉗子）

- 電気メス接続可

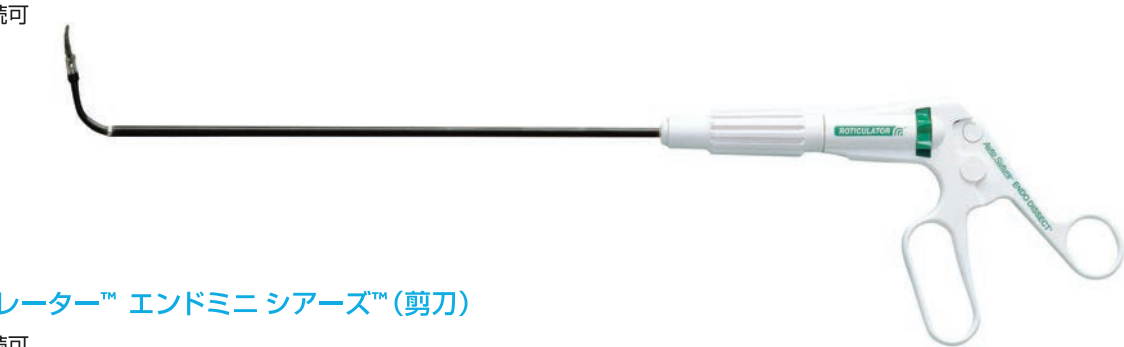

ロティキュレーター™ エンドミニシアーズ™（剪刀）

- 電気メス接続可



ロティキュレーター™ エンド グラスプ™ II（把持鉗子）



シャフトロックスイッチ

- 角度をつけたシャフト先端部が、テンションにより回転することを防止するシステムです。

ラチェットロックシステム採用


- トリガーを握るだけで、把持ロックが解除できます。



■ 10mm鉗子シリーズ

胃腸・子宮・肺などさまざまな組織をしっかりと把持します。

エンド バブコック™（大型把持鉗子）

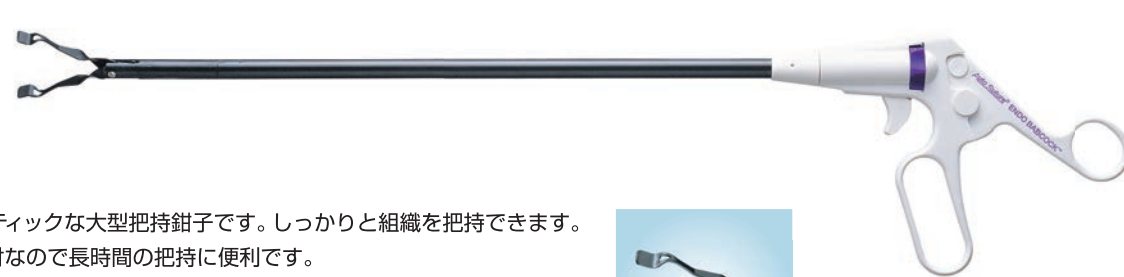

- アトラウマティックな大型把持鉗子です。しっかりと組織を把持できます。
- ラチェット付なので長時間の把持に便利です。



■ 5mm 鉗子シリーズ 人間工学に基づく優れた操作性

外科・胸部外科・産婦人科・泌尿器科をはじめ、さまざまな鏡視下手術にお使いいただけるシングルユース鉗子です。

エンド グラスプ™（把持鉗子）

- 先端にいくほど把持面が広がるユニークなデザインで、しっかりと組織を把持します。
- 使いやすいラチェット付きですので、ワンタッチで固定・解除が行えます。




エンド ダイセクト™（剥離鉗子）

- 剥離操作に適した湾曲型の鉗子です。
- 電気メスを接続し焼灼が行えます。（ラチェット無）



エンド クリンチ™ II（把持鉗子）

- 鉗子先端が30mm開きます。
- ラチェット付きで、厚い組織の把持に便利です。使用例：肥厚した胆嚢壁や肺実質など

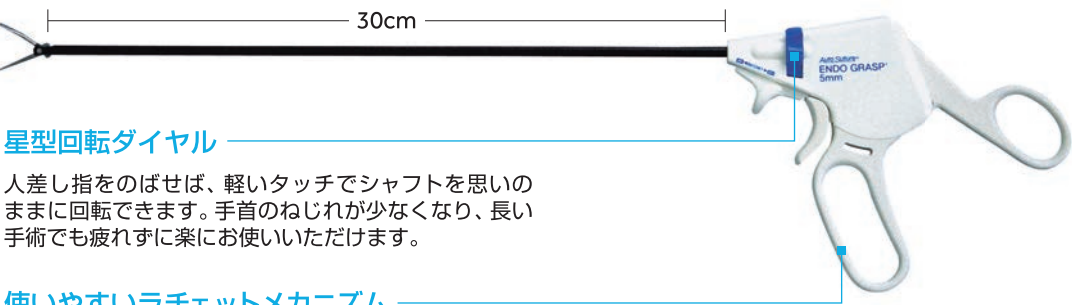

星型回転ダイヤル

人差し指をのばせば、軽いタッチでシャフトを思いのままに回転できます。手首のねじれが少なくなり、長い手術でも疲れずに楽にお使いいただけます。

使いやすいラチェットメカニズム

（エンド ダイセクト™を除く）

段階的なラチェット機構に加え、ラチェットの有無を選択できます。

■ 5mm 剪刀シリーズ

シングルユースのため、いつもシャープな切れ味です。

エンド シアーズ™（剪刀）

- 使いやすい湾曲した形状により、1本で剥離操作、切断及び電気メスを接続しての焼灼が行えます。




エンドミニシアーズ™（マイクロ剪刀）

- エンドシアーズ™の刃先の約半分のみです。
- より繊細な剥離、ピンポイントでの切断、焼灼が行えます。



エンド シズ™（フック剪刀）

- 先端の形状がU字型のため管状の組織を切断しても組織が刀から逃げにくい構造です。
- 厚みのある組織もしっかりと切断します。電気メスと接続し焼灼も行えます。

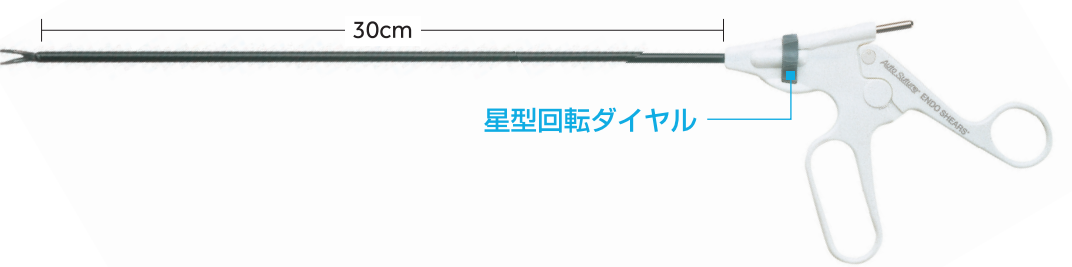

星型回転ダイヤル

■ エンドリトラクト™ 組織圧排子シリーズ

エンド ミニ リトラクト™（圧排子）

- アトラウマティックなフィンガー圧排子です。
- 小さな管状組織や血管の操作に便利です。



エンドリトラクト™ II（圧排子）

- 先端部分が45°まで屈曲できるので、手による圧排のように自由な方向への圧排が可能です。



エンド パドル 12mm（圧排子）

- ポリエステルで覆われたリトラクターです。

